



スマイルデント リニューアル記念!

歯科医院専用 入れ歯洗浄剤

スマイルデント ご愛顧キャンペーン!

大好評!
第18弾

患者様用パンフレットプレゼント

限定 3000 個 2015 年 12 月 21 日 (月) ~ 2016 年 2 月 19 日 (金)

スマイルデント 48錠 6個お買い上げで



患者様用
パンフレット
プレゼント!

- 患者様用パンフレット 20部
 - パンフレット用スタンド付
- サイズ
- ・正面巾 110mm
 - ・正面高さ 110mm
 - ・背もたれの高さ 210mm
 - ・マチ 40mm

患者様向け



スマイルデント 120錠 4個お買い上げで



患者様用
パンフレット
プレゼント!

- 患者様用パンフレット 20部
 - パンフレット用スタンド付
- サイズ
- ・正面巾 110mm
 - ・正面高さ 110mm
 - ・背もたれの高さ 210mm
 - ・マチ 40mm

患者様向け



※デザインはイメージです。

発売元

株式会社モリムラ

本社 社: 〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
 TEL.03-3836-1871 FAX.03-3832-3810
 大阪営業所: 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町13-15
 TEL.06-6170-8239 FAX.06-6170-8249
<http://www.morimura-jpn.co.jp>



特長

強力除菌

カンジダ菌
除菌率*

99.9%

※5分で99.9%除菌します。
※全ての菌に効果があるわけではありません。


- ① 強力除菌* 入れ歯に付着している菌をしっかり除菌します。
- ② ニオイ除去 漂白洗浄成分が入れ歯のニオイを除去します。
- ③ 酵素配合 酵素がしつこい汚れも除去します。
- ④ らくらく洗浄 水でもキレイに汚れを取り、漂白できます。
- ⑤ ミントの香り さわやかなミントの香りでスッキリ爽快。

ダブル除菌剤配合

Ag⁺

銀イオン


アルミノケイ酸塩（銀イオン含有）から銀イオンが放出され、入れ歯に付着している菌を取り除きます。

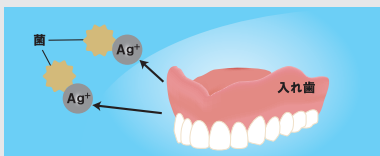

CPC

塩化セチル
ピリジニウム

入れ歯に付着している菌を取り除きます。塩化セチルピリジニウム（CPC）は、歯磨剤、のど飴などにも使用されています。

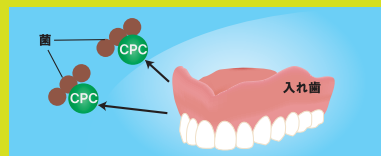

※イラストはイメージです。

部分入れ歯 兼用 総入れ歯
ノンクラスプ入れ歯


中性の液性のため、部分入れ歯や総入れ歯に使用されている金属およびプラスチックの変色を抑制し、入れ歯を洗浄することができます。

ノンクラスプ
入れ歯

クラスプ付
入れ歯

レジン床
入れ歯

金属床
入れ歯


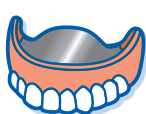


義歯素材危害性試験

入れ歯素材に対するスマイルデントの影響について試験を行いましたところ、一般的な入れ歯素材には問題なく使用できることが確認されました。

ノンクラスプ入れ歯

チタン床入れ歯

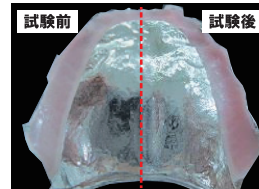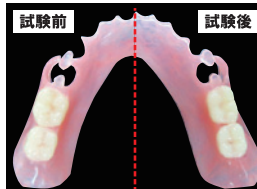

※一部の銀合金仕様の入れ歯では変色することがあります。その場合は使用を中止してください。

使用法

- ① 約300mLの水またはお湯（40～50℃）にスマイルデントを1錠入れます。
- ② すぐに入れ歯を浸してください。通常の汚れの洗浄は、5分程度で終了します。
- ③ 洗浄後は水でよくすすいでください。

*特に汚れがひどい場合は一晩浸しておく効果的です。
*錠剤は1回1錠が目安です。また、溶液は毎回お取替えください。
*毎日の使用で、さらに効果が増します。

形態・仕様は予告なく変更することがあります。



製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル TEL. 0120-33-8020 FAX. 0120-66-8020

発売元 株式会社モリムラ 株式会社モリムラ
本社：〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL.03-3836-1871 FAX.03-3832-3810
大阪営業所：〒584-0051 大阪府吹田市豊津町13-15
TEL.06-6170-8239 FAX.06-6170-8249
http://www.morimura-jpn.co.jp

製造元 井藤漢方製薬株式会社 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2-4-1

●製品に関するご用命は