

Mモリムヨ ご愛顧キャンペーン

キャンペーン期間：2015年 6月22日(月)～ 8月20日(木)

硬化時間わずか**2分**のシリコーン系模型材

クイックダイ



精密で加工しやすい
シリコーン系模型材



内容：●クイックダイ
カートリッジ 48mL入 2個
(ベース24mL、
キャタリスト 24mL)
●ミキシングチップ 4個

歯科医院様参考価格

¥9,900


特別価格

にてご提供いたします


窩洞形成、覆髄、裏層後、
印象採得を行い、印象に
クイックダイを注入する。



作製したクイックダイ模型。
クイックダイは2分で硬化し、
窩洞が精密に再現される。

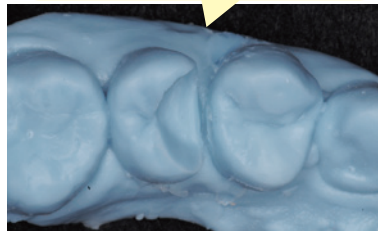

模型はスムーズに分割でき、
CRインレーの隣接面の解剖学的
曲面を付与することが可能。

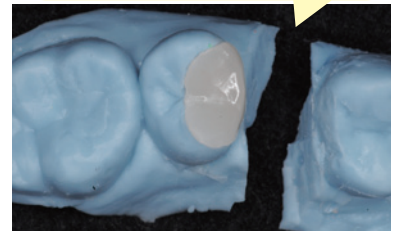

※臨床写真ご提供：シハラ歯科医院 院長 篠原 俊介 先生

一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 医療機器届出番号 13B1X10098040014 製造業者：BISCO, Inc. (ビスコ インク社) 製造国：アメリカ合衆国 (USA)

負担を感じず震えることなくスムーズな印象採得が可能

精密印象採得用シリンジ エコシリンジ

ECOシリンジ

360度回転する
先端チップ



ご使用のカートリッジ型
シリコーン印象材用
ディスペンサーガンから
ECOシリンジに印象材の
必要量をラクラク装填



20本入

歯科医院様参考価格

¥2,800

特別価格

にてご提供いたします

100本入

歯科医院様参考価格

¥11,200

特別価格

にてご提供いたします

コンパクトシリンジ



手のひらサイズで軽量の
ため、負担を感じず、震
えることなく、ペースト
を適用することができ、
気泡の混入を防止します。

細い先端チップ



狭くてアクセスしにくい
部位にも、先端チップの
角度が適切で細いため、
簡単に直接アクセスでき
ます。

一般医療機器 歯科用練成器具 医療機器届出番号 13B1X10098010023 製造業者：DANVILLE MATERIALS (ダンビル マテリアルズ社) 製造国：アメリカ合衆国


チェアサイドで即模型完成！急な処置にもご活用いただくことができます！

精度の良い模型の作製に


クイックダイとECOシリンジを併用した模型作製



クイックダイを汎用カートリッジ用ディスペンサーに装着します。

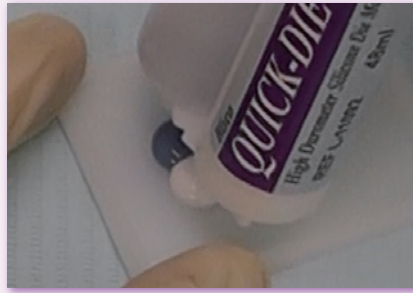

クイックダイのペーストを押し出し、均一であることを確認します。

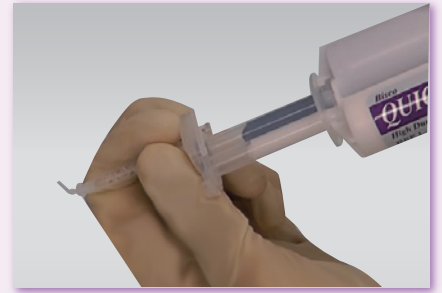


ECOシリンジにクイックダイのペーストの必要量を装填します。

ペースト装填の目安：

最大(約40mm)：歯冠部1～2歯分


※最大装填する場合はリングより約5mmのスペースを開けてください。それ以上装填しますと、ペーストが溢出する可能性があります。

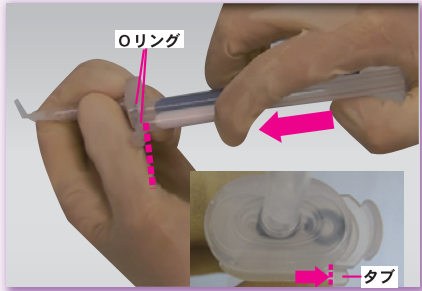


ECOシリンジにプランジャーを差し込み、Oリングの位置までペーストを押し込みます。

接続部をタブの手前までスライドさせます。


※接続部が上蓋となりペーストを保管することができます。

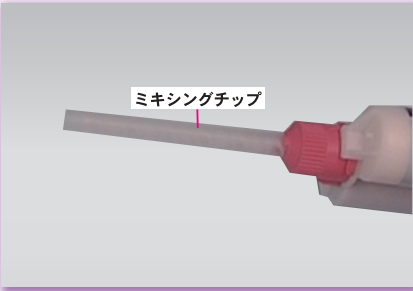

クイックダイにミキシングチップを装着します。

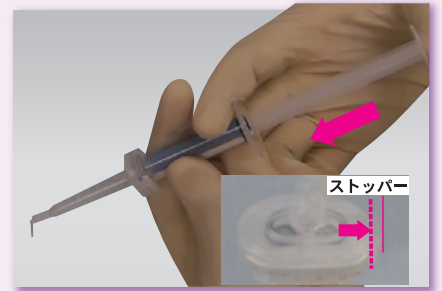

ECOシリンジのタブが外れるまで一杯に押し切り、ストッパーの位置に合わせて、プランジャーを押し、先端チップよりペーストの試し出しします。

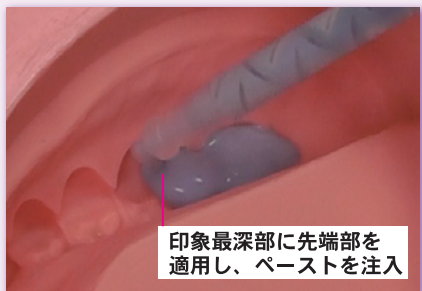

印象最深部からペーストが満たされるまで注入します。気泡混入を減らすため、先端部は注入しているペースト内に維持して注入し続けます。



継続してクイックダイのミキシングチップをペースト内に挿入し維持して注入し続けます。



クイックダイの硬化後、模型を取り外します。模型は必要に応じて技工用ナイフまたは歯科用バー等で調整することができます。

本紙に掲載されている価格は2015年6月22日のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは
お客様窓口フリーダイヤル

TEL.0120-33-8020 FAX.0120-66-8020

製造販売業者  EIKO CORPORATION

販売業者  株式会社モリムラ

株式会社エイコー

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL.03-3834-5777 FAX.03-3837-2655

株式会社モリムラ

本社：〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL.03-3836-1871 FAX.03-3832-3810
大阪営業所：〒564-0053 大阪府吹田市江の木町5-3
レーベンハウス江坂405号
TEL.06-6170-8239 FAX.06-6170-8249
<http://www.morimura-jpn.co.jp>

クイックダイおよび
ECOシリンジを併用した
模型材の作製の動画を
ご覧いただくことが
できます



●製品に関するご用命は