

## II級窩洞修復用マトリックスシステム

# コンタクトマトリックスシステム



### コンタクトマトリックス (キット)

半ドーム状の豊隆が付与されたステンレス鋼製の薄型マトリックス **コンタクトマトリックス** とマトリックスを簡単に固定する **コンタクトリング** のセットです。

- 内容:
- ・コンタクトリング(外向き・内向き) 各1個
  - ・コンタクトマトリックス(ソフトL・ソフトS) 各50枚

歯科医院様参考価格 **¥12,000**




マトリックスをリングで圧接固定するため充填中にマトリックスがゆるみにくく、理想的な接触点が得られます。

■一般医療機器 医療機器届出番号13B2X10359010004

#### 幅広く長い把持脚




コンタクトリングの幅広い把持脚は、切削面積が広い隣接面でも把持脚が隣接面窩洞内に入り込むことなく、しっかりとマトリックスを固定します。

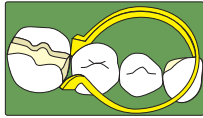

#### 把持脚とフープ部角度は105°に設計




把持脚のテーパは、装着後リングが外れにくく、リングを重ねて装着することもできます。

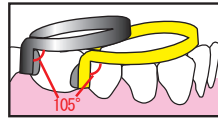

#### リングの把持脚の向きは内向きと外向きの2種類



内向きは、内側にマトリックスを固定します。 外向きは、外側にマトリックスを固定します。

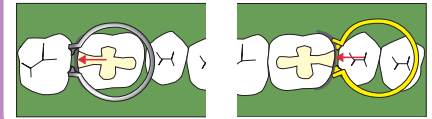

## メガVリング



1個入 歯科医院様参考価格 **¥7,800**  
2個入 歯科医院様参考価格 **¥15,000**

■一般医療機器 医療機器届出番号13B2X10359010031

#### V字型の溝の把持脚底部



V字型および三角型ウェッジを容易に保持可能!

#### 充填を容易にする把持脚角度




リングは重ねて装着可能! 急な脱落を防ぐ把持脚!

#### アクセスを容易にする大きいリング直径



優れた分離力! リングは反対方向に装着可能!

### メガVリング 使用方法

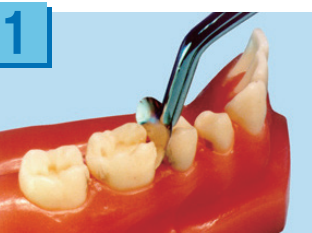

1 必要に応じて歯間分離します。マトリックスおよびウェッジの種類及びサイズを選択し、歯間部に挿入します。



2 コンタクトプライヤー等を用いてメガVリングを保持します。



3 把持脚のV字型の溝とV字型または三角型のウェッジの頂点を合わせて、まがく位置にて装着し、マトリックスを固定します。



4 二級高洞修復を行います。

※リングはオートクレーブ滅菌可能(135℃15分まで)です。


# コンタクトマトリックスシステム 使用方法




コンタクトマトリックスの種類を選び、プレースメントツィヤー等を用いて保持します。




コンタクトマトリックスを修復する歯牙の隣接面の湾曲部を回復できるように装着します。

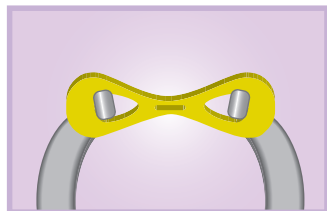


コンタクトウェッジの種類を選び、左右の穴にコンタクトプライヤー等の先端部を差し込みます。

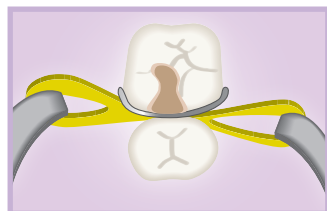


コンタクトウェッジを広げて伸ばします。

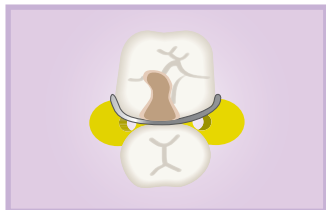


コンタクトウェッジを歯間部に装着して、コンタクトマトリックスを固定します。

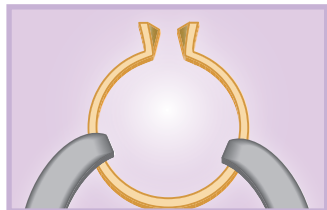

必要に応じ、コンタクトリングの種類を選び、コンタクトプライヤー等を用いて保持します。

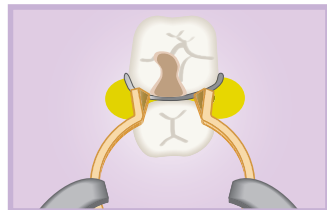

コンタクトリングを広げ、コンタクトウェッジの上部や背部に装着します。

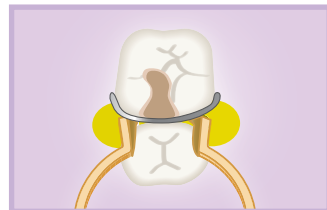

固定後。

## コンタクトマトリックス関連製品

### コンタクトマトリックス

半ドーム状の豊隆が付与されたステンレススチール製の薄型マトリックスです。隣接面形態に適合しやすく充填時の圧力にも付与した形状を維持します。

<b>ソフト L</b>  幅:約14mm×高さ:約7mm 厚さ:約0.038mm ステンレススチール製 ■100枚入	<b>ソフト S</b>  幅:約14mm×高さ:約5mm 厚さ:約0.038mm ステンレススチール製 ■100枚入	<b>ハード L</b>  幅:約14mm×高さ:約7mm 厚さ:約0.058mm ステンレススチール製 ■100枚入	<b>ハード S</b>  幅:約14mm×高さ:約5mm 厚さ:約0.058mm ステンレススチール製 ■100枚入	<b>ウルトラソフト L</b>  幅:約14mm×高さ:約7mm 厚さ:約0.038mm ソフトステンレススチール製 ■100枚入	<b>ウルトラソフト S</b>  幅:約14mm×高さ:約5mm 厚さ:約0.038mm ソフトステンレススチール製 ■100枚入	<b>サブジンジバル</b>  幅:約14mm×高さ:約9.5mm 厚さ:約0.038mm ステンレススチール製 ■50枚入
--	--	--	--	---	---	---

■ソフト L、ソフト S、ハード L、ハード S 歯科医院様参考価格 各 ¥ 8,900 ■ウルトラソフト L、ウルトラソフト S 歯科医院様参考価格 各 ¥ 10,800 ■サブジンジバル 歯科医院様参考価格 ¥ 7,700  
 ■一般医療機器 医療機器届出番号13B2X10359010004

### コンタクトリング

歯科用マトリックスリテーナです。把持脚が内向きと外向きの2種類があります。

<b>内向き</b>  幅:約19mm 全体の高さ:約10mm 把持脚の高さ:約5mm ■内向き・外向き 各1個入 ■内向き 2個入 ■外向き 2個入 歯科医院様参考価格 各 ¥ 5,000 ■一般医療機器 医療機器届出番号13B2X10359010003	<b>外向き</b>  幅:約19mm 全体の高さ:約10mm 把持脚の高さ:約5mm ■内向き・外向き 各1個入 ■内向き 2個入 ■外向き 2個入 歯科医院様参考価格 各 ¥ 5,000 ■一般医療機器 医療機器届出番号13B2X10359010003
---	---

### コンタクトウェッジ

マトリックスに穏やかな圧力を加えて固定する弾性ポリウレタン製ウェッジです。マトリックスと隣接面との間にスペースを生じませんので、マトリックスと歯質の間からフロアブルレジン等が流れ出す心配がありません。

<b>S グリーン</b>  高さ:2.0mm	<b>M イエロー</b>  高さ:2.6mm	<b>L ブルー</b>  高さ:3.2mm
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------


■コンタクトウェッジ(L ブルー) 85個入  
 ■コンタクトウェッジ(M イエロー) 85個入  
 ■コンタクトウェッジ(S グリーン) 85個入  
 歯科医院様参考価格 各 ¥ 8,900  
 ■コンタクトウェッジ(キット)  
 内容:コンタクトウェッジ(S グリーン 30個、M イエロー 85個、L ブルー 85個)  
 歯科医院様参考価格 ¥ 22,600  
 ■コンタクトウェッジ(イントロキット)  
 内容:コンタクトウェッジ(S グリーン 30個、M イエロー 30個、L ブルー 30個)  
 歯科医院様参考価格 ¥ 7,700  
 ■一般医療機器 医療機器届出番号13B2X10359010001

### メガリング

コンタクトリングより幅広の歯科用マトリックスリテーナです。把持脚が内向きと外向きの2種類があります。

<b>内向き</b>  幅:約22mm 全体の高さ:約13mm 把持脚の高さ:約7mm ■内向き・外向き 各1個入 ■内向き 2個入 ■外向き 2個入 歯科医院様参考価格 各 ¥ 9,400 ■一般医療機器 医療機器届出番号13B2X10359010006	<b>外向き</b>  幅:約22mm 全体の高さ:約13mm 把持脚の高さ:約7mm ■内向き・外向き 各1個入 ■内向き 2個入 ■外向き 2個入 歯科医院様参考価格 各 ¥ 9,400 ■一般医療機器 医療機器届出番号13B2X10359010006
---	---

### メガグリップフォーセップス

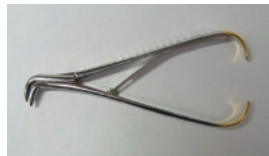

コンタクトマトリックス等を取り外す際に使用するフォーセップスです。マトリックスをしっかりと保持します。

■1本入  
 歯科医院様参考価格 ¥ 13,000  
 ■一般医療機器 医療機器届出番号13B2X10359010005

### コンタクトプライヤー



開口度が広く、コンタクトウェッジ等の脱着に適しているプライヤーです。

■1本入  
 歯科医院様参考価格 ¥ 13,000  
 ■一般医療機器 医療機器届出番号13B1X10098010002

### コンタクトプライヤープラス



開口度が狭く、コンタクトリング、メガリング等の脱着に適しているプライヤーです。

■1本入  
 歯科医院様参考価格 ¥ 13,000  
 ■一般医療機器 医療機器届出番号13B2X10359010022

本紙に掲載されている価格は2021年9月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製造業者: ZEST ANCHORS LLC(ゼスト アンカース エルエスシー) 製造国: アメリカ合衆国

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは  
**お客様窓口フリーダイヤル**

TEL. 0120-33-8020 FAX. 0120-66-8020



株式会社 **モリムラ**

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10  
 TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351  
<http://www.morimura-jpn.co.jp>

●製品に関するご用命は