


TheraCal™ LC

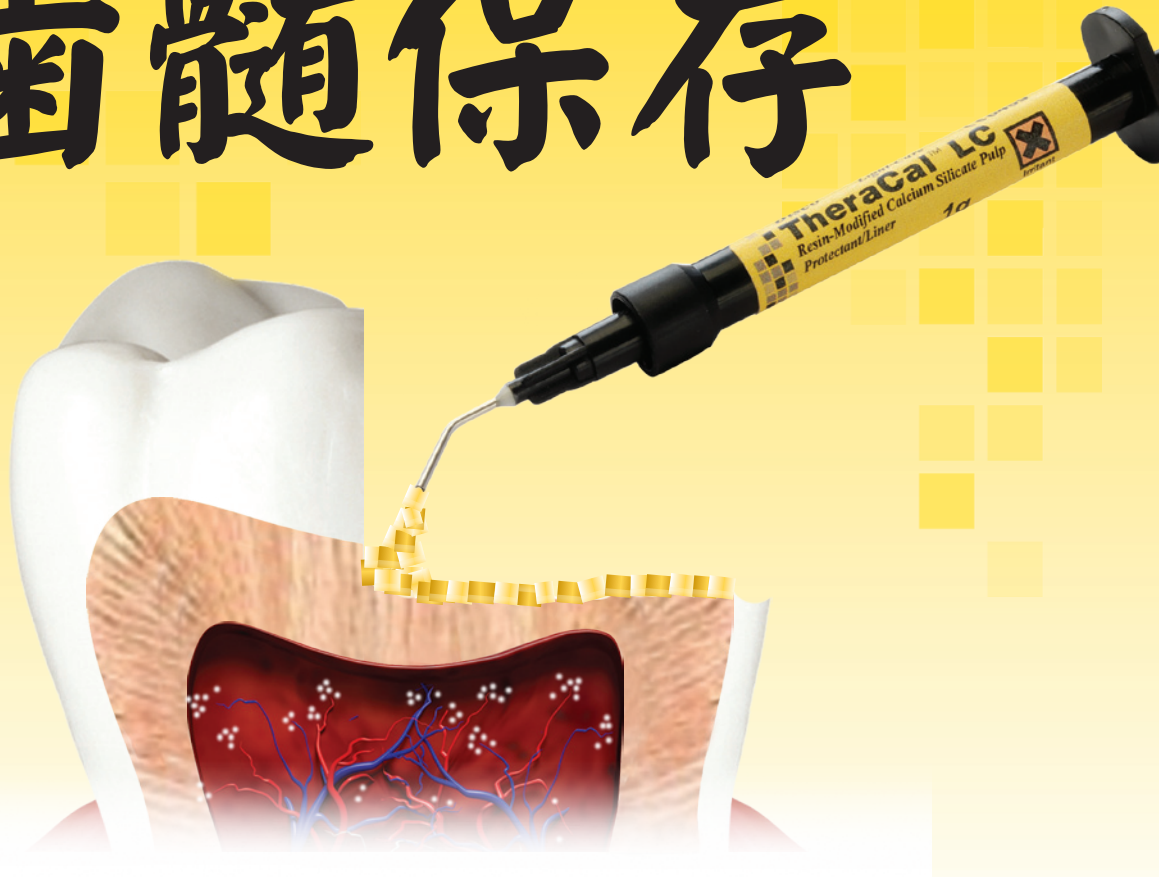

歯髄保存

MTA系



光重合型レジン強化型ケイ酸カルシウム覆髄材 セラカルLC キャンペーン

キャンペーン期間：2015年 4月 21日（火）～ 6月19日（金）

セラカルLC 1g 4本入



1本あたり ¥5,250

内容：セラカルLC 1g 4本
シリンジチップ（ブラック 22G） 50本

歯科医院様参考価格 **¥21,000**

セラカルLC 1g 1本入



内容：セラカルLC 1g 1本
シリンジチップ（ブラック 22G） 15本

歯科医院様参考価格 **¥5,900**

合計歯科医院様参考価格
¥26,900


特別価格
にてご提供いたします

セラカルLCは、光重合型レジン強化型ケイ酸カルシウム覆髄材です。


ケイ酸カルシウム、親水性モノマー、疎水性モノマーをBISCO社独自の製法により配合し、
覆髄に重要な生体親和性、カルシウムイオンの放出、高い封鎖性、歯質接着性を可能にした
直接、間接覆髄材料です。

●生体親和性&カルシウムイオンを放出

生体親和性に優れています。
セラカルLCの浸透性のある親水性モノマーは、
重合後、組織内液との相互移動を可能とし、
ケイ酸カルシウムから、カルシウムイオンと
水酸化イオンを放出し、アルカリ環境をつくり、
デンティンブリッジの形成を促進します。

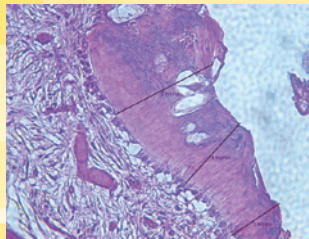

セラカルLCを適用した28日後。
デンティンブリッジの形成を
確認することができます。

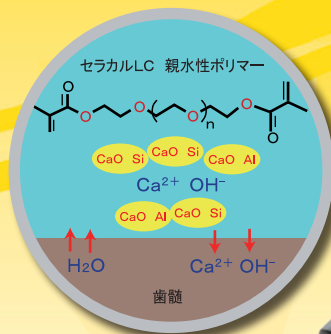

●高い封鎖性&歯質接着性

歯質と接着する親水性モノマーを配合。
歯質接着性及び高い封鎖性を有し、辺縁漏洩を防止し、
歯髄を保護します。

●簡単操作

シリンジタイプのため、練和不要で直接適用できます。
光重合型のため、光照射するまで、適切な操作を
行うことができます。

適応：直接覆髄、間接覆髄

直接覆髄

Dentistry courtesy of Dr. Mark Cannon




ラバーダム防湿のもと、窩洞形成します。必要に応じて洗浄を行います。生理食塩水を浸した綿球にて露髄部を軽く圧迫止血します。綿球等にて余剰水分を除去し、濡れていることが分かる湿潤状態を維持します。
※エアブローは行わないでください。



露髄部及び露髄部周囲象牙質を1mm以上覆うように、セラカルLCを厚み1mm以下にて積層します。



積層ごとに、光重合20秒間(500mW/cm²)します。

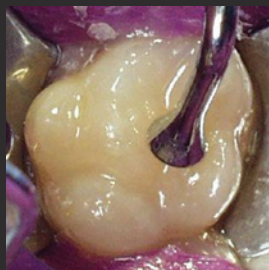

接着処理、コンポジットレジン修復します。



修復後。

物性

接着強さ ¹ (MPa)	X線不透過性 (mm Al)	溶解量 (μg/mm ²)	カルシウム 放出量
4.35	2.63	0	188 (μg/cm ²)

1. 湿潤下接着

BISCO社自社データ

医療機器認証番号:225AGBZX00008000

管理医療機器

歯科用覆髄材料

製造業者:BISCO, Inc.(ビスコ インク社)

製造国:アメリカ合衆国(USA)

本紙に掲載されている価格は2015年3月23日のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

➡ TEL.0120-33-8020 FAX.0120-66-8020

製造販売業者



販売業者



株式会社エイコー

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL.03-3834-5777 FAX.03-3837-2655

株式会社モリムラ

本社:〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL.03-3836-1871 FAX.03-3832-3810
大阪営業所:〒564-0053 大阪府吹田市江の木町5-3
レーベンハウス江坂405号
TEL.06-6170-8239 FAX.06-6170-8249
<http://www.morimura-jpn.co.jp>

●製品に関するご用命は