

モックアップでも



魅せる



REVEAL



リピール
リピールクリアマトリックス
セレクトHVエッチ
オールボンドユニバーサル
の
キット

ケース入



歯科医院様参考価格

リピールスターターキット ¥18,000

構成品

※ リピールは、A1（2本入）、ブリーチ（2本入）、アソート（A1×1本、ブリーチ×1本）の3種類からご選択ください。



審美・暫間修復用光重合型
フロアブルコンポジットレジン

- リピール（シリンジ A1 2本入）
内容
・リピール A1 1.5g×2本
・リピールチップ 2本
- OR
- リピール（シリンジ ブリーチ 2本入）
内容
・リピール ブリーチ 1.5g×2本
・リピールチップ 2本
- OR
- リピール（アソート 2本入）
内容
・リピール A1 1.5g×1本
・リピール ブリーチ 1.5g×1本
・リピールチップ 2本



複模型用VPS透明印象材

- 内容
- ・リピールクリアマトリックス カートリッジ×2本
 - ・ミキシングチップ（グリーン）×6本



35%リン酸高粘度エッチング材

- 内容
- ・セレクトHVEッチ（シリンジ 5g） 1本
 - ・シリンジチップ（ダークブルー 22G） 15本



歯質用の1液性光重合型セルフ
エッチングタイプ接着材

- 内容
- ・オールボンドユニバーサル（0.5mL） 1本

- リピールスターターキットは、A1（2本入）、ブリーチ（2本入）、アソート（A1×1本、ブリーチ×1本）の3種類があり、各種類に、リピールクリアマトリックス、セレクトHVエッチ、オールボンドユニバーサルを組み合わせています。
- リピールの単品は、A1（2本入）、ブリーチ（2本入）の2種類をご用意しています。

リピールスターターキット
医療機器認証番号：228AGBZX00050000 管理医療機器 歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ(31783000)
(歯科用象牙質接着材(42483002)、歯科複模型用ゴム弾性印象材料(70891000)、
歯科用エッチング材(36153000)、歯科用充填・修復材補助器具(38782000)、歯科用練成器具(70682000))

リビールスターターキット ご使用方法

口腔外準備



術前。




診断用ワックスアップ模型を作成します。



既製透明トレーもしくは個人トレーにリビールクリアマトリックスを注入します。



リビールクリアマトリックスを注入した既製透明トレーに診断用模型を正確に適合させます。

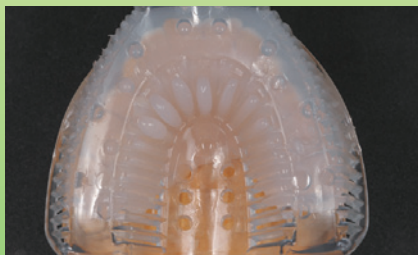

硬化するまで保持します。



リビールクリアマトリックスによる印象面。余剰クリアマトリックスをトリムし除去します。


口腔内作業



暫間期間に応じて、スポットエッチングします。



接着部位以外および歯肉縁等に分離材を適用します。接着部位に接着材の製造業者の指示に従って、接着処理を行います。

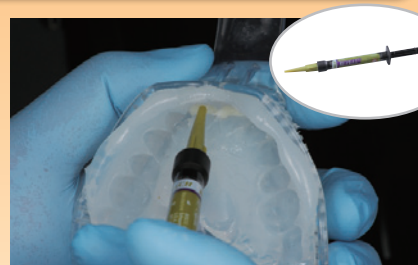

リビールを、リビールクリアマトリックスに注入します。



リビールを注入した既製トレーを口腔内の正確な位置に適用し、リビールを各歯面あたり各20秒間光照射します。



既製トレー撤去後。形態修正および研磨します。



術後。

臨床写真ご提供：代官山アドレス歯科クリニック 大河 雅之 先生

本紙に掲載されている価格は2016年6月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製造業者: BISCO, Inc. (ビスコ インク社) 製造国: アメリカ合衆国 (USA)

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL. 0120-33-8020 FAX. 0120-66-8020

製造販売業者 EIKO CORPORATION

販売業者 株式会社モリムラ

株式会社エイコー

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL.03-3834-5777 FAX.03-3837-2655

株式会社モリムラ

本社: 〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL.03-3836-1871 FAX.03-3832-3810
大阪営業所: 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町13-15
TEL.06-6170-8239 FAX.06-6170-8249
<http://www.morimura-jpn.co.jp>

●製品に関するご用命は