

モックアップ材料

リビールスターターキットに 各種少量入のミニが新登場!

●リビールスターターキット(ミニ A1)

- | | | |
|----|--------------------------------|-----|
| 内容 | リビール(シリンジ A1) | 1本 |
| | リビールチップ | 3本 |
| | EZ-COPY クリアマトリックス(カートリッジ 48mL) | 1本 |
| | EZ-COPY クリアマトリックス(ミキシングチップ) | 3本 |
| | セレクトHVエッチ(シリンジ 5g) | 1本 |
| | シリンジチップ(ダークブルー 22G) | 15本 |
| | オールボンドユニバーサル(0.5mL) | 1本 |
| | アプリケーター(オレンジ レギュラー) | 5本 |
| | ミキシングウェル(ディスポーザブル 2穴) | 3個 |

●リビールスターターキット(ミニ プリーチ)

- | | | |
|----|--------------------------------|-----|
| 内容 | リビール(シリンジ プリーチ) | 1本 |
| | リビールチップ | 3本 |
| | EZ-COPY クリアマトリックス(カートリッジ 48mL) | 1本 |
| | EZ-COPY クリアマトリックス(ミキシングチップ) | 3本 |
| | セレクトHVエッチ(シリンジ 5g) | 1本 |
| | シリンジチップ(ダークブルー 22G) | 15本 |
| | オールボンドユニバーサル(0.5mL) | 1本 |
| | アプリケーター(オレンジ レギュラー) | 5本 |
| | ミキシングウェル(ディスポーザブル 2穴) | 3個 |

2017年
4月21日~
新発売



歯科医院様参考価格

リビールスターターキット(ミニ) ¥5,900

構成品

※ リビールは、A1、 プリーチの2種類からご選択ください。

審美・暫間修復用光重合型
フロアブルコンポジットレジン

リビール

A1



OR



複製型用VPS透明印象材

EZ-COPY クリアマトリックス



35%リン酸高粘度エッチング材

セレクトHVエッチ



歯質用の1液性光重合型セルフ
エッチングタイプ接着材

オールボンドユニバーサル



リビールスターターキット（ミニ） ご使用方法

口腔外準備



術前。




診断用ワックスアップ模型を作成します。



既製透明トレーもしくは個人トレーに、クリアマトリックスを注入します。



クリアマトリックスを注入した既製透明トレーに診断用模型を正確に適合させます。

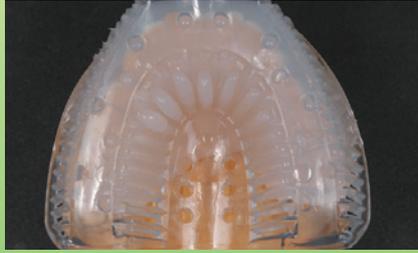

硬化するまで保持します。



クリアマトリックスによる印象面。余剰クリアマトリックスをトリムし除去します。

口腔内作業



暫間期間に応じて、スポットエッチングします。



接着部位以外および歯肉縁等に分離材を適用します。
接着部位に接着材の製造業者の指示に従って、接着処理を行います。



リビールを、クリアマトリックスに注入します。



リビールを注入した既製トレーを口腔内の正確な位置に適用し、リビールを各歯面あたり各20秒間光照射します。



既製トレー撤去後。
形態修正および研磨します。



術後。

臨床写真ご提供：代官山アドレス歯科クリニック 大河 雅之 先生

本紙に掲載されている価格は2017年3月のもの（税抜）です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製造業者：BISCO, Inc. (ビスコ インク社) 製造国：アメリカ合衆国 (USA)

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは
お客様窓口フリーダイヤル

➡ TEL. 0120-33-8020 FAX. 0120-66-8020

製造販売業者 EIKO CORPORATION

販売業者 株式会社モリムラ

株式会社エイコー
〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL.03-3836-1871 FAX.03-3837-2655

株式会社モリムラ
東京本社 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目17番10号
TEL.03-3836-1871 FAX.03-3837-2655
大阪営業所 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町5-8-401
TEL.06-6170-8239 FAX.06-6170-8249
<http://www.morimura-jpn.co.jp>

●製品に関するご用命は