

MTA系

光重合型レジン強化型ケイ酸カルシウム覆髄材

セラカルLC キャンペーン

キャンペーン期間:2019年 7月22日(月) ~ 9月20日(金)

新規
歯科医院様に

セラカルLC 1本入 キャンペーン



セラカルLC 1g 1本入

内容: セラカルLC 1g 1本
シリンジチップ (ブラック 22G) 15本歯科医院様参考価格 **¥5,900**

+



セラカルLC 0.25g 1本入

内容: セラカルLC 0.25g 1本
シリンジチップ (ブラック 22G) 5本歯科医院様参考価格 **¥1,600相当**歯科医院様合計参考価格 **¥7,500****特別価格**

にてご提供いたします

限定:2,000セット ※キャンペーンは数量限定販売につき、期間中でも限定数量に達し次第、終了とさせていただきます。

ご愛用中の
歯科医院様に

セラカルLC 4本入 キャンペーン

1本あたり **¥5,250**

セラカルLC 1g 4本入

内容: セラカルLC 1g 4本
シリンジチップ (ブラック 22G) 50本歯科医院様参考価格 **¥21,000****特別価格**

にてご提供いたします


セラカルLCは、光重合型レジン強化型ケイ酸カルシウム覆髄材です。

ケイ酸カルシウム、親水性モノマー、疎水性モノマーをBISCO社独自の製法により配合し、
覆髄に重要な生体親和性、カルシウムイオンの放出、高い封鎖性を可能にした
直接、間接覆髄材料です。


●生体親和性&カルシウムイオンを放出

生体親和性に優れています。

セラカルLCの浸透性のある親水性モノマーは、
重合後、組織内液との相互移動を可能とし、
ケイ酸カルシウムから、カルシウムイオンと
水酸化物イオンを放出し、アルカリ環境をつくり、
デンティンブリッジの形成を促進します。

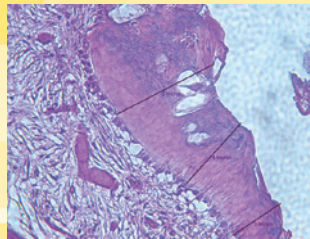

セラカルLCを適用した28日後。
デンティンブリッジの形成を
確認することができます。

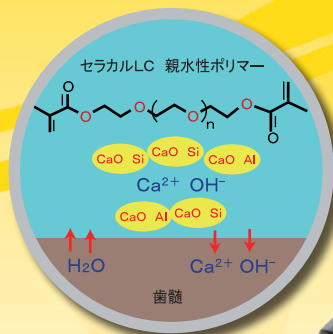

●高い封鎖性

高い封鎖性を有し、辺縁漏洩を防止し、
歯髄を保護します。

●簡単操作

シリンジタイプのため、練和不要で直接適用できます。
光重合型のため、光照射するまで、適切な操作を
行うことができます。

適応：直接覆髄、間接覆髄

直接覆髄


Dentistry courtesy of Dr. Mark Cannon




ラバーダム防湿のもと、窩洞形成します。必要に応じて洗浄を行います。生理食塩水を浸した綿球にて露髄部を軽く圧迫止血します。綿球等にて余剰水分を除去し、濡れていることが分かる湿潤状態を維持します。
※エアブローは行わないでください。



露髄部及び露髄部周囲象牙質を1mm以上覆うように、セラカルLCを厚み1mm以下にて積層します。

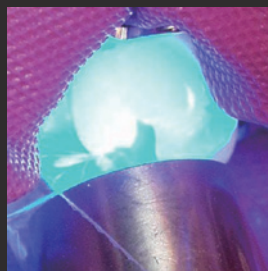

積層ごとに、光重合20秒間(500mW/cm²)します。

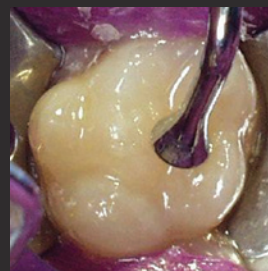

接着処理、コンポジットレジン修復します。



修復後。

物性

X線不透過性 (mm Al)	溶解量 ($\mu\text{g}/\text{mm}^2$)	カルシウム 放出量
2.63	0	188 ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)

BISCO社自社データ

医療機器認証番号:225AGBZX00008000

管理医療機器

歯科用覆髄材料

製造業者:BISCO, Inc.(ビスコ インク社)

製造国:アメリカ合衆国(USA)

本紙に掲載されている価格は2019年7月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL.0120-33-8020 FAX.0120-66-8020



〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-28-10-3F
TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351
<http://www.morimura-jpn.co.jp>

●製品に関するご用命は