

# ジルコニア接着の必需品！

## ジルクリーン キャンペーン

2019年7月22日(月)～9月20日(金)

意外にむずかしいジルコニア接着もなんなく解決！  
ご使用中のレジンセメントにプラスするだけ！  
ジルコニアの洗浄ジェルとプライマーです。

試適後のジルコニアの洗浄に！

### ジルクリーン



包装  
・ジルクリーン 5gシリンジ 1本  
・シリンジチップ(ブラック 22G) 30本

歯科医院様参考価格 ¥3,500

ジルコニア接着に！

### Zプライムプラス



包装  
・Zプライムプラス  
0.5mL ボトル 1本

歯科医院様参考価格 ¥2,500 相当

合計歯科医院様参考価格


## ¥6,000

# キャンペーン 特別価格

にて、ご提供させていただきます。

ジルクリーンは、口腔内への試適後のジルコニア、セラミック、メタルなどの修復物の被着面を洗浄するために開発されたシリンジタイプの非侵襲性の洗浄ジェルです。修復物に塗布し、20秒後に水洗するだけの簡便な使用方法です。


下記は、ジルコニア修復物の唾液汚染後の各種洗浄後の接着強さを示したグラフです。

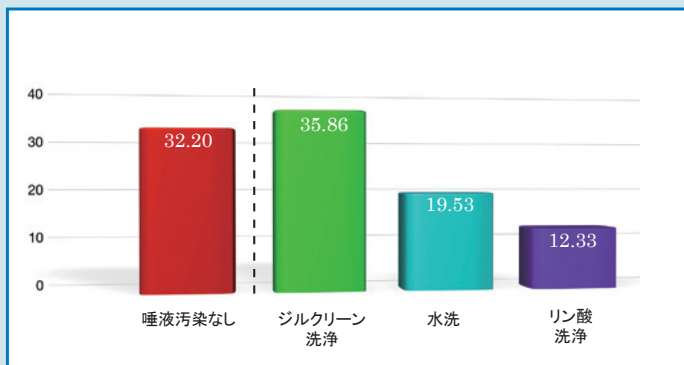

Zプライムプラスおよびデュオリンクユニバーサルを使用した接着強さ ※BISCO社自社試験

Zプライムプラスは、MDPモノマーとBPDMを配合したジルコニア、アルミナ、メタル、レジン系材料用プライマーです。修復物に1～2層塗布し、5秒間エアブローするだけの簡便な使用方法です。

下記は、ジルコニアとレジンセメントとの接着強さのグラフです。

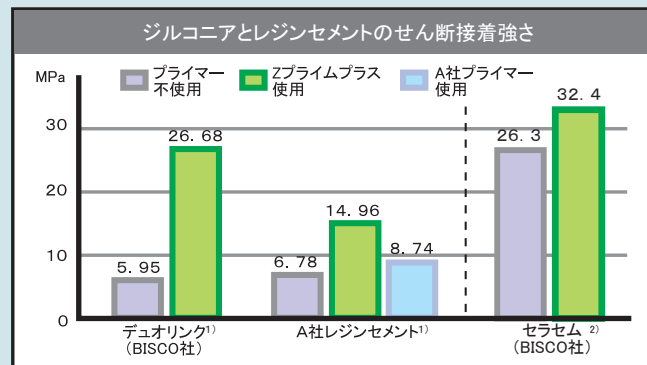

Zプライムプラスは、BISCO社レジンセメント「セラセム」A社レジンセメントの接着強さを向上させたとの報告があります。1)

1) Magne P. et al. New zirconia primer improves bond strength of resin-based cements. Dent Mater (2009).  
2) BISCO社自社試験

※本キャンペーンは、ジルクリーン キャンペーンのため、Zプライムプラス4mLはキャンペーン対象外とさせていただきます。

※Zプライムプラス0.5mLの単品販売はしておりませんので、単品販売につきましては、Zプライムプラス4mLをご注文いただきますようお願い申し上げます。

試適後のジルコニアの洗浄に！

# ジルクリーン



5g 歯科医院様参考価格 **¥3,500**

- ▶ 唾液汚染は、修復物のセメント接着強さに影響すると言われています。より良い接着強さの達成を補助するために、試適後に唾液などの汚れを除去することが重要です。
- ▶ ジルクリーンは、シリンジタイプの修復物洗浄ジェルです。アルカリ性の洗浄成分※によって、試適後の修復物の汚れを除去し、期待したセメント接着強さの達成を補助することができます。

(※5%未満水酸化カリウム溶液)

ジルコニア接着に！

# Zプライムプラス



4mL 歯科医院様参考価格 **¥12,500**

- ▶ ジルコニア、アルミナ、メタルなどの多種類の修復物と汎用レジンセメントとの接着力および耐久性を強化するための1液性プライマーです。
- ▶ 光重合型・化学重合型・両重合型のレジンセメントに対応します。
- ▶ 1～2層塗布および3～5秒エアードライするだけの簡単操作です。光照射不要。

## ジルコニア修復物へのご使用例



プレップシュアIIで支台歯の形成量を確認します。(ジルコニア用、青色厚み2mm)




支台歯形成後。



テンポラリークラウンの装着後。



ファイナルレストレーションを試適します。

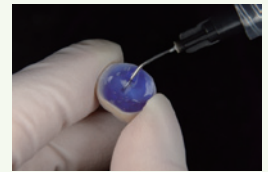

ジルクリーンによる内面清掃します。



20秒後に水洗し、エアードライします。



マイクロエッチャーによる内面サンドブラスト処理をします。



サンドブラスト後。



Zプライムプラスを内面に1～2層塗布し、3～5秒エアードライします。



Zプライムプラス塗布後。光沢感があります。



内面にセラセムを填入します。



修復物を装着します。



仮重合します。



余剰セメントを除去します。



術後。

臨床写真ご提供：土屋歯科クリニック 土屋賢司先生

Zプライムプラス 管理医療機器 歯科セラミック用接着材料、歯科金属用接着材料、歯科レジン用接着材料 医療機器認証番号:222AGBZX00157000  
本紙に掲載されている価格は2019年7月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは  
お客様窓口フリーダイヤル

TEL.0120-33-8020 FAX.0120-66-8020



〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-28-10-3F  
TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351  
<http://www.morimura-jpn.co.jp>

●製品に関するご用命は