



歯科医院専用 入れ歯洗浄剤
スマイルデント

ご愛顧キャンペーン!

大好評!
第25弾

ビタミンC1200プレゼント

限定 2,000 個 2019 年 8 月 21 日 (水) ~ 2019 年 9 月 20 日 (金)

スマイルデント 48錠
6個お買い上げで



スマイルデント 120錠
4個お買い上げで



ビタミンC1200 2g×24袋入 1箱 プレゼント!

普段の生活の中で消費されやすいビタミンCは、体内でつくり出すことができないため、積極的に補う必要があります。コラーゲンの生成にも深く関わっており、健康だけではなく美容にも良い成分として親しまれています。

本品は、1袋(2g)にレモン果実 約60個分※のビタミンC、さらにビタミンB2を配合し、水なしでそのまま食べられる手軽な顆粒スティックです。

健康補助食品として、1日1袋を目安に、そのままお召上がりください。

1袋(2g)中: ビタミンC 1200mg / ビタミンB2 0.6mg
レモン味

※レモン果実1個 120g

※商品はイメージです。

※キャンペーンは数量限定販売につき、期間中でも限定数量(景品: 2,000 個)に達し次第、終了とさせていただきます。

発売元

株式会社モリムラ

〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-28-10-3F
TEL.03-5808-9350 FAX.03-5808-9351



特長

強力除菌

カンジダ菌
除菌率*
99.9%

*5分で99.9%除菌します。
※全ての菌に効果があるわけではありません。

- ① **強力除菌*** 入れ歯に付着している菌をしっかり除菌します。
- ② **ニオイ除去** 漂白洗浄成分が入れ歯のニオイを除去します。
- ③ **酵素配合** 酵素がしつこい汚れも除去します。
- ④ **らくらく洗浄** 水でもキレイに汚れを取り、漂白できます。
- ⑤ **ミントの香り** さわやかなミントの香りでスッキリ爽快。

ダブル除菌剤配合

Ag⁺

銀イオン

アルミノケイ酸塩（銀イオン含有）から銀イオンが放出され、入れ歯に付着している菌を取り除きます。



CPC

塩化セチルピリジニウム

入れ歯に付着している菌を取り除きます。塩化セチルピリジニウム（CPC）は、歯磨剤、のど飴などにも使用されています。

部分入れ歯 兼用 総入れ歯
ノンクラスプ入れ歯

中性の液性のため、部分入れ歯や総入れ歯に使用されている金属およびプラスチックの変色を抑制し、入れ歯を洗浄することができます。

ノンクラスプ
入れ歯



クラスプ付
入れ歯



レジン床
入れ歯




金属床
入れ歯




義歯素材為害性試験

入れ歯素材に対するスマイルデントの影響について試験を行いましたところ、一般的な入れ歯素材には問題なく使用できることが確認されました。

ノンクラスプ入れ歯

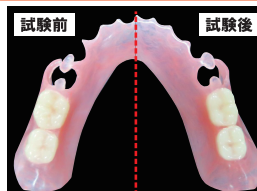

チタン床入れ歯

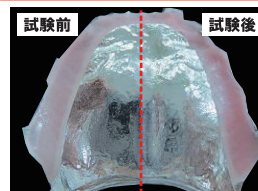

※一部の銀合金仕様の入れ歯では変色することがあります。その場合は使用を中止してください。

使用法

- ① 約300mLの水またはお湯（40～50℃）にスマイルデントを1錠入れます。
- ② すぐに入れ歯を浸してください。通常の汚れの洗浄は、5分程度で終了します。
- ③ 洗浄後は水でよくすすいでください。

*特に汚れがひどい場合は一晩浸しておくとう�효的です。
*錠剤は1回1錠が目安です。また、溶液は毎回お取替えください。
*毎日の使用で、さらに効果が増します。



本紙に掲載されている価格は2019年7月のもの（税抜）です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは
お客様窓口フリーダイヤル

TEL.0120-33-8020 FAX.0120-66-8020

販売業者 株式会社 **モリムラ**

〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-28-10-3F
TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351
http://www.morimura-jpn.co.jp

製造業者 **井藤漢方製薬株式会社**

大阪府東大阪市長田東2-4-1
お問い合わせ TEL 06-6748-9000（代）
月～金（祝日を除く）午前10時～午後5時
ホームページ <http://www.itohkampo.co.jp>

●製品に関するご用命は