

塗布時間
わずか

5秒

歯科用知覚過敏抑制材料

スーパーシール5秒

ご愛顧 キャンペーン

2019年11月21日(木) ~ 2020年1月20日(月)

平素は格別のお引き立てを賜りありがとうございます。
このたび、スーパーシール5秒ご愛顧キャンペーンを実施いたします。
ぜひ、この機会にお買い求めください。

スーパーシール5秒 5mLキャンペーン



新規
歯科医院様へ

歯科医院様参考価格

¥ 9,980 ▶

特別価格

にてご提供いたします

スーパーシール5秒 W キャンペーン



ご愛用中の
歯科医院様へ

歯科医院様参考価格

¥ 18,000 ▶


特別価格

にてご提供いたします


簡単操作

歯面清掃

※スーパーシール5秒
塗布前のエアブロー
は不要です。

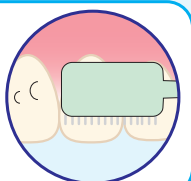


こすり塗り
5秒間

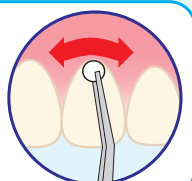

エアブロー

3秒間
※10cm離れたところ
から穏やかなエア
ブローを行ってください。

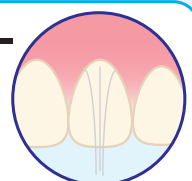

販売名：スーパーシール5秒
管理医療機器 医療機器認証番号：220ADBZX00089A01
一般的名称：歯科用知覚過敏抑制材料（70926000）
製造業者：Phoenix Dental, Inc.（フェニックスデンタル社）

健保適用：保険点数は知覚過敏処置（1口腔1回につき）

3歯まで・・・46点（69点）

4歯以上・・・56点（84点）

※（ ）内の点数は6歳未満の乳幼児又は著しく歯科治療が困難な障害者を診療した場合。

知覚過敏の様々な原因に対応する

スーパーシール5秒



オーバブラッシングによる知覚過敏



かみしめ起因すると思われる知覚過敏



咬耗をともなった知覚過敏



生活歯の窩洞形成後の知覚過敏



エナメル質欠損、歯牙破折部など
象牙質露出部の知覚過敏



ホワイトニング前後の
知覚過敏




露出根面、
窩洞形成後、
スケーリング・ルートプレーニング前後、
PMTTC前後などの知覚過敏抑制に！

ホワイトニング前後の知覚過敏抑制に！

エナメル質にエナメル葉やマイクロクラック等がありますと、
刺激の伝達路となり、知覚過敏が発生することがあります。

象牙質に塗布

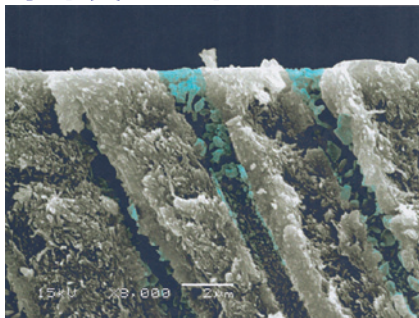


象牙細管内に
シュウ酸カルシウム
結晶を形成して、
象牙細管を封鎖
して知覚過敏を
抑制します。

スーパーシール5秒を塗布した
象牙質SEM像。
シュウ酸カルシウム結晶を
着色したもの。

- 塗布面は結晶の厚みがなく、膜を形成しませんので、続けてすぐに印象採得や、仮封、合着、接着作業が行えます。
- 歯肉等への刺激性成分は配合されておりません。
- 露出根面の歯石等の付着物を除去しやすくし、知覚過敏も抑制します。

エナメル質に塗布

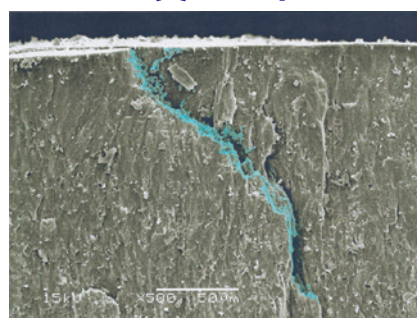

エナメル葉、マイクロ
クラック等内にシュウ
酸カルシウム結晶を
形成して、刺激の伝
達路を封鎖します。

スーパーシール5秒を塗布した
エナメル質SEM像。
シュウ酸カルシウム結晶を
着色したもの。

- 無色透明の液で、塗布した歯面は着色しません。
- ホワイトニング作用に影響を与えません。
- 着色物質の再形成を阻害します。

本紙に掲載されている価格は2019年10月のもの（税抜）です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。 ※臨床写真はクリニカル・M・リポート新聞 第22号及び第38号より、SEM像は第32号より転載しました。

SD サンデンタル株式会社



内外歯材株式会社



モリムラ

本社 〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号
TEL 06-6245-0950 FAX 06-6245-7690
東京営業所 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番3号1F
TEL 03-3836-9347 FAX 03-3836-2090
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4丁目3番9号
TEL 092-482-2318 FAX 092-482-2339

本社 〒543-0062 大阪市天王寺区逢坂2丁目3番10号
TEL 06-6771-5553 FAX 06-6779-7845
名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市中種区山1丁目2番6号
TEL 052-741-7011 FAX 052-741-7014

〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-28-10-3F
TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351