

Smile Dent

Dental Professionals Recommended

# Aligner Retainer Cleaner

Formulated with 2 Active ingredients

Ag<sup>+</sup>

CPC

Kills 99.99%\* of odor-causing bacteria  
Helps Remove Stains and Plaque

※衛生微生物研究センター

Fresh Mint



60 tablets

Color additive free

歯科医院専用

スマイルデント

# アライナー・リテーナー洗剤

## KEEP CLEAN and CLEAR!

### ダブル除菌剤配合

**Ag<sup>+</sup> 銀イオン**

アルミノケイ酸塩（銀イオン含有）から銀イオンが放出され、アライナー等に付着している菌を取り除きます。



**CPC 塩化セチルピリジニウム**

アライナー等に付着している菌を取り除きます。CPCは、歯磨剤、のど飴などにも使用されています。



## 特徴

### パワフル除菌

カンジダ菌  
除菌率\*

**99.99%**

※衛生微生物研究センター  
※5分で99.99%除菌します。  
※全ての菌に効果があるわけではありません。

- ① パワフル除菌** アライナー等に付着しているカビやバイ菌を強力に落とします。
- ② ニオイを防ぐ** ニオイのもとになる汚れを落とし、口臭への悪影響を防ぎます。
- ③ スッキリ洗浄** 酵素の力で汚れを分解し、気持ちよく仕上げます。
- ④ 着色料無配合** 色移りの心配がありません。
- ⑤ ミントの香り** さわやかなミントの香りでスッキリ爽快。

## 使用方法

1

約150mLの水またはお湯（40～50℃）に錠剤を1錠入れます。

△ 60℃以上のお湯で使用しないでください。

※水温が低いとまれに発泡しにくくなります。40～50℃のお湯をおすすめします。

△ 錠剤の包装は使用する直前に切り離して開けてください。

※開けたまま放置すると発泡しないことがあります。



2

すぐにアライナー等を浸してください。

※ふつうの汚れの洗浄は5分程度で終了します。特に汚れがひどい場合は、一晩浸しておくとお勧めです。




3

洗浄後は水でよくすすいでください。

△ ごくまれに汚れが落ちない場合がありますが、無理な洗浄やブラッシングはせず、歯科医にご相談されることをおすすめします。

△ 溶液は毎回お取替えください。

※本製品をご使用后、洗浄液が白濁したり、沈殿物が残ることがありますが、品質には問題ありません。  
※毎日の使用で、さらに効果が増します。  
※錠剤は1回1錠が目安です。

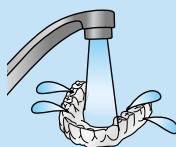

### 成分

漂白剤（過硫酸塩、過ホウ酸塩）、アニオン系界面活性剤、アルミノケイ酸塩、塩化セチルピリジニウム（CPC）、セラック、漂白活性化剤（TAED）、酵素、ポリリン酸塩、発泡剤、結合剤、流動改善剤、香料

### 液性

中性

### 内容量

2.8g × 60錠



60錠入

歯科医院様参考価格 ¥750  
患者様参考価格 ¥950

本紙に掲載されている価格は2020年1月のもの（税抜）です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL. 0120-33-8020 FAX. 0120-66-8020

株式会社 **モリムラ**

〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-28-10-3F  
TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351  
<http://www.morimura-jpn.co.jp>

●製品に関するご用命は