


Mモリム



スプリングキャンペーン

セール期間：2020年3月23日（月）～ 2020年 5月20日（水）



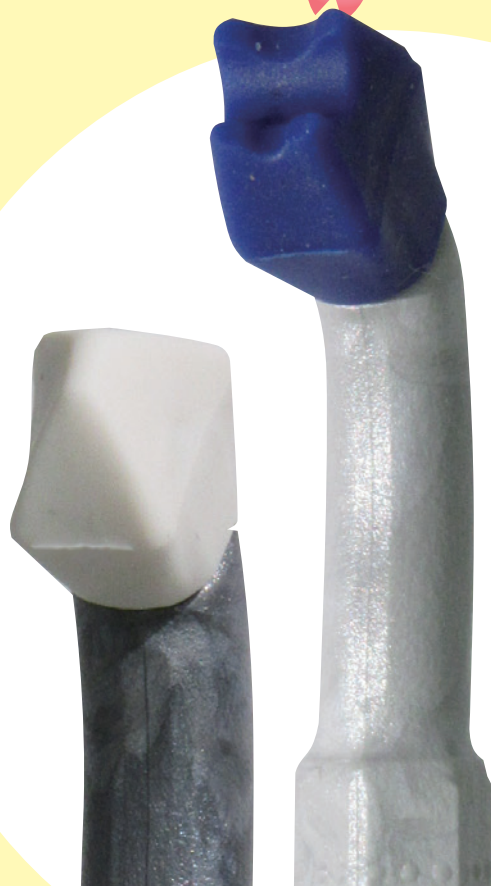

モリムラ スプリングキャンペーン

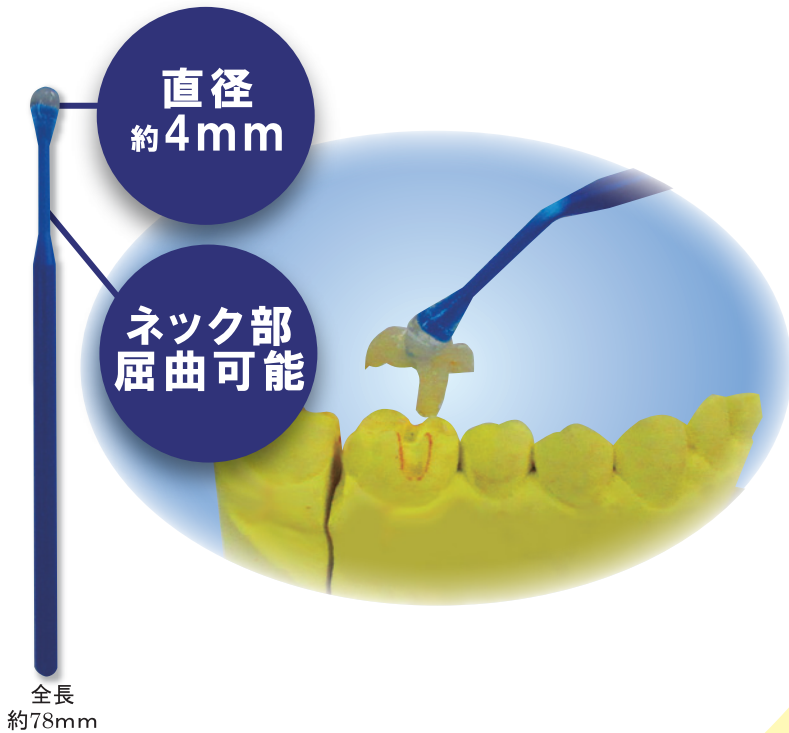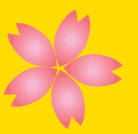

小型粘着棒

イーゼースティック

特徴

- ① 先端の直径約4mmに特殊な粘着加工を施したプラスチック製の小型粘着棒です。
 - ② インレー、アンレー、ベニア、クラウンなどの修復物の保持が容易にできます。
 - ③ 矯正用ブラケットやピン類の搬送作業も容易にできます。
 - ④ サンドブラスト処理、酸処理、プライマー処理などの作業に適しています。
 - ⑤ 1本で試適からセメント合着まで、粘着力が持続します。
- ※再使用禁止。

一般医療機器 製造販売届出番号：13B3X00232100013

修復物の把持・輸送、合着に

修復物合着用器具

ベニア／インレースティックス

- ▶ ベニア／インレースティックスはオートクレーブ滅菌(120℃以下、20分未満)が可能です。
- ▶ チップの材質は合成ゴムです。また、チップは単回使用です。
- ▶ ベニアスティックスにインレー／アンレーチップを装着することができ、その反対も可能です。



ベニアスティックス



図1 中切歯のベニア修復のセット

ベニアチップの短辺を歯頸部側、長辺を切縁側に回転させることができます。4つの突起がベニアを均一に圧接します。

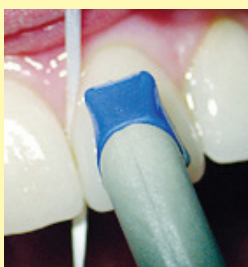


図2 合着

図1 臨床写真ご提供：マイスター春日歯科クリニック 逸山敏成先生

ベニアを圧接しながら、デンタルフロス等を用いて余剰セメントの除去を行うことができますので、ベニアの位置ズレや脱離等のアクシデントを防ぎます。

インレー／アンレースティックス



図1 第一大臼歯のインレーのセット



図2 合着



図3 光照射




図4 最終研磨

セラミックインレーなどは、セット時に圧力をかけ過ぎますと、破折してしまう可能性があります。ソフトなインレー／アンレーチップのクッション性で適切な圧力でセットすることができます。

臨床写真ご提供：マイスター春日歯科クリニック 逸山敏成先生



セール期間：2020年3月23日（月）～ 2020年 5月20日（水）

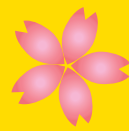

ファイル用ハンドル

ペンタエンドユニバーサルエンドハンドル

ご使用例

ペンタエンド ユニバーサルハンドルは、ご使用の手用ファイルを装着し、簡便に予備拡大をすることができます。



ISO規格の歯科用ファイルのカラーと同じ色のハンドルカラーを選択しますと、装着した歯科用ファイルのサイズを素早く認知し、使用することができます。



ハンドル先端部を半時計方向に回転させ、ゆるめます。



歯科用ファイルをハンドルのチャンバー内に装着します。



ハンドル先端部を時計方向に回転させ、歯科用ファイルを固定します。



根管に合わせて歯科用ファイルをベンドします。



根管を目視でき、根管にファイルを容易に挿入することができ、予備拡大を簡便に行うことができます。

臨床写真ご提供：石井歯科医院 石井 宏 先生



※ISO規格の手用ユニバーサルファイルを装着することができます。
※手用ファイルのハンドルの大きさによって装着できない製品もありますので、ご注意ください。

根管治療を簡便に

破折線染色液

ヴィスタブルー




ヴィスタブルー 0.1mL をバイアル内に個別包装した1回使い切りタイプです。


ご使用例

破折線の確認に

アクセスキャビティーを形成中に遠心に破折線が発見された。この破折線の長さや深度がこの歯牙の予後に大きな影響を与える。そのことを確定的に診断するためには破折線を染色液にて確認・追求・削除を繰り返していくわけであるが、不可逆的な診査処置であり、診査の結果、最悪の場合は抜歯も避けられないことも起こりうるわけである。

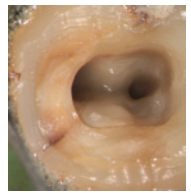

術前。

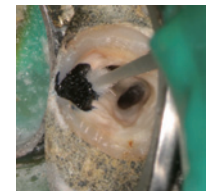


ヴィスタブルーの塗布。塗布後、診査部位を洗浄する。



染色と破折線の削除が何回か繰り返された後。


辺縁漏洩の確認に

遠心のコンポジットレジンと歯質との境界を明確にするとともに細菌漏洩などが疑われないか等の診査を行っている。

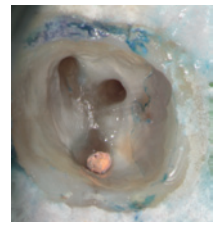

歯根破折の確認に

外科処置中に垂直性の歯根破折が発見され範囲の特定を行っている。

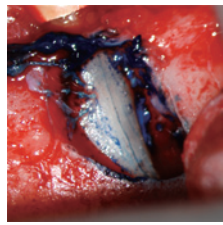

臨床写真ご提供：石井歯科医院 石井 宏 先生

イージースティック



イージースティック 4パック入
(1パック16本入×4パック 64本入)

歯科医院様参考価格 ¥1,200

特別価格

にてご提供いたします

ベントエンドユニバーサル エンドハンドル



ベントエンドユニバーサルエンドハンドル キット 5本入
ハンドルカラー: グレー、パープル、シルバー、イエロー、レッド

歯科医院様参考価格 ¥47,500

ベントエンドユニバーサルエンドハンドル 1本入

- ・グレー 1本入
- ・パープル 1本入
- ・シルバー 1本入
- ・イエロー 1本入
- ・レッド 1本入

歯科医院様参考価格 ¥9,800

特別価格

にてご提供いたします

ベニア/インレー スティックス



ベニア/インレースティックスイントロキット

- ・ベニアスティックス(ライトグレー) 1本
- ・インレー/アンレースティックス(ダークグレー) 1本
- ・ベニアチップ(ブルー) 6個
- ・インレー/アンレーチップ(ホワイト) 6個

歯科医院様参考価格 ¥9,800

ベニアスティックスキット

- ・ベニアスティックス(ライトグレー) 1本
- ・ベニアチップ(ブルー) 6個

歯科医院様参考価格 ¥5,400

インレー/アンレースティックスキット

- ・インレー/アンレースティックス(ダークグレー) 1本
- ・インレー/アンレーチップ(ホワイト) 6個

歯科医院様参考価格 ¥5,400

特別価格

にてご提供いたします

ヴィスタブルー



ヴィスタブルーキット

- ・ヴィスタブルー(10mL)×1本
- ・ミキシングウェル(2穴)×6個
- ・アプリケーター(シルバー レギュラー)×24本

歯科医院様参考価格 ¥7,500

ヴィスタブルーユニドーズ10本入

歯科医院様参考価格 ¥3,500

ヴィスタブルーユニドーズ30本入

歯科医院様参考価格 ¥9,000

特別価格

にてご提供いたします

本紙に掲載されている価格は2020年2月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL.0120-33-8020 FAX.0120-66-8020

株式会社 モリムラ

〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-28-10-3F

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は