


# 2020年9月より 前歯CAD/CAM冠 保険適用!

CAD/CAM冠の内面処理に! **装着料 45点**  
 チェアサイドで使用できるサンドブラスター **内面処理加算 45点**

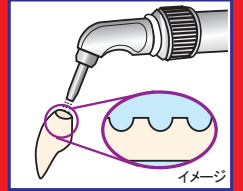

※算定の留意事項につきましては各通知をご確認いただきますようお願い申し上げます。

ユニットのハンドピースコネクタに簡単接続



## マイクロエッチャーCD キャンペーン

歯科医院様参考価格  
**¥85,000**

キャンペーン  
**特別価格**

2020年  
 9月23日(水)~  
 11月20日(金)

**360° 回転 スリムノズル**  
 最適なアングルが選べます。

**ペンシルタイプ ハンドピース**  
 持ちやすく軽量です。

**透明ジャー**  
 パウダー残量がわかります。  
 ※パウダーは付属されておりません。  
 必要に応じて別途お買い求めください。

**ハンドピースアダプター**  
 ユニットのハンドピース・クイックコネクタに簡単に接続できます。

ユニットのフットコントローラーでON/OFF可能です。

一般医療機器 医療機器届出番号:13B2X10359010040

マイクロエッチャーCDは2種類からご選択ください

### マイクロエッチャーCD Kタイプ

KAVOマルチフレックス  
 カップリング457(ライト無し)用



KAVOタイプ  
 待望の新発売



※写真ご提供: わしの歯科クリニック 鷲野 崇 先生


### マイクロエッチャーCD Sタイプ

シロナクイックカップリング用



※写真ご提供: 代官山アドレス歯科クリニック 大河 雅之 先生

本品は、ご購入前にデモ器の貸出をさせていただきますので、ご使用のカップリングとの装着可否をご確認のうえ、ご購入いただきますようお願い申し上げます。本品はカップリング形状により、装着できない場合もございますのでご了承ください。

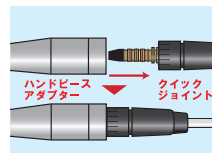

ハンドピースからジャーを取り外した後、ハンドピースアダプターをユニットのハンドピースコネクタのクイックジョイントに接続します。



ユニットのタービン切削回路の注水機構をオフにして、フットコントローラーを踏み、クイックジョイント又はホース内の水抜きをします。ジャーに研磨材を入れ、ハンドピースに取り付けます。ユニットのタービン切削回路の注水機構をオフにして、フットコントローラーを踏むとパウダーが噴射し、離すことにより停止します。

2020年9月より、前歯CAD/CAM冠保険適用！

チェアサイドで使用できるサンドブラスター


# マイクロエッチャー キャンペーン

キャンペーン期間延長！  
ぜひこの機会にご用命ください！

2020年  
7月21日(火)～  
11月20日(金)

## マイクロエッチャーII

- ノズルのみオートクレーブ滅菌可能
- ユニットのエアジョイント接続するタイプです。
- ※オスジョイントは付属されていません。

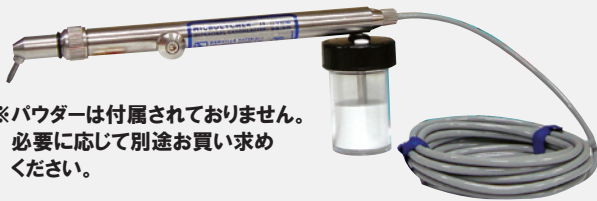

※パウダーは付属されていません。  
必要に応じて別途お買い求め  
ください。

歯科医院様参考価格

¥59,000

キャンペーン  
特別価格

一般医療機器 医療機器届出番号:13B2X10359010011

## マイクロエッチャーII ブローキット

- ノズルのみオートクレーブ滅菌可能
- 持ち運びできるマイクロエッチ・ブロー缶に  
接続するタイプです。



※パウダーは付属されていません。  
必要に応じて別途お買い求め  
ください。


歯科医院様参考価格

¥65,000

キャンペーン  
特別価格

## マイクロエッチャーIIA

- ノズル・ハンドピースはオートクレーブ滅菌可能
- ユニットのエアジョイント接続するタイプです。
- ※オスジョイントは付属されていません。

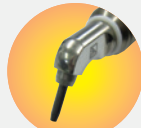

スリムノズル



※パウダーは付属されていません。  
必要に応じて別途お買い求め  
ください。

歯科医院様参考価格

¥69,000

キャンペーン  
特別価格

一般医療機器 医療機器届出番号:13B2X10359010025

## マイクロエッチャーIIA ブローキット

- ノズル・ハンドピースはオートクレーブ滅菌可能
- 持ち運びできるマイクロエッチ・ブロー缶に  
接続するタイプです。



※パウダーは付属されていません。  
必要に応じて別途お買い求め  
ください。

歯科医院様参考価格

¥75,000

キャンペーン  
特別価格

本紙に掲載されている価格は2020年9月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製造国:アメリカ合衆国

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL.0120-33-8020 FAX.0120-66-8020

MORIMURA

株式会社 モリムラ

〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-28-10-3F

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は