



歯科医院専用 入れ歯洗浄剤

スマイルデント ご愛顧キャンペーン!

大好評!
第27弾

乳酸菌オリゴ糖 プレゼント

限定 2,000 個 2020 年 8 月 21 日 (金) ~ 2020 年 9 月 18 日 (金)

スマイルデント 48錠 6個お買い上げで




スマイルデント 120錠 4個お買い上げで



+

+

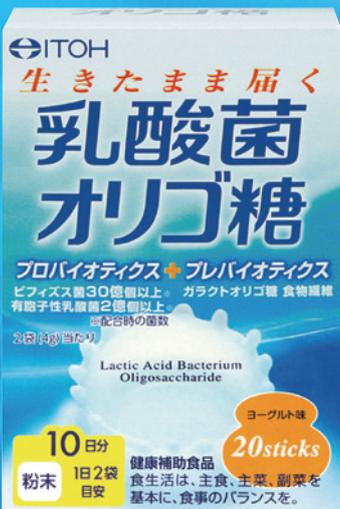

乳酸菌オリゴ糖 2g×20袋入 1箱 プレゼント!

乳酸菌やオリゴ糖が生活に「すこやか」を届けます

乳酸菌・ビフィズス菌と、そのエサとなるガラクトオリゴ糖や食物繊維を配合。健康や美容など幅広い面からサポートしてくれます。飲みやすくおいしい、ヨーグルト味の粉末タイプ。

体の中から爽やかにサポートするプロバイオティクス

●1日当たり有胞性乳酸菌 2億個以上※ ビフィズス菌 30億個以上※ ※配合時の菌数を表示しています。

乳酸菌やビフィズス菌のエサになるプレバイオティクス

●1日当たりガラクトオリゴ糖 180mg 難消化性デキストリン (食物繊維として) 360mg

■1日の摂取量目安: 2袋

■お召上がり方: 食品としてそのままお召し上がりください。

※商品はイメージです。

※キャンペーンは数量限定販売につき、期間中でも限定数量 (景品: 2,000 個) に達し次第、終了とさせていただきます。

MORIMURA

株式会社 モリムラ

〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-28-10-3F
TEL.03-5808-9350 FAX.03-5808-9351



特長

強力除菌

カンジダ菌
除菌率*
99.9%

※5分で99.9%除菌します。
※全ての菌に効果があるわけではありません。

- ① 強力除菌* 入れ歯に付着している菌をしっかり除菌します。
- ② ニオイ除去 漂白洗浄成分が入れ歯のニオイを除去します。
- ③ 酵素配合 酵素がしつこい汚れも除去します。
- ④ らくらく洗浄 水でもキレイに汚れを取り、漂白できます。
- ⑤ ミントの香り さわやかなミントの香りでスッキリ爽快。

ダブル除菌剤配合



銀イオン

アルミノケイ酸塩（銀イオン含有）から銀イオンが放出され、入れ歯に付着している菌を取り除きます。



塩化セチルピリジニウム

入れ歯に付着している菌を取り除きます。塩化セチルピリジニウム（CPC）は、歯磨剤、のど飴などにも使用されています。

部分入れ歯 兼用 総入れ歯
ノンクラスプ入れ歯


中性の液性のため、部分入れ歯や総入れ歯に使用されている金属およびプラスチックの変色を抑制し、入れ歯を洗浄することができます。




義歯素材為害性試験

入れ歯素材に対するスマイルデントの影響について試験を行いましたところ、一般的な入れ歯素材には問題なく使用できることが確認されました。

ノンクラスプ入れ歯

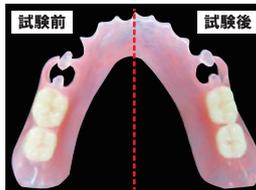

チタン床入れ歯

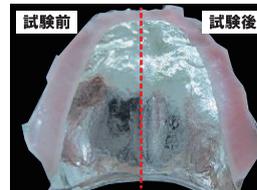

※一部の銀合金仕様の入れ歯では変色することがあります。その場合は使用を中止してください。

使用方法

- ① 約300mLの水またはお湯（40～50℃）にスマイルデントを1錠入れます。
- ② すぐに入れ歯を浸してください。通常の汚れの洗浄は、5分程度で終了します。
- ③ 洗浄後は水でよくすすいでください。

*特に汚れがひどい場合は一晩浸しておく効果的です。
*錠剤は1回1錠が目安です。また、溶液は毎回お取替えください。
*毎日の使用で、さらに効果が増します。

形態・仕様は予告なく変更することがあります。



製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは
お客様窓口フリーダイヤル

TEL. 0120-33-8020 FAX. 0120-66-8020

発売元 MORIMURA 株式会社 モリムラ
〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-28-10-3F
TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351
http://www.morimura-jpn.co.jp
製造元 井藤漢方製薬株式会社 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2-4-1

●製品に関するご用命は