


# RoTAC ロータリーファイル用グリップ

ROtary TACtile( 触覚、触って分かる感覚)

## エンジン用ファイルを手用ファイルへ (ロータリーファイル)

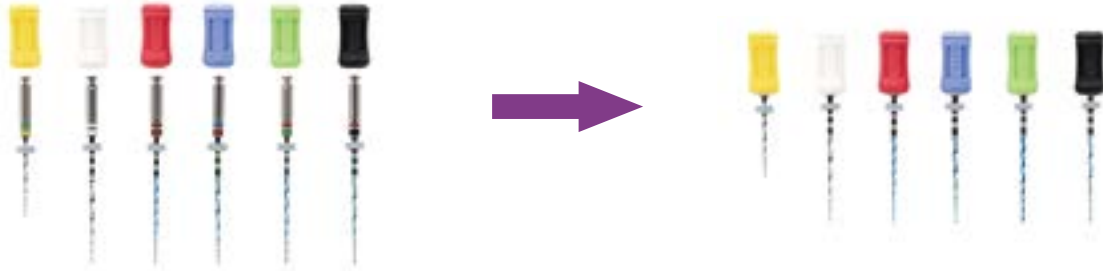

ISO規格のロータリーファイルを手用ファイルとして操作するためのグリップ。手の感覚でファイリングしたい時に！

- ロータリーファイルは付属されておられません。
- ご使用のロータリーファイルのサイズに合わせてグリップカラーをご選択いただき、ロータリーファイルを装着されますと、識別が容易にできます。




### RoTAC ロータリーファイル用グリップ 6個入

(ホワイト、イエロー、レッド、ブルー、グリーン、ブラック 各1個入)


歯科医院様参考価格 **¥2,800**

サイズ：全長12.5mm×Φ6mm  
材質：TPE

### 使用方法

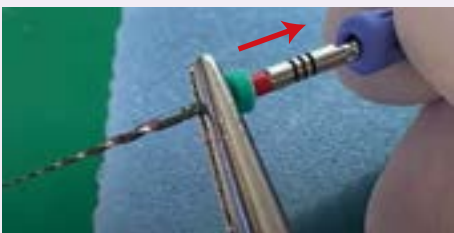

本品にロータリーファイルを取り付けます。  
※本品に装着できるロータリーファイルは、ISO規格のマンドレル(直径Φ2.35mm)のものです。

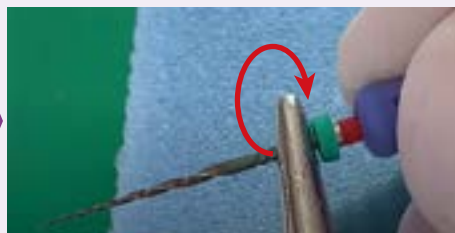

奥まで差し込まれたことを確認してください。  
※時計方向に回すとロックされ、ファイルが脱落する危険性はありません。



通法に従ってファイリングします。

- オートクレーブ滅菌対応(滅菌ポーチに入れ、オートクレーブ滅菌(121℃で30分、乾燥30分以上)を行ってください。)

詳しい操作方法は  
こちら



本紙に掲載されている価格は2021年3月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。 製造業者:Venta Endo(ベンタエンド社) 製造国:アメリカ合衆国

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは  
お客様窓口フリーダイヤル

TEL.0120-33-8020 FAX.0120-66-8020