

研磨ディスク TDV プラクシス アソートキット 新発売キャンペーン

キャンペーン期間：2021年6月21日（月）～8月20日（金）

アソートキット



研磨ディスク 60枚
+
マンドレル 1本

内容

- ・研磨ディスク
3/8インチ 各5枚
コース
ミディアム
ファイン
エクストラファイン
- 1/2インチ 各10枚
コース
ミディアム
ファイン
エクストラファイン
- ・マンドレル 1本

歯科医院様参考価格 **¥3,900**


1枚あたり
約 **¥44**

合計歯科医院様参考価格

¥4,300

研磨ディスク 8種類×1枚

増量

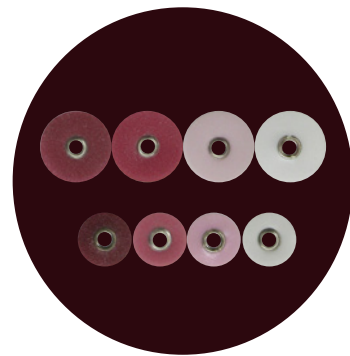

歯科医院様参考価格 **¥400** 相当

キャンペーン
特別価格

TDV プラクシス 研磨ディスク 30枚入

歯科医院様参考価格 各 **¥1,480**


種類

- ・3/8インチ コース
- ・3/8インチ ミディアム
- ・3/8インチ ファイン
- ・3/8インチ エクストラファイン
- ・1/2インチ コース
- ・1/2インチ ミディアム
- ・1/2インチ ファイン
- ・1/2インチ エクストラファイン

1枚あたり
約 **¥50**

TDV プラクシス マンドレル 1本入

歯科医院様参考価格 **¥1,300**

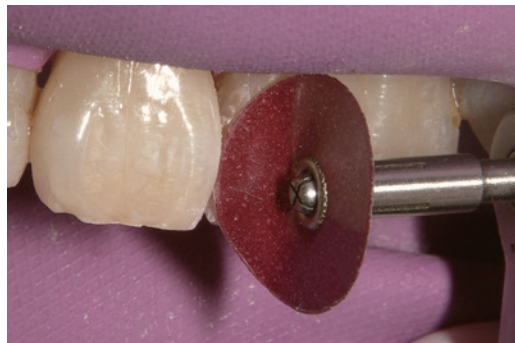

臨床写真ご提供：医療法人ジニア ばんだ歯科 須崎 明 先生

- コンポジットレジン研磨用ディスクとマンドレルです。
- ディスクの厚みが薄く、フレキシブルなため、コンポジットレジン充填後の隣接面や湾曲した隅角部なども研磨することができ、支台歯形成時の調整などにも適しています。
- 近心面または遠心面などに応じて、ディスクの研磨面（片面）を反転させて、マンドレルに簡単に装着することができ、隣在歯を傷つけずに形態修正および研磨をすることができます。
- 研磨効率が高く、チェアタイムを短縮させることができます。

3/8インチ (9.5mm)				1/2インチ (12.7mm)				マンドレル
コース (粗) ブラウン	ミディアム (中粗) ローズ	ファイン (細) ピンク	エクストラファイン (極細) ホワイト	コース (粗) ブラウン	ミディアム (中粗) ローズ	ファイン (細) ピンク	エクストラファイン (極細) ホワイト	全長：25mm

TDV プラクシス ご使用方法

※粗さは濃い色（目が粗い）から薄い色（目が細かい）に色分けされています。

※研磨ディスクをマンドレルに取り付け、研磨ディスクが乾いた状態で、フェザータッチで使用します。

①始めにコース（粗）を使い、10,000rpm以下で粗研磨します。

②次にミディアム（中粗）を使い、10,000rpm以下で研磨します。

③次にファイン（細）を使い、30,000rpm以下で研磨します。

④最後にエクストラファイン（極細）を使い、30,000rpm以下で仕上げ研磨を行います。

※研磨ディスクは、単回使用です。

※マンドレルは、オートクレーブ滅菌（126℃、16分）対応です。

TDV プラクシス ご使用例



術前。



窩洞形成後。



エッチング、水洗・乾燥します。
（白濁確認）



接着処理します。




フロアブルレジンを充填します。



バイオクリアー マトリックス前歯用
(A101) を装着し、ダイヤモンドウェッジ
(エクストララージ ブルー) を装着し、
フロアブルレジンを充填します。



フロアブルレジン充填後、
マトリックスとウェッジを取り外します。

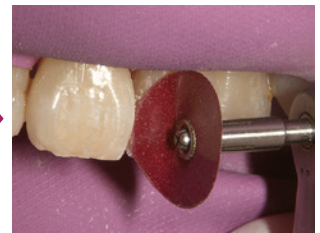

プラクシス ミディアムで形態修正しま
す。



ディスクがしなりやすいので、湾曲した
形態を再現することができます。



隣在歯を傷つけずに、上部鼓形空隙を
再現することができます。



プラクシス ファインで研磨します。



ディスクのしなりを使って、唇側平滑面
を研磨します。



プラクシス エクストラファインで研磨
します。



切縁隅角も研磨できます。



効率的かつ確実に形態修正、研磨を
行うことができます。



研磨後。

臨床写真ご提供：医療法人ジニア ばんだ歯科 須崎 明 先生

製造業者：TDV DENTAL LTDA (ティディーアイデンタルエルティディーイー社) 製造国：ブラジル

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL. 0120-33-8020 FAX. 0120-66-8020

MORIMURA

株式会社 モリムラ

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は