

歯科医院専用 入れ歯洗浄剤

スマイルデント **プラス**

ご愛顧キャンペーン!

第2弾

ビタミンC1200プレゼント

限定 2,000 個 2022 年 8 月 22 日 (月) ~ 2022 年 10 月 20 日 (木)

スマイルデントプラス
120錠 4個 お買い上げで



スマイルデントプラス
48錠 6個 お買い上げで



+

+



ビタミンC1200
2g×24袋入 1箱
プレゼント!

普段の生活の中で消費されやすいビタミンCは、体内でつくることができないため、積極的に補う必要があります。コラーゲンの生成にも深く関わっており、健康だけではなく美容にも良い成分として親しまれています。本品は、1袋(2g)にレモン果実 約60個分*のビタミンC、さらにビタミンB2を配合し、水なしでそのまま食べられる手軽な顆粒スティックです。健康補助食品として、1日1袋を目安に、そのままお召上がりください。1袋(2g)中: ビタミンC 1200mg / ビタミンB2 0.6mg レモン味

※レモン果実1個 120g

※商品はイメージです。

※キャンペーンは数量限定販売につき、期間中でも限定数量(景品: 2,000 個)に達し次第、終了とさせていただきます。

歯科医院専用 入れ歯洗浄剤

カンジダ菌
除菌率※
99.99%



スマイルデントプラス

※40°C・5分で99.99%除菌します。
※全ての菌に効果があるわけではありません。

2021年2月 スマイルデントはスマイルデントプラスにリニューアルしました。

リニューアル

1 トリプル除菌剤配合

Ag⁺

アルミノケイ酸塩(銀イオン含有)から銀イオンが放出されます。

CPC

塩化セチルピリジニウム(CPC)は、歯磨剤、のど飴などにも使用されています。

IPMP

イソプロピルメチルフェノール(IPMP)は、環境にやさしい成分で歯磨剤などにも使用されています。

リニューアル

2 さらに金属の変色を防ぐ処方

防サビ剤(金属の変色を防ぐ成分)を新配合

- 部分入れ歯の割合も増えており、金属床入れ歯は保険適用となっています。
- 金属への影響(変色等)を防ぐために、配合成分を調整し、洗浄力を維持しました。

※ごく一部の金属でまれに変色することがあります。

リニューアル

3 約150~200mLに対し錠剤1錠

- 部分入れ歯の割合も増え、300mLも必要としない状況があります。
- 市販の入れ歯洗浄ケースの容量も、200mLのものが多いです。

特長

- 1 強力除菌** ※ 入れ歯に付着している菌をしっかりと除菌します。
- 2 ニオイ除去** 漂白洗浄成分が入れ歯のニオイを消します。
- 3 酵素配合** 酵素がしつこい汚れも取り除きます。
- 4 発泡洗浄** 発泡洗浄し、漂白できます。
- 5 防サビ剤入** 入れ歯の金属部分の変色・変質を防ぎます。
- 6 ミントの香り** さわやかなミントの香りでスッキリ爽快。

※全ての菌に効果があるわけではありません。

部分入れ歯 兼用 総入れ歯
ノンクラスプ入れ歯

部分入れ歯



総入れ歯



ノンクラスプ入れ歯



成分 発泡剤(炭酸塩、クエン酸)、漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、アニオン系界面活性剤、アルミノケイ酸塩(銀イオン含有)、塩化セチルピリジニウム(CPC)、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、漂白活性化剤(TAED)、ポリリン酸塩、酵素、防錆剤、結合剤、流動改善剤、色素、香料

液性 中性

形態・仕様は予告なく変更することがあります。

使用方法

1 約150~200mLの水またはお湯(40~50°C)に錠剤を1錠入れます。

※60°C以上のお湯で使用しないでください。
入れ歯が変色、変形することがあります。
※水温が低いと発泡力が弱くなりますので、40~50°Cのお湯を使うことをおすすめします。



2 すぐに入れ歯を浸してください。

※通常の汚れの洗浄は、5分程度で終了します。
※特に汚れがひどい場合は一晩浸しておくとう�효的です。



3 洗浄後は水でよくすすいでください。

※ごくまれに汚れが落ちない場合がありますが、無理な洗浄やブラッシングはせずに、歯科医にご相談されることをおすすめします。



■48錠



■120錠

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは
お客様窓口フリーダイヤル

TEL. 0120-33-8020 FAX. 0120-66-8020



株式会社 MORIMURA

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351
http://www.morimura-jpn.co.jp

● 製品に関するご用命は