

歯科医院専用 入れ歯洗浄剤

スマイルデント **プラス**

ご愛顧キャンペーン!

第3弾

# 薬用発泡入浴剤 プレゼント

限定 3,000 個 2022 年 12 月 21 日 (水) ~ 2023 年 2 月 20 日 (月)

スマイルデントプラス  
120錠 4個 お買い上げで



スマイルデントプラス  
48錠 6個 お買い上げで



## 薬用発泡入浴剤プレゼント!

アソート20錠入 (4種類・各5錠)



- アソート種類
- さくら (桃白色)
- ゆず (乳黄色)
- ラベンダー (淡藤色)
- 森林 (浅若草色)

※商品はイメージです。

※キャンペーンは数量限定販売につき、期間中でも限定数量 (景品: 3,000 個) に達し次第、終了とさせていただきます。

歯科医院専用 入れ歯洗浄剤

カンジダ菌  
除菌率\*  
99.99%



スマイルデントプラス

※40℃・5分で99.99%除菌します。  
※全ての菌に効果があるわけではありません。

トリプル除菌剤  
配合

- Ag+** アルミノケイ酸塩(銀イオン含有)から銀イオンが放出されます。
- CPC** 塩化セチルピリジニウム(CPC)は、歯磨剤、のど飴などにも使用されています。
- IPMP** イソプロピルメチルフェノール(IPMP)は、環境にやさしい成分で歯磨剤などにも使用されています。

さらに金属の  
変色を防ぐ処方

防サビ剤(金属の変色を防ぐ成分)を新配合

- 部分入れ歯の割合も増えており、金属床入れ歯は保険適用となっています。
- 金属への影響(変色等)を防ぐために、配合成分を調整し、洗浄力を維持しました。

※ごく一部の金属でまれに変色することがあります。

約150~200mLに  
対し錠剤 1錠

- 部分入れ歯の割合も増えて、300mLも必要としない状況があります。
- 市販の入れ歯洗浄ケースの容量も、200mLのものが多いです。

特長

- 1 強力除菌\*** 入れ歯に付着している菌をしっかり除菌します。
- 2 ニオイ除去** 漂白洗浄成分が入れ歯のニオイを消します。
- 3 酵素配合** 酵素がしつこい汚れも取り除きます。
- 4 発泡洗浄** 発泡洗浄し、漂白できます。
- 5 防サビ剤入** 入れ歯の金属部分の変色・変質を防ぎます。
- 6 ミントの香り** さわやかなミントの香りでスッキリ爽快。

※全ての菌に効果があるわけではありません。

部分入れ歯 兼用 総入れ歯  
ノンクラスプ入れ歯

部分入れ歯



総入れ歯



ノンクラスプ入れ歯



成分 発泡剤(炭酸塩、クエン酸)、漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、アニオン系界面活性剤、アルミノケイ酸塩(銀イオン含有)、塩化セチルピリジニウム(CPC)、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、漂白活性化剤(TAED)、ポリリン酸塩、酵素、防錆剤、結合剤、流動改善剤、色素、香料

液性 中性

本紙に掲載されている価格は2022年11月のものです。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

使用方法

① 約150~200mLの水またはお湯(40~50℃)に錠剤を1錠入れます。

※60℃以上のお湯で使用しないでください。  
入れ歯が変色、変形することがあります。  
※水温が低いと発泡力が弱くなりますので、40~50℃のお湯を使うことをおすすめします。



② すぐに入れ歯を浸してください。

※通常の汚れの洗浄は、5分程度で終了します。  
※特に汚れがひどい場合は一晩浸しておく効果的です。



③ 洗浄後は水でよくすすいでください。

※ごくまれに汚れが落ちない場合がありますが、無理な洗浄やブラッシングはせずに、歯科医にご相談されることをおすすめします。



製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL. 0120-33-8020 FAX. 0120-66-8020



株式会社 MORIMURA

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10  
TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351  
http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は