

インプラント清掃用 NiTi ブラシ

増量

キャンペーン

限定
200
セット

2026年 1月21日(水) ~ 3月20日(金)

アソート 4本入



歯科医院様参考価格 **¥9,900**

ポケット 1本入



歯科医院様参考価格 **¥2,800**

合計歯科医院様参考価格

¥12,700

キャンペーン
特別価格



※期間中でも限定数量に達し次第、終了とさせていただきます。

表面を研磨し、粗面を滑沢面に仕上げます

- ニッケルチタン製の NiTi ブラシはインプラント体の表面のスレッド形状を維持したまま研磨することが可能です。
- ニッケルチタンは適度な弾力性があり、複雑な構造のスレッド形状にもフィットし、NiTi ブラシのみで滑沢面に仕上げることができます。




イメージ

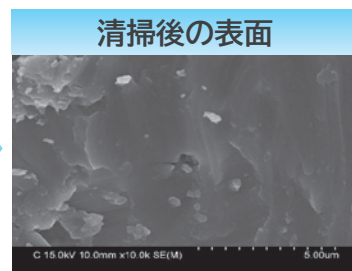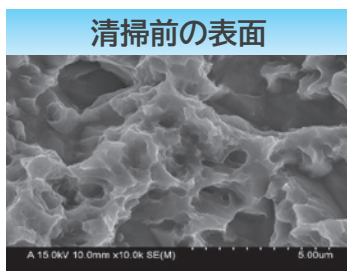

(SEMによる10,000倍の拡大画像)



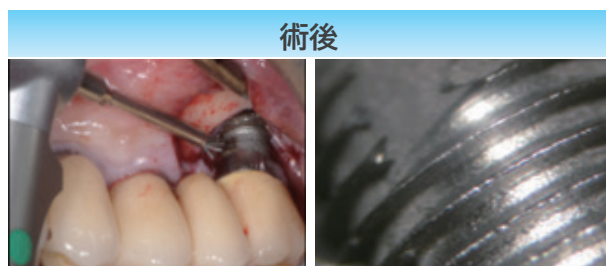

効果的なデブライドメントでインプラント周囲炎の再発を予防

- ニッケルチタン製の NiTi ブラシは、インプラント体の表面に付着した汚染物質の除去と研磨に加え、軟組織のデブライドメントを同時に行うことができます。



歯科予防治療用ブラシ インプラント清掃用 NiTi ブラシ

インプラント清掃用 NiTi ブラシ アソート 4 本入 歯科医院様参考価格 **¥9,900**


ナノ	ポケットショート	ポケット	オメガ
			
スレッドが1～2 個露出した狭小部位や溝の細部清掃に (全長：約 34 mm)	浅いポケットやスペースが限られる部位の清掃に (全長：約 34 mm)	スレッドが 2 個以上露出したポケットや広範囲の清掃に (全長：約 37 mm)	ポケットがより広範囲に露出した症例の清掃に (全長：約 36 mm)
・1 本入 歯科医院様参考価格 ¥2,800	・1 本入 歯科医院様参考価格 ¥2,800	・1 本入 歯科医院様参考価格 ¥2,800	・1 本入 歯科医院様参考価格 ¥2,800

歯科用研削材料 一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ 医療機器届出番号 13B1X10394290001

インプラント周囲炎に対する NiTi ブラシの使用例


1. インプラント周囲炎の確認と診断

歯周ポケットの深さの測定と、X 線で骨の状態を確認します。

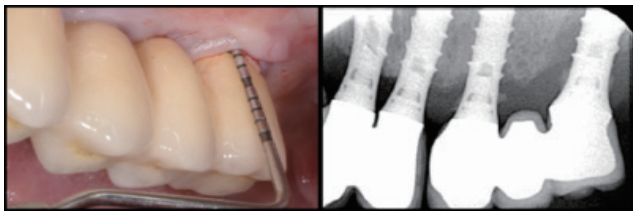


2. 症例にあった NiTi ブラシの選択

NiTi ブラシには、用途や清掃部位に応じて複数の形状が用意されています。適宜選択してください。

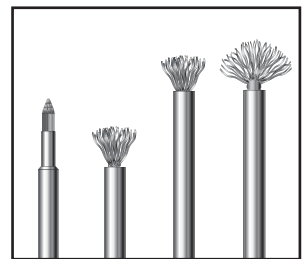

3. 使用前に NiTi ブラシを滅菌

滅菌ポーチを使用し、オートクレーブで滅菌しておきます。
(134℃で 15 分
乾燥 20 分)

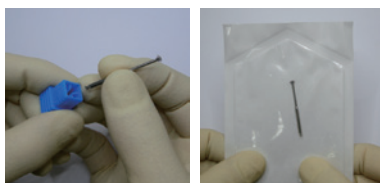

4. NiTi ブラシで表面を研磨

インプラントモーターか減速コントラを使用し、注水下で粗い表面を滑沢面に仕上げます。
(推奨回転数：600 ～ 1,200rpm)



5. 必要に応じて GBR 法を行う



GBR 法を適用



歯周ポケットの再測定



X 線で骨の状態を確認

本紙に掲載されている価格は2025年12月のもの（税抜）です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

MORIMURA

株式会社 モリムラ

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は