

光重合型小窩裂溝填塞材

SDI

CONSEAL F

コンシール f



MI 小窩裂溝填塞

フッ素徐放性

フィラー配合率
7%

光重合型小窩裂溝填塞材

コンシール f

- コンシール f は、小窩裂溝に、より速く、より深く浸透する低粘性*の光重合型レジン系小窩裂溝填塞材のため、細菌が侵入する空隙を排除することができます。
- コンシール f の、極細でプリベンドされたシリンジチップ27Gは、狭く深い複雑な小窩裂溝にも、微量の填塞を可能にし、封鎖力と保持力を高めます。
- 耐水溶性のため、口腔内環境における分解を最小限に抑制します。

※粘性0.25Pa's (25°C) *Chryss A (1998), Royal Melbourne Institute of Technology University Rheology and Materials Processing Centre.

フィラー配合率
7%

0.04 μ mの
サブミクロンフィラーを配合。
耐摩耗性を向上させています。

オペークホワイトシェード



M I*小窩裂溝填塞
チップ外径

27G (0.41mm)

極細のチップのため、
最小限の小窩裂溝填塞を行うことができます。

※Minimum Intervention

BPA &
HEMA FREE

フッ素徐放性

SDI社独自のコンシール f フィラー成分は、粒子と高い表面積対体積比により、容易にフッ素徐放を実現しました。

累積フッ素徐放量


コンシール f

0 400 800 1200


ng/cm² (@180日)

*SDI Limited社データおよび公開資料による


ご使用方法

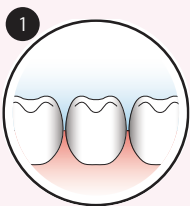


1 歯面清掃後、
ラバーダム防湿を
します。

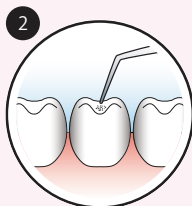


2 小窩裂溝を
通法に従って
エッチングします。

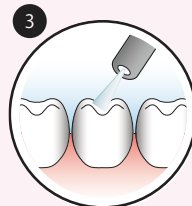


3 十分に水洗します。

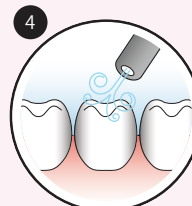

4 エアーで十分に
乾燥させます。

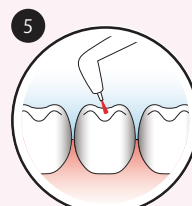

5 コンシール f を
填塞します。

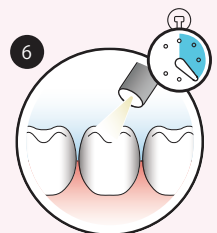

6 20秒間光照射
(1500mW/cm²)
します。

臨床例

術前



エッチング



コンシール f 填塞



術後



Photos courtesy of Dr Mitsuru Sonoda, D.D.S Hokkaido, Japan

包装・関連製品

光重合型小窩裂溝充填材

コンシール f シリンジレフィル 1g

SDI



内容：コンシール f シリンジレフィル 1g 1本
シリンジチップ27G 5本

歯科医院参考価格 **¥2,500**

管理医療機器 医療機器認証番号：221AGBZX00244000

別売

シリンジチップ27G 20本入



歯科医院参考価格 **¥2,200**

一般医療機器 医療機器届出番号：13B1X10394060013

37%リン酸 高粘度エッチング材

スーパーエッチジェル シリンジレフィル 2mL

SDI



2.5g/2mL

内容：スーパーエッチジェル シリンジレフィル 2mL 1本
シリンジチップ23G 5本

歯科医院参考価格 **¥3,200**

管理医療機器 医療機器認証番号：21100BZY00372000

別売

シリンジチップ23G 25本入



歯科医院参考価格 **¥3,500**

一般医療機器 医療機器届出番号：13B1X10394060012

35%リン酸 高粘度エッチング材

セレクトHVエッチ 5g

BISCO

- 選択的エナメル質エッチングに適した高粘度35%リン酸エッチング材です。
- 青色ジェルのため、識別が容易です。
- シーラント前のエッチングに使用する際は、小窩裂溝に15秒間塗布し、水洗・乾燥させてください。

5g/4.2mL



内容：セレクトHVエッチ（シリンジ5g） 1本
シリンジチップ（ライトブルー 22G） 15本

歯科医院参考価格 **¥3,800**

管理医療機器 医療機器認証番号：225AGBZX00067000

別売

シリンジチップ （ライトブルー 22G） 50本入



歯科医院参考価格 **¥4,700**

一般医療機器 医療機器届出番号：13B1X10394040001

32%リン酸 中粘度エッチング材

ユニエッチ 5g

BISCO

- トータルエッチングに適した中粘度の32%リン酸エッチング材です。
- 青色ジェルのため、識別が容易です。
- シーラント前のエッチングに使用する際は、小窩裂溝に15秒間塗布し、水洗・乾燥させてください。

5g/4.27mL



内容：ユニエッチ（シリンジ5g） 1本
シリンジチップ（ライトブルー 25G） 15本

歯科医院参考価格 **¥3,800**

管理医療機器 医療機器認証番号：231AGBZX00015000

別売

シリンジチップ （ライトブルー 25G） 15本入




歯科医院参考価格 **¥1,100**

一般医療機器 医療機器届出番号：13B1X10394040001


※
歯科用アプリケーションター

SDI | POINTS
ポインツ

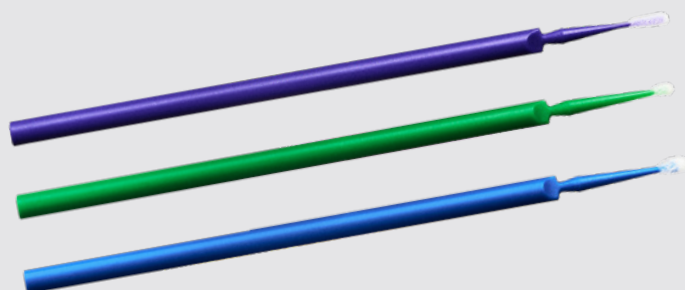


全長90mm（ほぼ実寸）

スーパーファイン
パープル

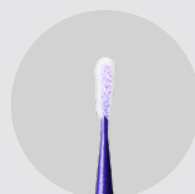


先端径：0.6mm

ファイン
ダークグリーン

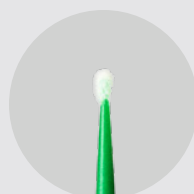

先端径：0.8mm

ミディアム
ダークブルー

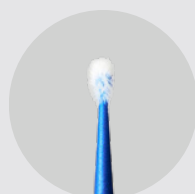

先端径：1.2mm

ポインツは、少量の材料を届きにくい部位に素早く塗布することができるディスポーサブルアプリケーションターです。

耐溶剤性ファイバー

歯科材料に使用される溶剤に耐性があるファイバーです。

非吸収性ファイバー

先端に非吸収性ファイバーを使用していますので、ファイバー内に溶液を塗布するまで保持することができ、塗布中に糸くずが残るのを防ぎます。

3種類

スーパーファイン、ファイン、ミディアムの3種類があり、ハンドルカラーは、複数の材料やステップの判別に適しています。

ソフトで柔軟なハンドル

適用部位に合わせて先端部の角度を調節することができます。

歯科用アプリケーションター

ポインツ スーパーファイン 100本入

ポインツ ファイン 100本入

ポインツ ミディアム 100本入

1本あたり¥18

歯科医院参考価格 **¥1,800**

ポインツ スーパーファイン 400本入

ポインツ ファイン 400本入

ポインツ ミディアム 400本入

1本あたり¥17

歯科医院参考価格 **¥6,800**

一般医療機器 医療機器届出番号：13B1X10394060008

本誌に掲載されている価格は2025年12月のもの（税抜）です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。



株式会社 **モリムラ**

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

<http://www.morimura-jpn.co.jp>

●製品に関するご用命は