

II級窩洞修復用マトリックスシステム

ZT マトリックスシステム キット



キット内容

ZT マトリックス メタル 4.5mm 20枚
 ZT マトリックス メタル 5.5mm 20枚
 ZT マトリックス メタル 6.5mm 20枚
 ZT ウェッジ メタルガード Sグリーン 5個
 ZT ウェッジ メタルガード Mオレンジ 5個
 ZT ウェッジ メタルガード Lパープル 5個

ZT セパレーター 1個
 ZT リング 大臼歯用 1個
 ZT リング 小臼歯用 1個

ZT ダイヤウェッジ ES イエロー 16個
 ZT ダイヤウェッジ S ブルー 16個
 ZT ダイヤウェッジ M オレンジ 16個
 ZT ダイヤウェッジ L グリーン 16個
 ZT ダイヤウェッジ ディープ パープル 16個

一般医療機器 歯科用マトリックスバンド 医療機器届出番号 13B1X10394260009


歯科医院様参考価格

¥22,000

II級窩洞修復用マトリックスシステム

ZT マトリックスシステム キット

II級窩洞修復用マトリックス、リング、ウェッジ、メタルガード、セパレーターのキットです。

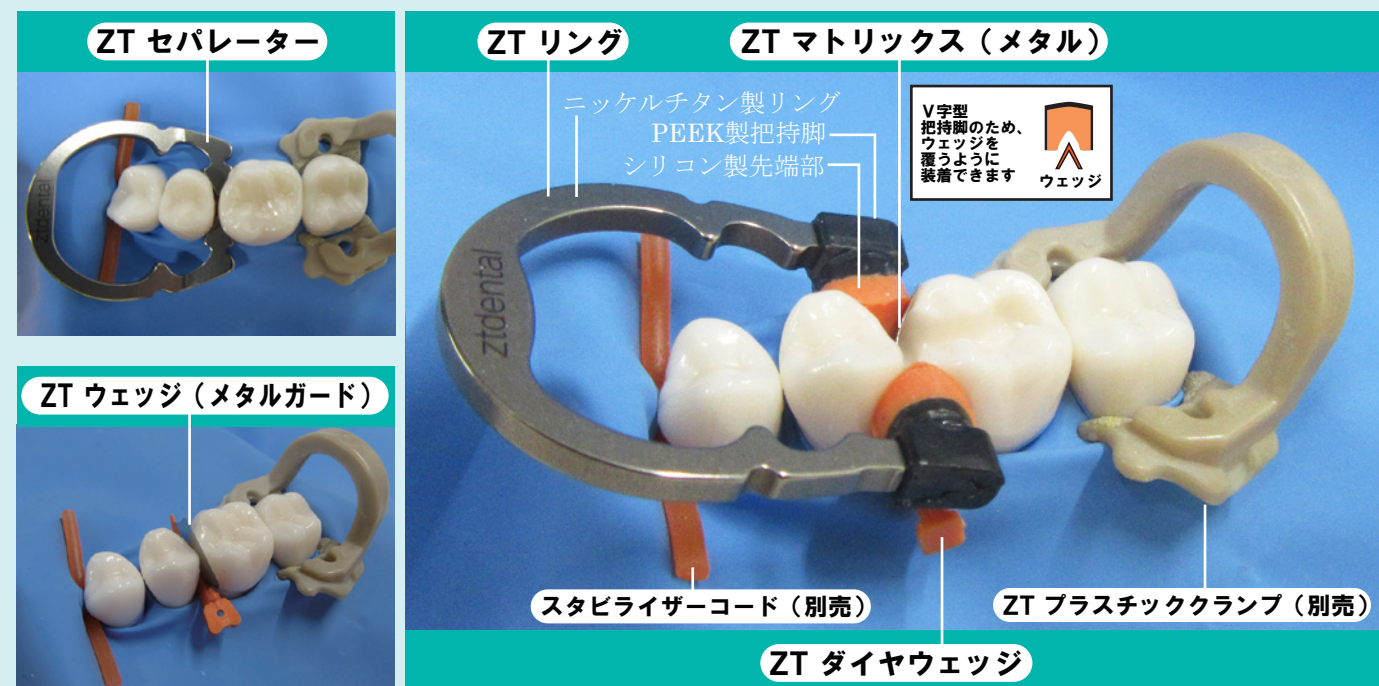


ZT マトリックスシステム 使用方法



隣接歯が近接している場合など、必要に応じて、ZT セパレーターを歯間部に装着し、歯間離開します。歯間離開後、ZT セパレーターを取り外します。




窩洞形成前に、必要に応じて、ZT ウェッジ (メタルガード) を歯間部に装着し、隣接歯を保護し、窩洞形成を行います。窩洞形成後、ZT ウェッジ (メタルガード) を取り外します。

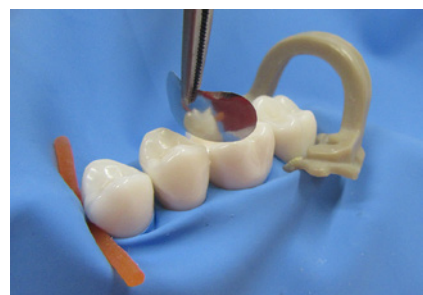


ZT マトリックス (メタル) を選択し、歯間部に装着します。



ZT ダイヤウェッジを歯間部に挿入し、マトリックスを固定させます。

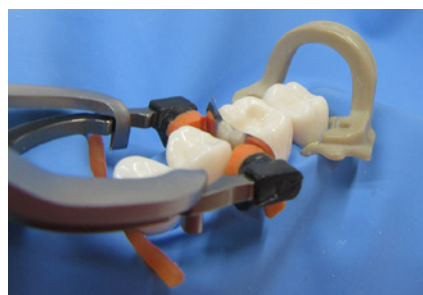

ZT リングを汎用プライヤー又はフォースセップスで広げ、リング把持脚のV字型の先端部がZT ダイヤウェッジを覆うように装着します。

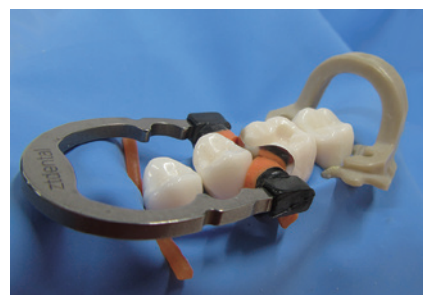


装着後。




一般医療機器 歯科用マトリックスバンド (歯科用マトリックスリテーナ)
医療機器届出番号 13B1X10394260009



一般医療機器 歯科用マトリックスバンド (歯間分離器)
医療機器届出番号 13B1X10394260009

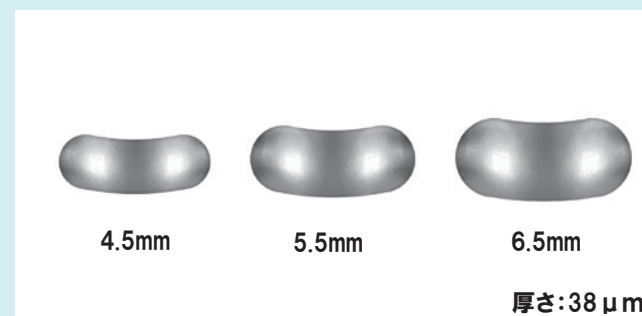

一般医療機器 歯科用マトリックスバンド 医療機器届出番号 13B1X10394260007

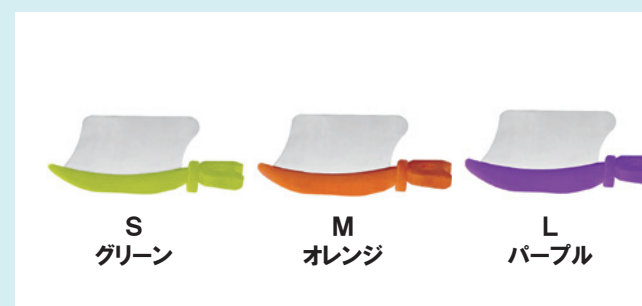

一般医療機器 歯科用マトリックスウェッジ 医療機器届出番号 13B1X10394260004



一般医療機器 歯科用マトリックスウェッジ 医療機器届出番号 13B1X10394260004

マトリックス固定用リング

ZT リング

- マトリックスをしっかりと固定するニッケルチタン製リングです。
- 弾力性、復元力、耐久性があります。
- 把持脚はPEEK製のため強度があり、V字型でシリコン製の先端部は、ウェッジを覆うように装着することができ、マトリックスにフィットします。
- オートクレーブ滅菌可能 (134℃で3～5分)。

ZT リング 小臼歯用 1個入
ZT リング 大臼歯用 1個入

歯科医院様参考価格
¥6,800

歯間分離器

ZT セパレーター

- 歯間を即時に分離することができるセパレーターです。
- 特に歯冠高径が低く、狭い歯間部に適しています。
- オートクレーブ滅菌可能 (134℃で3～5分)。

ZT セパレーター 1個入

歯科医院様参考価格
¥4,600

マトリックスバンド

ZT マトリックス メタル

- 歯の解剖学的形態に合わせた湾曲設計です。
- 硬弾性ステンレス鋼製のため、マトリックスを狭い歯間部に通過させやすく、変形しにくいです。
- 単回使用。

ZT マトリックス メタル 4.5mm 50枚入
ZT マトリックス メタル 5.5mm 50枚入
ZT マトリックス メタル 6.5mm 50枚入

歯科医院様参考価格
¥2,200

ウェッジ

ZT ウェッジ メタルガード

- クラウン、補綴物、インレーなどの形成前に配置するウェッジ付メタルガードです。
- 挿入しやすいウェッジのため歯間離開させ、隣接歯および歯肉を保護します。
- 単回使用。

ZT ウェッジ メタルガード Sグリーン 24個入
ZT ウェッジ メタルガード Mオレンジ 24個入
ZT ウェッジ メタルガード Lパープル 24個入

歯科医院様参考価格
¥950

ウェッジ

ZT ダイヤウェッジ

- 歯間部に容易に挿入でき、隣接面に適合する歯科用ウェッジです。
- ダイヤ型の穴により、挿入時は効果的に閉じ、挿入後はウェッジが開放します。
- 単回使用。

ZT ダイヤウェッジ アソートキット 80個入

歯科医院様参考価格
¥1,800

ZT ダイヤウェッジ ES イエロー 40個入
ZT ダイヤウェッジ S ブルー 40個入
ZT ダイヤウェッジ M オレンジ 40個入
ZT ダイヤウェッジ L グリーン 40個入
ZT ダイヤウェッジ ディープパープル 40個入

歯科医院様参考価格
¥950



一般医療機器 歯科用研磨器材 医療機器届出番号 13B1X10394260005

セラミック研磨用バー

ZT ポリッシャー セラツイスト

- ポーセレン、ニケイ酸リチウム、ジルコニアなどのセラミックス修復物用の3ステップ研磨システムです。
- ダイヤモンド粒子を配合したポリッシャーのため、効率良く、荒研磨から仕上研磨までを行うことができます。
- 推奨回転数：7,000～12,000rpm（最大20,000rpm）
- オートクレーブ滅菌可能（134℃で5分）。

ZT ポリッシャー セラツイスト 6本入

（コース2本+ミディアム2本+ファイン2本）

歯科医院様参考価格

¥2,800



一般医療機器 歯科用研磨器材 医療機器届出番号 13B1X10394260005

コンポジットレジン研磨用バー

ZT コンポジットポリッシャー

- コンポジットレジン修復物に高い光沢を付与する2ステップ研磨システムです。
- 全ての部位に適用できる柔軟なブレード設計です。
- 耐摩耗性に優れ、良好な研磨効果を発揮します。
- 推奨回転数：8,000～12,000rpm
- オートクレーブ滅菌可能（134℃で5分）。

ZT ポリッシャー コンポジットポリッシャー アソート 8本入

内容：ミディアム（ポイント、ミニポイント、カップ、コーン）
ファイン（ポイント、ミニポイント、カップ、コーン） 各1本

ZT ポリッシャー コンポジットポリッシャー

ミディアム・ポイント 8本入

ZT ポリッシャー コンポジットポリッシャー

ファイン・ポイント 8本入

歯科医院様参考価格

¥1,900

関連製品

コンポジットレジン研磨用バー ZT ポリッシャー ツイスト



一般医療機器 歯科用研磨器材 医療機器届出番号 13B1X10394260005

- コンポジットレジン修復物に高い光沢を付与する2ステップ研磨システムです。
- 推奨回転数：3,000～8,000rpm
- オートクレーブ滅菌可能（134℃で5分）。

ZT ポリッシャー ツイスト 6本入
（ミディアム3本+ファイン3本）

歯科医院様参考価格
¥2,800

コンポジットレジン研磨用ディスク ZT ポリッシャー ディスク



一般医療機器 歯科用研磨器材 医療機器届出番号 13B1X10394260005

- コンポジットレジン研磨用ディスクとマンドレルです。
- 推奨回転数：7,000～10,000rpm
- ディスクは単回使用。

ZT ポリッシャー ディスク 9.5mm キット

内容：ディスク9.5mm（コース、ミディアム、ファイン、スーパーファイン）各10枚、マンドレル 1本

ZT ポリッシャー ディスク 12.7mm キット

内容：ディスク12.7mm（コース、ミディアム、ファイン、スーパーファイン）各10枚、マンドレル 1本

歯科医院様参考価格
¥1,700

本紙に掲載されている価格は2026年2月のもの（税抜）です。
形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製造業者：Tangshan Zhengtong Exhibition Co., Ltd.（略称：ZTデンタル社）
製造国：中華人民共和国



株式会社 モリムラ

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は