

歯科医院専用 入れ歯洗浄剤

スマイルデント **+**

愛顧キャンペーン!

第9弾

スマイルデントプラス泡クリーナー 詰替用・プレゼント

限定 2,500 本 2026 年 4 月 21 日 (火) ~ 2026 年 6 月 18 日 (木)

スマイルデントプラス
120錠 4個 お買い上げで



スマイルデントプラス
泡クリーナー
詰替用 1本
プレゼント



詰替用

詰替用に
ポンプ&キャップ
(非売品)を
サービス!!



装着イメージ
詰替用に
ポンプ&キャップを
装着すれば
ポンプ付と
同じように
ご使用できます!



スマイルデントプラス
48錠 6個 お買い上げで



さわやかな
ミントの香り

入れ歯のニオイが気になる場合

ご使用例

朝・昼はお手軽な泡タイプで洗浄し、夜は錠剤タイプでしっかりと浸けおき洗浄!

スマイルデントプラス

スマイルデントプラス 入れ歯洗浄剤



トリプル除菌剤配合の入れ歯洗浄剤です。
部分入れ歯・総入れ歯、ノンクラスプ入れ歯兼用です。

120錠



■120錠 歯科医院様参考税抜価格 ¥1,150 患者様参考税抜価格 ¥1,440
■48錠 歯科医院様参考税抜価格 ¥680 患者様参考税抜価格 ¥850

部分入れ歯

総入れ歯

ノンクラスプ入れ歯

48錠



■トリプル除菌剤配合

- Ag⁺ アルミノケイ酸塩(銀イオン含有)から銀イオンが放出されます。
- CPC 塩化セチルピリジニウム(CPC)は、歯磨剤、のど飴などにも使用されています。
- IPMP イソプロピルメチルフェノール(IPMP)は、環境にやさしい成分で、歯磨剤などにも使用されています。

■防サビ剤(金属の変色を防ぐ成分)配合

金属への変色等を防ぐために、配合成分を調整し、洗浄力を維持しました。
※ごく一部の金属でまれに変色することがあります。

■ご使用方法

- ①約150~200mLの水またはお湯(40~50℃)に錠剤を1錠入れます。
- ②すぐに入れ歯を浸してください。
※通常の汚れの洗浄は、5分程度で終了します。
- ③洗浄後は水でよくすすいでください。

スマイルデントプラス 泡クリーナー

きめが細かく、立体感のある泡タイプの洗浄剤です。
部分入れ歯、総入れ歯、マウスピース、矯正用リテーナー兼用です。

ポンプ付



詰替用

部分入れ歯

総入れ歯

マウスピース

リテーナー

さわやかな
ミントの香り

150mL

約180プッシュ分

■W除菌剤配合

- CPC 塩化セチルピリジニウム(CPC)は、歯磨剤、のど飴などにも使用されています。
- IPMP イソプロピルメチルフェノール(IPMP)は、環境にやさしい成分で、歯磨剤などにも使用されています。

■研磨剤&着色料無配合

入れ歯、マウスピース等にキズをつけず、
マウスピース等に色移りの恐れがありません。



■ご使用方法

- ①入れ歯、マウスピース、リテーナーを流水で軽く洗浄します。
- ②ボトルをよく振った後、キャップを外して、入れ歯、マウスピース、リテーナー全体に泡が覆うように、1~2プッシュします。
- ③やわらかいブラシで、約1~2分こすり洗いをします。
- ④入れ歯、マウスピース、リテーナーを流水でよく洗浄してください。

本紙に掲載されている情報は2026年3月のものです。形態・仕様は予告なく変更することがあります。