

セラファミリー

TheraFamily

キャンペーン MTA系

キャンペーン期間: 2026年7月21日(火) ~ 9月18日(金)

キャンペーン期間中、
下記製品を **特別価格** にてご提供いたします。
ぜひ、この機会をご利用ください。

光重合型 MTA系 覆髄材料

混和不要でシリンジから直接適用できる光重合型覆髄材料です。生体親和性に優れています。

セラカルLC 1g 1本入



歯科医院様参考価格 **¥6,900**

管理医療機器 医療機器認証番号 225AGBZX00008000

セラカルLC 1g 4本入



歯科医院様参考価格 **¥24,000**

デュアルキュア型 MTA系 覆髄材料

セラカルPT 4g 1本入

生活歯髄切断法にも適用できる
自動練和タイプのデュアルキュア型覆髄材料
および裏層材です。



歯科医院様参考価格 **¥16,000**

管理医療機器 医療機器認証番号 302AKBZX00006000

デュアルキュア型 MTA系 自己接着型裏層材

セラベース 8g 1本入

高い曲げ強度、高い圧縮強さを実現した
自動練和タイプのデュアルキュア型裏層材
(ベース&ライナー) です。



歯科医院様参考価格 **¥24,000**

管理医療機器 医療機器認証番号 303AKBZX00082000

セラファミリー 共通の特徴

BISCO 社独自の製法により、

ケイ酸カルシウム（ポルトランドセメント）、親水性モノマー、疎水性モノマーを配合し、

生体親和性 **カルシウムイオン放出** **強アルカリ性** **低溶解性** **高い封鎖性** を可能にしました。



BISCO 社独自の親水性モノマー・レジンマトリックス技術

"Thera"テクノロジー

BISCO 社の "Thera" テクノロジーは、水分をレジンマトリックス内に取り込み、レジンマトリックス外にイオンを放出する相互移動が可能です。


この技術により、ケイ酸カルシウムと水分が水和反応し、カルシウムイオンと水酸化物イオンを放出します。

カルシウムイオンは、歯質に拡散し、歯髄にはデンティンブリッジ形成能を促進し、水酸化物イオンは、強アルカリ環境をつくります。

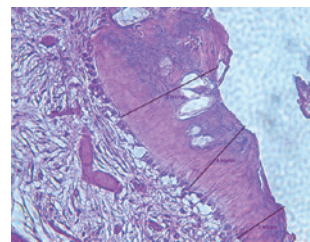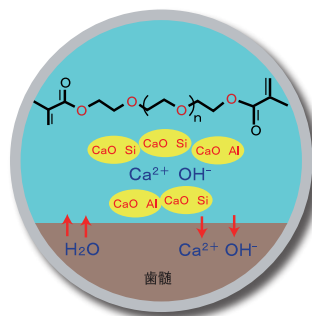


セラカルLCを適用した28日後、デンティンブリッジの形成を確認することができます。


セラカルL®による直接覆髄にセラベースによる裏層を行ったご使用例

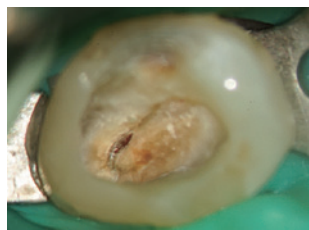


窩洞形成後、必要に応じて洗浄を行い、綿球にて余剰水分を除去し、湿潤状態を維持します。
※エアブローは行わないでください。

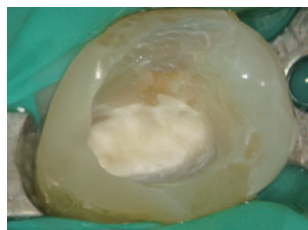

露髄部および周囲象牙質を1mm以上覆うように、セラカルLCを厚さ1mm以下にて適用します。

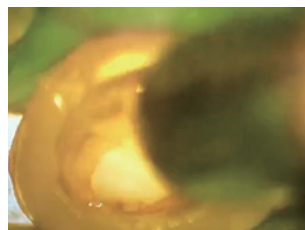

光重合20秒間（500mW/cm²）します。

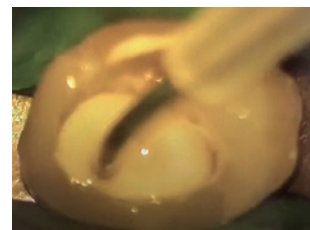

セラベースで裏層をします。（20秒間光重合します。）

臨床写真ご提供：天川デンタルオフィス外苑前 天川 由美子 先生

セラカルPTによる覆髄後にセラベースによる裏層を行ったご使用例




露髄の恐れがある部位にセラカルPTを適用します。




セラベースで裏層をし、光重合20秒間（500mW/cm²）します。

臨床写真ご提供：デンタルオフィス武蔵浦和 栗原 一雄 先生

MTAセメントによる直接覆髄後にセラベースによる裏層を行ったご使用例

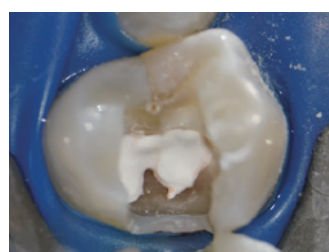

露髄部にMTAセメント（粉・液タイプ）を適用します。

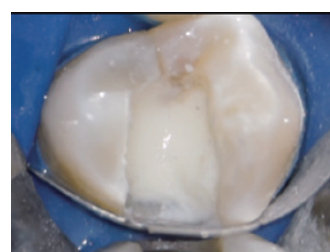

20秒間光重合（照射強度500mW/cm²）します。

臨床写真ご提供：新百合ヶ丘1000のバイオリン歯科 宮島 大地 先生

本紙に掲載されている価格は2026年6月のもの（税抜）です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。