

従来のポストホールの乾燥用の細いノズルに追加して、キットに
スリーウェイシリンジの先端部と同等形状のスペアエアークヘッドを組み込みました！

ポータブル式ブロー

ボンドエアーイーズ キット キャンペーン

キャンペーン期間：
2026年9月24日(木)～11月20日(金)

歯科医院様参考価格

¥28,000

キャンペーン
特別価格

50キット限定

ポストホールのブローに

訪問診療時の乾燥に



持ち運び式ブロー缶
「マイクロエッチ・ブロー」に接続し、
ブローを行うことができます。

キットに
スペアエアークヘッド 追加！

ポストホールの
乾燥に
スペアヘッド

NEW 訪問診療時の
乾燥に
スペアエアークヘッド



ノズル外径1mm
長さ11mm




ノズル外径約5.5mm(内径約0.6mm)
長さ約44mm
(ヘッドに1本溝付)

接着に重要な乾燥に！ ポータブル式ブロー **ボンドエアーズ**


より良い接着のためには、湿気、油分、汚れは大敵です。

接着材のエアブロー時にエアが強すぎますと接着材を吹き飛ばしてしまい、弱すぎますと接着材の溶剤が残留し、接着不良の原因になる可能性があります。

スリーウェイシリンジを用いた
ポストホールの乾燥は、
ポストホールの底部に水分が残りやすく、
また、チェアーからのエアは
湿気、油分、汚れが混在していることが
あるので注意が必要です。

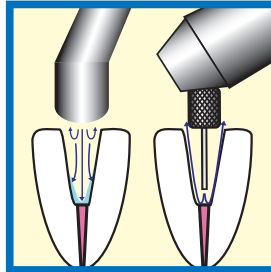


ボンドエアーズは、
ブロー缶からエアを供給しますので、
湿気、油分、汚れなどを含まず、
細いノズルはポストホール底部に到達するため、
ファイバーポストなどの接着処理時の
ブローに適しています。

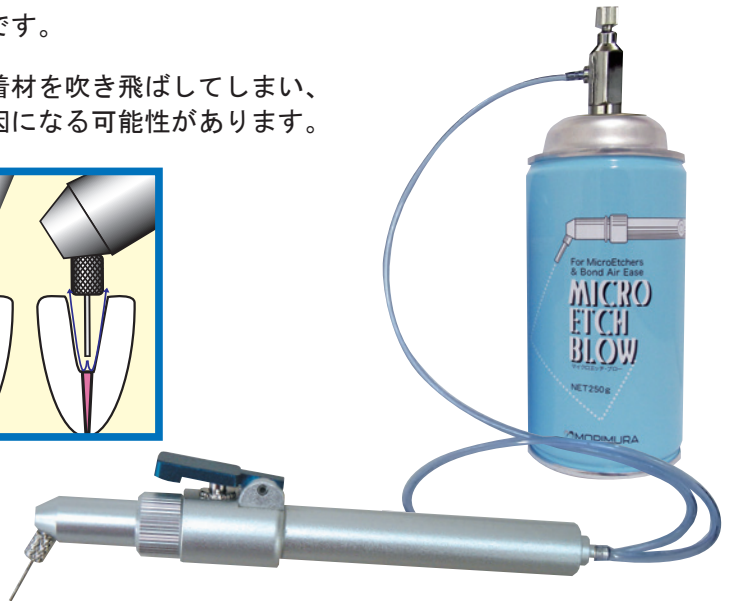

ご使用例


ポストホールに

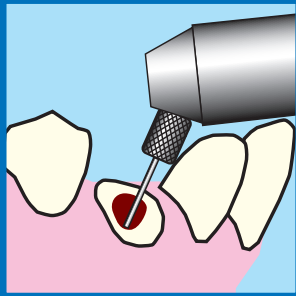

ポストホール底部からのブロー
ができます。


※根管治療時に、根管内根尖部に吹きつけることは避けてください。

小さい窩洞に

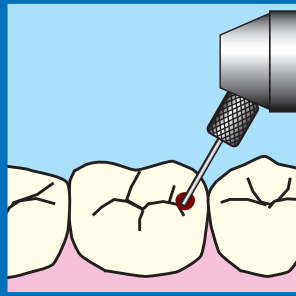


M I コンセプトに即した小さい
窩洞の接着処理時のブローに
適しています。

印象採取時に

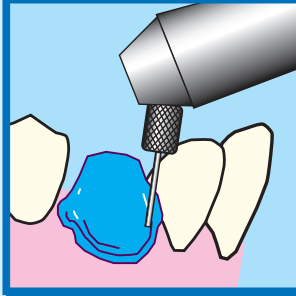

シリコン印象時のブローで
印象をより精密に。
※寒天印象材には使用しないでください。

訪問診療時の乾燥に

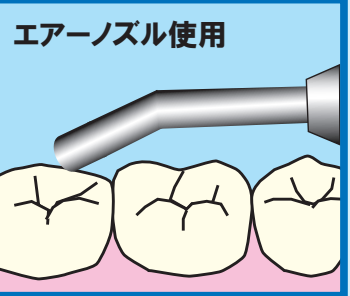

ポータブル式ブローのため、持ち運び
に便利です。

●ボンドエアーズ キット

歯科医院様参考価格 **¥28,000**

内容

- ・ボンドエアーズ本体 1本
- ・スパーヘッド(本体に装着済) 1個
- ・マイクロエッチ・ブロー缶(内容:250g) 1本
- ・ポンベ取付金具(マイクロエッチ・ブロー金具) 1個
- ・ホース(外径3mm、長さ2m) 1本
- ・スパーノズル 2本
- ・スパーエアヘッド(外径5.5mm 内径0.6mm 長さ約44mm) 1個

●スパーヘッド(先端ノズル付) 1個

歯科医院様参考価格 **¥4,200**

●スパーノズル(先端ノズルのみ) 1本

歯科医院様参考価格 **¥1,900**

●スパーエアヘッド(エアノズル付) 1個

歯科医院様参考価格 **¥4,200**

●ホース 2m 1本

歯科医院様参考価格 **¥1,500**

●マイクロエッチ・ブロー缶 2本入

歯科医院様参考価格 **¥4,500**

一般医療機器 歯科根管内清掃器具 製造販売届出番号 13B3X00243000001

ご使用方法

- ①ボンドエアーズにホースをしっかりと接続します。
- ②ホースの反対側をポンベ取付金具にしっかりと接続します。
- ③取付金具をマイクロエッチ・ブロー缶に装着します。
- ④取付金具のバルブを時計方向に10回転以上回すとエアが流れます。
- ⑤噴射ボタンを押すと噴射し、離すと停止します。
- ※噴射は、必ず2〜3秒間隔にて行ってください。
- ⑥ご使用後は、マイクロエッチ・ブロー缶から取付金具を外して保管してください。

取扱上のご注意

- ※スパーヘッドおよびスパーノズルはオートクレーブ滅菌をすることができます。
- ※本体はアルコール消毒のみです。
- ※マイクロエッチ・ブロー缶は液化ガス(成分:HFO-1234ze)のため、
噴射時間は、必ず2〜3秒間隔(使用回数目安:約1200回)に区切り、
1回の使用時間は60秒以内にしてください。
- ※液化ガスの気化により低温のエアが噴射されますので、皮膚への連続使用により凍傷となる恐れがありますのでご注意ください。
- ※マイクロエッチ・ブロー缶は立ててご使用ください。
- (45°以上傾けますと、冷たい生ガスが噴射されて凍傷となる恐れがあります。
- ※ご使用前に製品付属の取扱説明書を読み、正しくご使用ください。

本誌に掲載されている価格は2026年7月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製造販売業者:(有)秋山歯科器具製作所



株式会社 **モリムラ**

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

<http://www.morimura-jpn.co.jp>

●製品に関するご用命は