



## 幅広い知覚過敏の症例に

### 基本操作

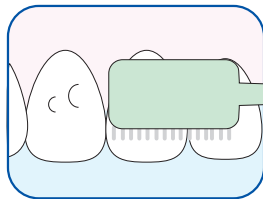


歯面清掃は  
刺激にならないよう  
注意して行います。

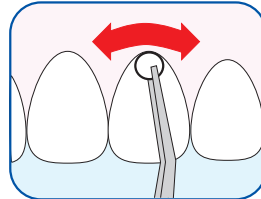


スーパーシール5秒を  
5秒間  
こすり塗り

※塗布前のエアブローは不要です。

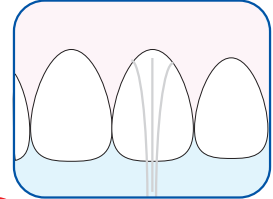


**Point** 10cm離れた  
ところから3秒間  
穏やかなエアブロー

### クサビ状欠損

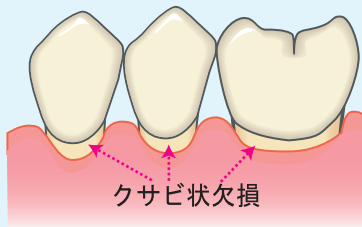


ブラッシングのがんばりすぎなどにより  
歯肉の退縮が発生した部位などに。

### 抜歯隣在歯

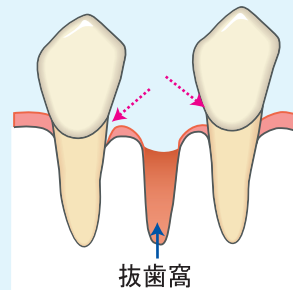


抜歯窩の治癒とともに  
抜歯隣在歯の歯肉が多少退縮した部位などに。

### スケーリング・ルートプレーニング PMTc前後

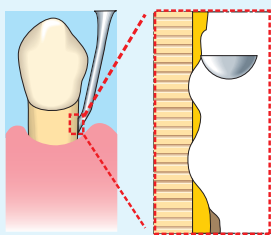


スケーリングやPMTc前後の  
歯面、歯根面などに。

### 義歯クラスプの鈎歯

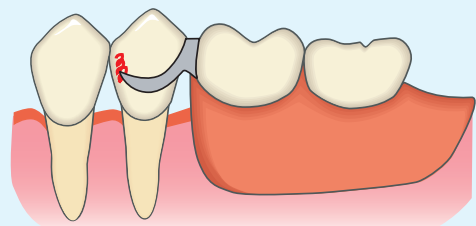

鈎歯のクラスプで擦れる箇所周辺に。


### インプラント両隣在歯頸部

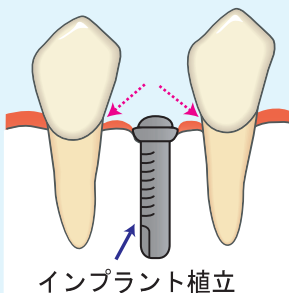

インプラント植立

インプラントの植立オペや歯周外科治療等の症例で、  
歯肉の退縮が発生した両隣在歯歯頸部周辺に。

### 矯正治療中

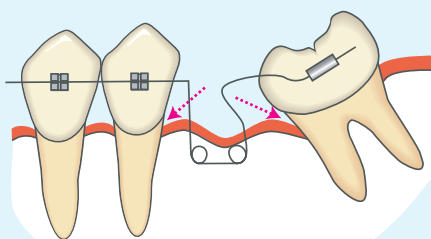


矯正治療中、歯肉の退縮が発生した部位などに。


# 歯科用知覚過敏抑制材料 **スーパーシール5秒** 臨床活用 シート

## 幅広い知覚過敏の症例に


### 症例Ⅰ 修復臼歯咬合面

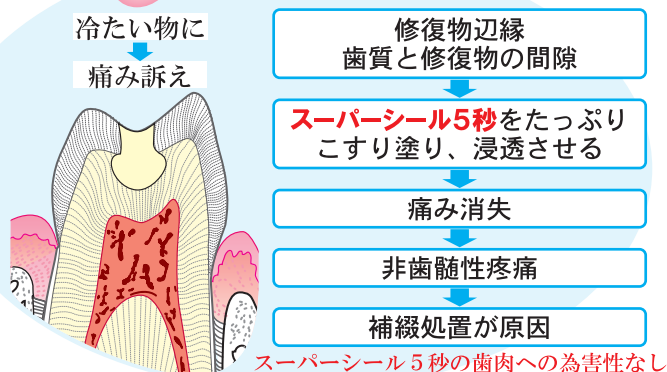


### 症例Ⅱ 内側性窩洞・形成後の処置

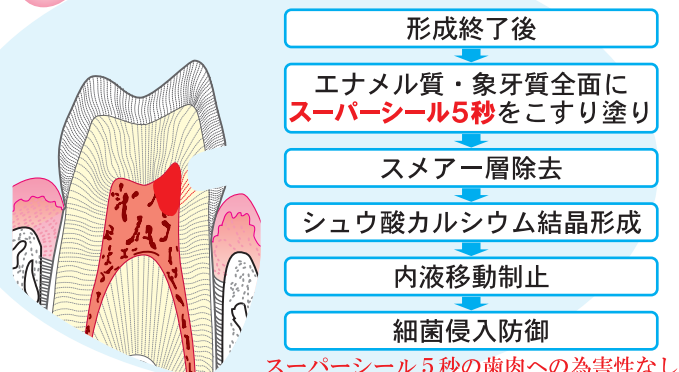


### 症例Ⅲ 歯冠形成後の処置

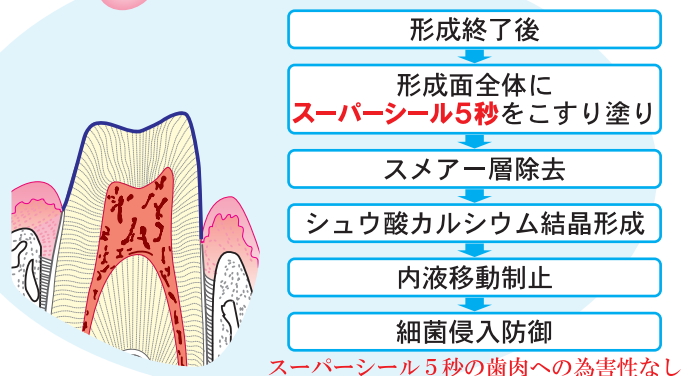


### 症例Ⅳ 露出根面・象牙質面処置

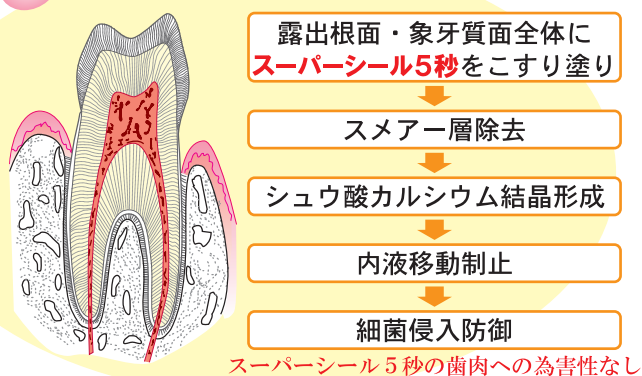


### 症例Ⅴ 歯頸部・歯根面部歯石沈着症例

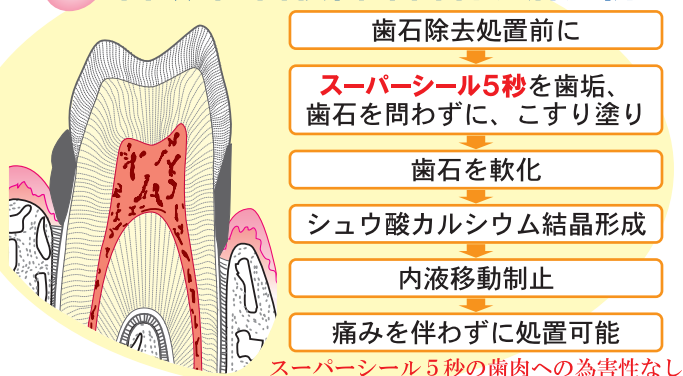

### 症例Ⅵ 咬合痛症例

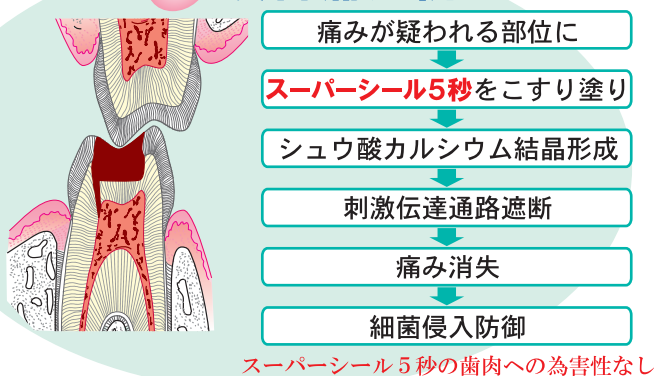

### 症例Ⅶ ホワイトニング処置前後

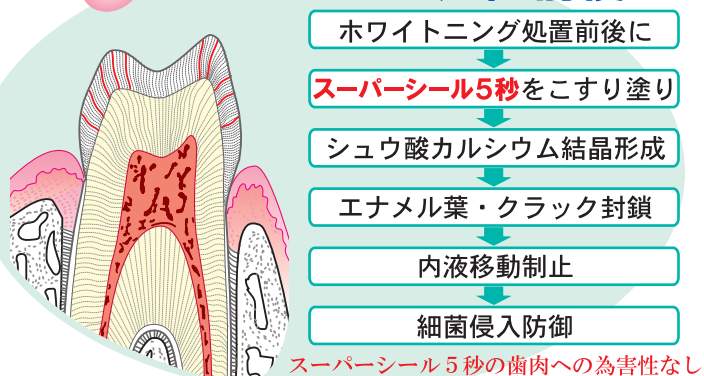

### 症例Ⅷ 矯正ブラケット除去後

