

歯科材料 05 歯科用接着充填材料  
管理医療機器 歯科用エッチング材(36153000)(歯科用充填・修復材補助器具(38782000))

## ユニエッチ

シリンジチップは再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

本材に含まれるリン酸は、刺激性が強いので、皮膚、粘膜及び目に触れると炎症をもたらすので、接触を避けること。  
本材に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。  
シリンジチップは再使用禁止。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1.本材の形状、成分

構成品	容器	形状	成分
ユニエッチ 5g	シリンジ	ジェル	精製水、32%リン酸、着色材、その他
ユニエッチ 30g	ボトル		

付属品 :シリンジチップ(ユニエッチ 5g シリンジのみに付属)

#### 2.原理:

含有するリン酸により、歯又は歯科修復物の表面を酸処理する。

### 【使用目的又は効果】

#### 【使用目的】

歯又は歯科修復物のエッチング(技工専用を除く)に用いる。

### 【使用方法等】

#### 準備

- シリンジは、キャップをはずし、シリンジチップを時計方向に回して確実にシリンジに装着します。キャップは保管して下さい。

#### 歯面のエッチング

- 歯面をフッ化物や油分を含まない歯面研磨材やペーストで清掃し、水洗します。
- 油分や水分を含まないエアード、歯面を十分に乾燥させます。
- 通法により防湿します。
- 歯面への塗布

**トータルエッチ:**エナメル質と象牙質を合わせて処理する際には、エナメル質から処理を開始します。周囲の軟組織に触れないよう、エッチングを行う部位に、直接本材を塗布し、15秒間放置します。

**セレクトティブエッチ:**周囲の軟組織に触れないよう、切削および未切削エナメル質等のエッチングを行う部位に、直接本材を塗布し、15秒間放置します。水洗前に歯面からエッチング材を吸引除去し、エッチング材が流れて象牙質と接触することを避けて下さい。

- エッチング部位をバキュームで吸引しながら、確実に5秒間水洗し、エッチング材を残存させないで下さい。
- 水洗後は、乾燥滅菌綿球等にて、患部の湿気を吸い取り、速やかに接着処理を行います。セルフエッチングアドヒーズを適用の場合には、製造者の指示に従って下さい。

#### 歯科修復物のエッチング

- 修復物被着面のプライミングや試適が必要な場合には、その処置をします。
- 修復物被着面(洗浄面)、本品を塗布し、30秒間放置します。
- 十分に水洗します。

#### 【使用法に関連する使用上の注意】

- 水洗、乾燥を行う際、本材の飛沫が、口腔軟組織や皮膚に付着したり、目に入ったりしないように注意して下さい。
- エッチング処理をした歯面が唾液等で汚染されないように注意して下さい。汚染された場合は再度エッチング処理を行います。
- シリンジは、周囲に人がいないことを確認し、少量を試し出しし、詰りなどが無いか確認、押出しの感覚をつかみます。シリンジの先端が塊などで詰っている場合は、シリンジチップを取り外し、シリンジより直接中身を押出しし、塊を取り除いて下さい。シリンジチップが詰っている場合は、それを破棄し、新しいシリンジチップを装着し使用して下さい。
- 使用後のシリンジチップ等が不用意に触れることがないよう、直ちに破棄し、本材の付着した器具は、十分に水洗します。
- シリンジのプランジャーを押した時に抵抗が感じられる場合は、新しいチップと交換して下さい。
- エッチングした部位をエアードで乾燥する時は、象牙質を乾燥し過ぎないように注意して下さい。
- シリンジチップは、1回の使用ごとに交換し、再使用しないこと。

- 使用後は、シリンジチップを取り外し、キャップを閉めて保存すること。シリンジチップを取り付けた状態、あるいはキャップを取り付けない状態で保管すると、本材が乾燥し、詰まりの原因になる可能性があるため、注意すること。次回使用するときは、キャップを取り外し、新しいシリンジチップを使用すること。

### 【使用上の注意】

#### 【使用注意】

- 他の製品と混合して使用しないこと。
- 使用後の容器は、「廃棄物に関する法律」等に従い、適切に処理すること。
- 本材が衣服に付着した場合は水洗すること。
- 使用時の感染防止のため、患者間での交差使用は避けること。
- 本材を使用するにあたっては、本材が患者の症例に適合するかどうか、歯科医師が判断すること。

#### 【重要な基本的注意】

- 誤飲させないこと。万一、誤飲させた場合には、うがいをさせ、必要に応じて医師の診断を受けさせること。
- 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が表れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- 感染予防のため、また本材の接触による過敏症を防ぐため、保護グローブ、保護メガネ、保護マスク等を使用すること。
- 本材が口腔軟組織や皮膚に付着したり、目に入らないように注意すること。軟組織や皮膚に付着した場合は、すぐに流水で洗浄すること。万一、目に入った場合はすぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 【保管方法】

直射日光、高温多湿を避け20～25℃の暗所に保管すること。

#### 【使用期限等】

構成品の包装に記載の使用期限までに使用すること。  
記載の使用期限は、自己認証(当社データ)による。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	*株式会社モリムラ
電話番号	*03-5808-9350
製造業者	BISCO, Inc. (ビスコ インク社)
製造国	アメリカ合衆国