

# たれ流れにくく水洗が容易な セミジェルタイプ 歯科用エッチング材

高分子  
増粘性材  
配合

ユニエッチの色調が  
識別しやすいように  
**緑色から青色に  
変更になりました。**

## 32%リン酸エッチング材 ユニエッチ

お得で  
詰替え便利  
ボトルタイプ

直接適用  
できる  
シリンジ  
タイプ



●5g シリンジ (シリンジチップ25g 15個入) 歯科医院様参考価格 ¥3,200 1gあたり ¥640  
●30g ボトル 歯科医院様参考価格 ¥8,000 1gあたり約 ¥267

### たれ流れにくく水洗が容易なセミジェルタイプ

#### ●高分子増粘性材配合

高分子増粘性材を配合してセミジェル状にしていますので、必要な部分に適用でき、不必要な部位への付着を防止します。水洗が容易です。

#### エッチング時間 わずか **15秒**


#### ●トータルエッチング

エナメル質・象牙質を同時に15秒でエッチング処理することができます。

#### 使用方法

#### ●シリンジタイプ

シリンジ先端にシリンジチップを装着します。歯質に塗布し、15秒後に水洗します。

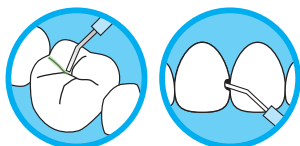

#### ●エナメル質エッチング

エナメル小柱の細孔が拡大し接着性を向上させます。窩洞周囲の未切削エナメル質への接着等の褐線防止に。

#### ●ボトルタイプ

ミキシングウェルなどに取り、アプリケーションなどを用いて塗布し、15秒後に水洗します。  
※シリンジに詰め替えてご使用いただくこともできます。  
●シリンジのプランジャー（押し棒）を引き抜いて填入してください。

ユニエッチ 管理医療機器 医療機器認証番号:231AGBZX00015000  
製造業者:BISCO, Inc. 製造国:アメリカ合衆国

本紙に掲載されている価格は2022年12月21日現在のもの（税抜）です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

➔ TEL.0120-33-8020 FAX.0120-66-8020

 MORIMURA

株式会社 モリムラ

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は