

機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 (70682000)
ECOシリンジ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある場合は直接触れないようにすること。また、使用により過敏症があらわれた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
- 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造は次のとおり。

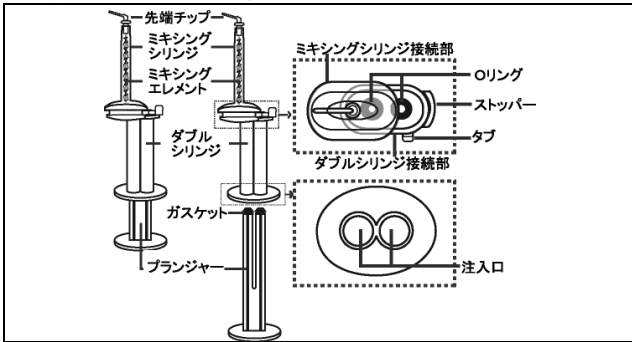

- 材質：プラスチック、ゴム
- 原理：歯科材料(印象材等)を、ミキシングエレメントにより、練和又は混和する。

【使用目的、効能又は効果】

歯科材料(印象材等)を練和又は混和し、適用部位に注入する。
併用する歯科用ゴム質弾性印象材
・ 歯科用ポリエーテル印象材
・ 歯科用ポリサルファイド印象材
・ 歯科用シリコーン印象材
タイプ3：低粘度(主としてシリンジ注入にて使用するもの)


【操作方法又は使用方法等】*

1) 使用準備

- 印象材の注入の前に、ミキシングシリンジ接続部をダブルシリンジ接続部のタブの位置から離します。ダブルシリンジからプランジャーをゆっくりとまっすぐに引き抜きます。




- ダブルシリンジ注入口にカートリッジタイプの印象材の先端部を差し込み、印象材の使用量を、気泡が混入しないように、ゆっくりと少量ずつ装填します。印象材の装填時に注入口から印象材が流出する場合には、先端チップを平行またはやや下向きになるように傾けて装填してください。*

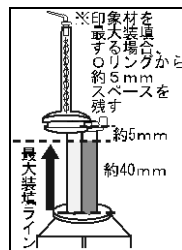


印象材の使用量の目安	
半分(約20mm)	クラウン1個分
最大(約40mm)	クラウン3個分

印象材を最大装填する場合、ダブルシリンジ注入口から約40mm(Oリングから約5mmスペースを残す)を目安にしてください。これ以上装填しますとプランジャーの差し込みの際に印象材が溢出する可能性があります。

- ダブルシリンジ注入口にプランジャーをまっすぐに差し込み、印象材がダブルシリンジOリングの位置に至るまで、ゆっくりと押し込みます。

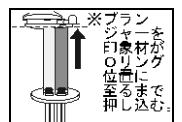

- ミキシングシリンジ接続部をダブルシリンジ接続部のタブの手前までスライドさせます。

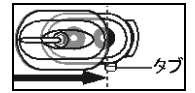

※タブは印象材混和防止のため、印象採得直前まで取り外さないでください。

2) 印象材の練和又は混和および印象採得

- ミキシングシリンジ接続部をスライドさせて、ダブルシリンジ接続部のタブが外れるまで一杯に押し切り、ストッパーの位置に合わせます。



- プランジャーをゆっくりと押し、先端チップより練和又は混和された印象材の試し出しを行って確認します。
- 印象採得部位に先端チップを適用させ、印象採得します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 使用前に、本品に異常がないことを確認すること。
- 使用する歯科材料(印象材等)の指定する硬化時間より前に、本品の操作を終了すること。
- 使用する歯科材料(印象材等)の製造者の指示に従って、シリンジの操作を行うこと。
- 歯科材料(印象材等)は、ゆっくりと少量ずつ装填および適用し、気泡が混入しないようにすること。*
- 歯科材料(印象材等)の試し出しを行って、練和又は混和の状態を確認してから印象採得をすること。練和又は混和不良の場合は、本品の使用を中止すること。
- プランジャーの操作は、ゆっくりとまっすぐに引いたり、押ししたりすること。斜めに操作すると、ガスケットとシリンジの密着性が悪くなり気泡が混入したり、ガスケットが外れる可能性があります。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- 損傷、変形等のあるものは使用しないこと。
- 本品は、【使用目的、効能又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 無理な角度、過度の加圧での使用はしないこと。

〔重要な基本的注意〕

- 本品は再使用しないこと。
- 器具の正しい使用のために、注意事項をよく読み、必ず守ること。
- 破損や事故等の原因となるので、2次加工(改造)は絶対に行わないこと。
- 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある場合は直接触れないようにすること。また、使用により過敏症があらわれた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- 直射日光を避け、常温(但し、結露しないこと。特に水ぬれに注意すること)にて、貯蔵・保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】**

- ・ 20本入+5本入
- ・ 20本入
- ・ 100本入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社エイコー
住所 東京都台東区上野 3-17-10
電話番号 03-3834-5777
FAX 番号 03-3837-2655
製造国 アメリカ合衆国
製造業者 DANVILLE MATERIALS (ダンビル マテリアルズ社)