



4mm×150mm×3mmにエリートフロを硬化させた試料。気泡も入らずにしなやかさが持続しています。

咬合圧や重合収縮による応力の緩和に

流れおちず、しなやかなフロアブルコンポジット エリートフロ & エリートフロLV

目的に応じて選びやすい2種類のフロー & 豊富な色調
低粘性レジンを使い分けにより確実な充填を可能に！

色調が豊富な
『エリートフロ』

ÆLITEFLO™



シェード・11色
A1, A2, A2-0, A3,
A3.5, A5, B3, C2,
C3, D3, TL(透明)

医療用具承認番号20800BZY00879

さらに流動性の高い
『エリートフロLV』

ÆLITEFLO™ LV



シェード・2色
A2, A3.5

医療用具承認番号21000BZY00499

- 弾性率：3.7GPa ●圧縮強度：288Mpa ●フィラー含有率：57%
- X線不透過性 ●容量：シリンジ1.5g ディスポーザブルチップ付
- 単色（シェード11色）各1本：¥2,400
- キット内容（A2, A3.5, TL/各1本, A3/2本）計5本：¥11,500
- 単色4本セット（1シェード4本入）：¥9,200

<用途>

- ◎5級窩洞充填 ◎ポーセレンリペア修復
- ◎ポーセレンベニア修復 ◎2級・3級窩洞充填など


- 弾性率：2.09GPa ●圧縮強度：304Mpa
- フィラー含有率：55% ●X線不透過性
- 容量：シリンジ1.5g ディスポーザブルチップ付
- 単色（シェード2色）各1本：¥2,400
- 単色4本セット（1シェード4本入）：¥9,200

<用途>


- ◎小さい5級窩洞充填 ◎窩洞のベース材
- ◎ピット&フィッシャーシーラント充填など

<共通の特長>

- 流動性がよいのに流れおちません
- 窩洞に直接充填、手用器具もほとんど不要
- 窩洞の隅や窩底に気泡を作らない
- 弾性率が低いので、応力のかかる部位に有効
- シリンジタイプなので狭くて深い窩洞へもラクラク充填
- 適量のみでの使用で無駄なく経済的
- 研磨性にすぐれ着色しにくい

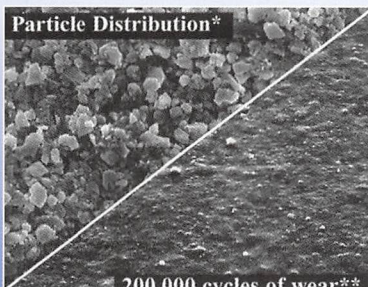

エリートフロ
SEM像（左上5000倍 右下1000倍）
フィラーが0.6~0.7μmの微小で均一なバリウムガラスのため粒子の脱離も最小限です。

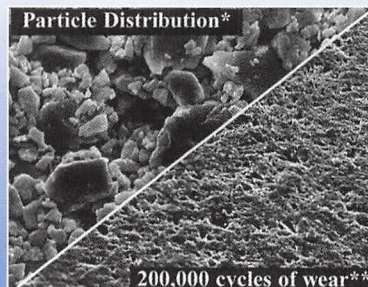


他社製品
SEM像（左上5000倍 右下1000倍）
フィラーが2~5μmとサイズが大きいため粒子の脱離と着色を起こす可能性があります。

しなやかな流動性の「エリートフロ・エリートフロLV」 だからこそその臨床例です。

《エリートフロ症例》

応力が最もかかりやすい5級窩洞に

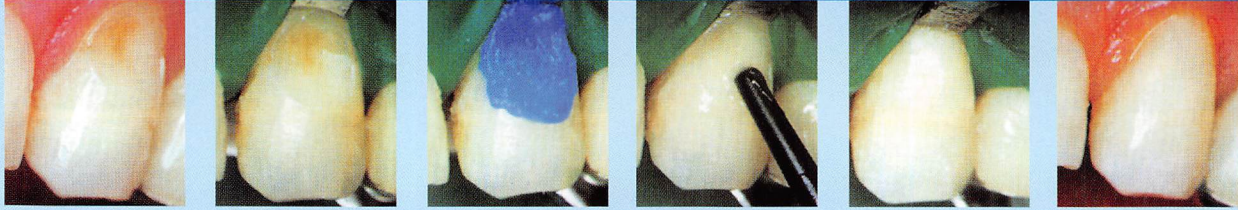

楔状欠損の5級窩洞 ラバーダム防湿 ユニエッチ（ビスコ）で確実にエッチング ワンステップ（ビスコ）塗布後、ベースにエリートフロ充填 さらにエリートフロ築盛 充填後仕上げ研磨

見えづらく、窩底部に気泡の入りやすい2級窩洞に



2級窩洞形成 ユニエッチで確実にエッチング ワンステップ塗布 直視しづらい窩底部にエリートフロをしっかりと填入 積層充填によりエリートフロ充填 充填後仕上げ研磨

色調仕上がりの大切なポーセレンベニアの合着に




ポーセレンベニアの準備 形成部位をユニエッチでエッチング ワンステップ又はオールボンド2（ビスコ）塗布 エリートフロを合着用レジメンメントとして使用 光重合10秒（500m/w）余剰部除去後40秒 ポーセレンベニア合着完了

テンポ ラリークラウンの修理に




充填し
づらい
部位にも

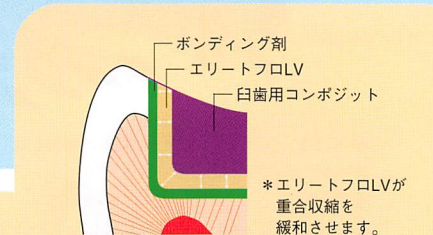

《エリートフロLV症例》

深い窩洞の
重合収縮緩和の
ためのベース材
として

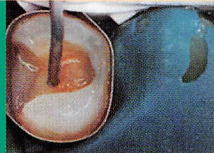


エリートフロLVを窩底部に填入



ベース材として填入後、白歯用コンポジットを充填

ピット&
フィッシャー
シーラント
として

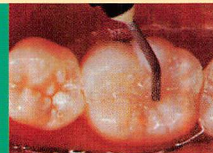

*参考文献：日本歯科大学歯学部 総合診療科1 歯科保存学講座 講師 榎木寿男先生, 「しなやかなコンポジットレジメン修復?」, クリニカル・M・レポート, Vol.25, 6, 2001.

お客様フリーダイヤル TEL 0120-33-8020 FAX 0120-66-8020

歯科の最新情報は
ホームページへ

www.eiko-jpn.co.jp

www.morimura-jpn.co.jp

輸入元



予防へ。保存・矯正へ。未来ある歯科を。
株式会社 エイコー
東京都台東区上野3-17-10 〒110-0005 TEL.03-3834-5777
<http://www.eiko-jpn.co.jp>

● 製品に関するご用命は

発売元

株式会社 **モリムラ**

東京店：東京都台東区上野3-7-3 TEL.03-3836-1871 FAX.03-3832-3810
名古屋店：名古屋市千種区池下1-4-15-7F TEL.052-752-6671 FAX.052-752-6698
<http://www.morimura-jpn.co.jp>