

歯科材料 05 歯科用接着充填材料  
管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン (70847002)  
エリートフロ

シリンジチップ再使用禁止\*\*

【禁忌・禁止】\*\*

本材又はメタクリル酸系のモノマーに対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。  
シリンジチップ再使用禁止\*\*

【形状・構造及び原理等】\*\*

本材は以下の構成成分があり、記載の成分を含みます。

構成成分	性状	形状	成分
エリートフロ 1.5g	ペースト	シリンジ	Bis-GMA、TEGDMA、バリウムガラス**、その他

付属品：シリンジチップ(19G)\*\*

【使用目的、効能又は効果】\*

本材は、光重合型充填用フロアブルコンポジットレジンです。流動性が高く、微少なフィラーを含有しており、シリンジタイプのため、直接窩洞に充填できます。11シェードは、審美的に歯冠修復します。

【用途】

- ・V級窩洞、III級窩洞、IV級窩洞の充填
- ・I級窩洞、II級窩洞のベース
- ・ポーセレン、硬質レジンの破損修復

【効能又は効果に関連する使用上の注意】

- ・適切な重合条件で使用する。
- ・下記の【操作方法又は使用方法等】\*に記載の重合時間(照射時間)は、可視光線(400~500nm)を照射源とした光照射器を前提に記述しております。他の歯科用光重合器等を使用する場合は、使用説明書に指定された重合時間で重合してください。

【操作方法又は使用方法等】\*\*

- ①防湿および清掃します。
- ②通法により光重合型接着材を塗布します。各ボンディング材使用方法指示に拠ります。
- ③色調を選択した本材に、シリンジチップを装着します\*\*
- ④本材を、1層2mm以上の厚さにならないように充填します。
- ⑤1層ごと、20秒以上光重合します。
- ⑥咬合調整、仕上研磨します。

＜ワンステップとの併用＞

- ①歯面にユニエッチ塗布します。15秒後水洗し、濡れている綿球にて余剰水分を除去します。
- ②ワンステップをブラシにて濡れている歯面に2層塗布します。
- ③エアードライ10秒間します。
  - ・溶媒をとばし、表面に光沢感が得られたことを確認してください\*\*
  - ・光沢感が得られない時はワンステップを再塗布してください。
- ④10秒間光重合します。
- ⑤色調を選択したエリートフロを充填します。
- ⑥20秒間光重合します。
- ⑦咬合調整、仕上研磨します。

＜オールボンド2との併用＞

- ①歯面にユニエッチ塗布します。15秒後水洗し、濡れている綿球にて余剰水分を除去します。
- ②オールボンド2プライマーAとBを混合します\*\*
- ③混合したオールボンド2プライマーAとBをブラシにて濡れている歯面に5層塗布します\*\*
- ④エアードライ5~6秒します。
  - ・溶媒をとばし、表面に光沢感が得られたことを確認してください。
  - ・光沢感が得られない時はプライマーAとBを再塗布してください。
- ⑤DEレジンを薄く1層塗布し、20秒間光重合します。
- ⑥色調を選択したエリートフロを充填します。
- ⑦光重合20秒します。
- ⑧咬合調整、仕上研磨します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本材はシリンジの蓋を取ったままで置かないこと。使用後は、必ずシリンジチップを外し、蓋を確実に締めて保管してください\*\*
- 2) シリンジチップは使用ごと廃棄し、再使用しないこと\*\*
- 3) 窓際又はライト直下等、明るい場所では本材が硬化することがありますので、強い光の当たらない場所で使用すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
  - ①本材は、[使用目的、効能又は効果]の項に記載の用途以外には使用しないこと。
  - ②歯科医療有資格者以外が使用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
  - ①本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が表れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
  - ②本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が表れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
  - ③本材の接触による過敏症を防ぐため、保護グローブ、保護メガネ、保護マスク等を使用すること。また、口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。軟組織や皮膚に付着した場合は、すぐにアルコール綿等で拭いた後、流水で洗浄すること。万一目に入った場合はすぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
  - ④包装、ラベルに記載の使用期限を超えて使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

【貯蔵・保管方法】

本材は室温で火気厳禁の暗所に保管すること。

【使用期間等】

本材の包装に記載の使用期限までに使用すること。

【包装】\*\*

【単品包装】

・エリートフロ 1.5g A1 (シリンジチップ (19G) 10本付)**	1本
・エリートフロ 1.5g A2 (シリンジチップ (19G) 10本付)**	1本
・エリートフロ 1.5g A2-O (オパーク) (シリンジチップ (19G) 10本付)**	1本
・エリートフロ 1.5g A3 (シリンジチップ (19G) 10本付)**	1本
・エリートフロ 1.5g A3.5 (シリンジチップ (19G) 10本付)**	1本
・エリートフロ 1.5g A5 (シリンジチップ (19G) 10本付)**	1本
・エリートフロ 1.5g B3 (シリンジチップ (19G) 10本付)**	1本
・エリートフロ 1.5g C2 (シリンジチップ (19G) 10本付)**	1本
・エリートフロ 1.5g C3 (シリンジチップ (19G) 10本付)**	1本
・エリートフロ 1.5g D3 (シリンジチップ (19G) 10本付)**	1本
・エリートフロ 1.5g TI** (シリンジチップ (19G) 10本付)**	1本

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】\*\*

製造販売業者 株式会社エイコー  
住所 東京都台東区上野3-17-10  
電話番号 03-3834-5777  
FAX番号 03-3837-2655  
製造国\*\* アメリカ合衆国\*  
製造業者\* BISCO, Inc. (ビスコ インク社)\*\*

All AELITE FLOs	
AELITE FLO A1	H-671A1F-JP
AELITE FLO A2	H-671A2F-JP
AELITE FLO A2-O	H-671A2OF-JP
AELITE FLO A3	H-671A3F-JP
AELITE FLO A3.5	H-671A35F-JP
AELITE FLO A5	H-671A5F-JP
AELITE FLO B3	H-672B3F-JP
AELITE FLO C2	H-673C2F-JP
AELITE FLO C3	H-673C3F-JP
AELITE FLO D3	H-674D3F-JP
AELITE FLO TI	H-675T1F-JP