

**機械器具 65 歯科用充填器**  
**一般医療機器 歯科用マトリックスリテーナ (33204000)**  
**メガVリング**

**【禁忌・禁止】**

1. 目的以外の使用禁止：歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
2. 注意事項の厳守：器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
3. 異常時の使用禁止：劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4. 改造の禁止：器具の形態変更や改造等はしないこと。

**【形状・構造及び原理等】**

＜形状＞



把持脚

材質：ステンレススチール、ポリエーテルイミド樹脂

＜原理＞

リングの復元力により、把持脚部分で歯科用マトリックスバンドや歯科用マトリックスウェッジを保持する。

**【使用目的、効能又は効果】**

＜使用目的＞

本品はマトリックスバンドを歯の所定位置に保持するために用いる歯科用器具である。

**【操作方法又は使用方法等】**

＜装着する時＞

- ① 歯科用マトリックスバンド（販売名：コンタクトマトリックス）の種類及びサイズを選びます。
- ② 修復する歯牙の隣接面の湾曲部を回復できるように歯科用マトリックスバンド（販売名：コンタクトマトリックス）を装着し、V字型または三角型の歯科用マトリックスウェッジを歯間部に挿入します。
- ③ 本品[メガVリング]を歯科用充填・修復材補助器具（販売名：コンタクトブライヤー）や汎用歯科用ラバーダムクランプ鉗子などで広げ、把持脚のV字型の溝とV字型または三角型の歯科用マトリックスウェッジの頂点を合わせて、またぐ位置にて装着し、ゆっくりと本品を閉じて歯科用マトリックスバンドとV字型または三角型の歯科用マトリックスウェッジを固定します。

＜取り外す時＞

- ① 歯科用充填・修復材補助器具（販売名：コンタクトブライヤー）や汎用歯科用ラバーダムクランプ鉗子を用いて本品[メガVリング]を外します。
- ② 歯科用充填・修復材補助器具（販売名：メガグリップフォーセプス）を用いて歯科用マトリックスバンド（販売名：コンタクトマトリックス）を外します。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ① 使用の際は、必ずラバーダムを装着してください。
- ② デンタルフロスを結び、保持して脱落を防止してください。
- ③ 本品は、広げ過ぎにより元の状態に戻らなかったり、十分に機能しなくなる場合があります。リングが元の状態に戻らない場合は、三嘴鉗子等を用い締め戻してご使用ください。使用回数、

時間と共に劣化しますので、その際には交換してください。

**【使用上の注意】**

1) 使用注意

- ① 本品の使用にあたっては、滅菌された状態で使用すること。
- ② 損傷、変形等のあるものは使用しないこと。
- ③ 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ④ 本品は、本書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑤ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2) 重要な基本的注意

- ① 誤飲には十分注意すること。
- ② 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- ③ 本品の使用により、発疹などの過敏症状があらわれた場合には、ただちに使用を中止すること。
- ④ 歯肉および口腔内に痛みや傷又は腫れがある場合には、使用をしないこと。
- ⑤ 長時間における使用は、歯肉や噛み合わせなどに影響を及ぼすことがあります。

**【貯蔵・保管方法及び使用期間等】**

【貯蔵・保管方法】

- 1) 直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
- 2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【保守・点検に係る事項】**

しばらく使用しなかった本品を再使用するときは、使用前に必ず本品が正常かつ安全に作動することを確認すること。

- 1) 汚染除去のために用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
- 2) 超音波洗浄器で洗浄する時には、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。また、汚れが落ちやすいようにバスケットなどに収納すること。
- 3) 洗浄剤の残留が無いように充分すすぎをすること。
- 4) 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
- 5) 滅菌前に汚れ、傷、曲がり、破損等の異常がないか点検すること。
- 6) 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は器具の表面が損傷するので、汚物除去及び洗浄時の使用はしないこと。

【滅菌条件等】

- ・ 使用後は速やかに器具に付着した唾液等を除去すること。
- ・ 本品は、外層を拭き、十分乾燥させてから滅菌パック等に入れ、オートクレーブ滅菌（135℃、15分間まで滅菌可能）を行うこと。
- ・ オートクレーブ滅菌後、完全に冷えていることを確認してから使用すること。

**【包装】**

【単品包装】

- ・ メガVリング 1個入
- ・ メガVリング 2個入

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売業者	株式会社エイコー
住所	東京都台東区上野 3-17-10
電話番号	03-3834-5777
FAX 番号	03-3837-2655
製造国	アメリカ合衆国
製造業者	DANVILLE MATERIALS (ダンビル マテリアルズ社)