

歯科材料9 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 コード70907000

## ニューポリアップ

### 【形状・構造等】

形状：（容器）

ポリプロピレンプラスチックボトル  
円形の容器  
(1) H55 W54 T54 (100g)  
(2) H73 W81 T81 (300g)開封されたことが一目でわかるセキュリティナー  
キャップ（ポリエチレン樹脂）使用

成分：

材質

油脂類（食品添加物）  
アルカン酸 オレイン酸 モノカルボン酸エステル  
アルケニルモノカルボン酸 モノグリセライト  
砥粒類  
酸化アルミニウム  
顔料  
群青  
水分  
界面活性剤

カラー（研磨材）

青色

### 【性能、使用目的、効能又は効果】

本研磨剤は、レジン、ポーセレンからニッケル（コバルトクロム合金）にいたるまで、すべてのつやだし  
研磨が可能。

研磨後、冷水でも抜群の洗浄効果

局部床義歯、硬質レジン冠、ポーセレン冠など金属と  
レジン等を同時に研磨しても、黒ずんだり、焼きついたりしない。

ひとつのパフで両方同時に研磨つやだし可能。

### 【操作方法又は使用方法等】

- (1) 研磨手順は従来の方法に従ってください。
- (2) レジン、金属、陶材に限らず、最後のパフ仕上げの段階で、このペーストを使用してください。
- (3) 粘度が硬くなった場合は、攪拌してみてください。それでも硬い場合は、水を少量入れて攪拌して、適度の粘度に調節して使用して下さい。
- (4) 備考  
フェルトホイール等を使用すると一段とツヤが出ます。

### 【使用方法に関連する使用上の注意】

- (1) 研磨作業の際には粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- (2) 研磨作業を行う最には、目の損傷を防ぐために保護メガネを必ず使用すること。
- (3) 本製品は、説明書に記載の用途以外には使用しないこと。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

#### 【貯蔵・保管方法】

- ・ 直射日光のあたる所、ストーブの近く等高温になる場所では、保管しないこと。
- ・ 冷蔵庫等低温の場所に保管しないこと。  
(本品は温度によって、粘度が変化いたします。)

### 【使用上の注意】

- (1) 本研磨材は、記載用途以外に使用しないこと。
- (2) 本研磨材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

### 【包装】

#### 【単品包装】

- (1) 100g（ポリプロピレンプラスチックボトル）
- (2) 300g（ポリプロピレンプラスチックボトル）

### 【製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造発売元 有限会社 バイタル  
住所 〒177-0045  
東京都練馬区石神井台 2-5-18  
電話番号 03-3904-7975