

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用マトリックスバンド （16195000）
コンタクトマトリックス

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本品又はステンレス鋼（金属）に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

ソフト L ハード L ウルトラソフト L	ソフト S ハード S ウルトラソフト S	サブジンジバル
		

	厚み	材質
ソフト	38 ミクロン	ステンレス鋼 301
ハード	58 ミクロン	ステンレス鋼 301
ウルトラソフト	38 ミクロン	ステンレス鋼 17-7
サブジンジバル	38 ミクロン	ステンレス鋼 301

<原理>

歯間隣接部に本品を装着して隔壁となることにより、修復材が適切な形になるように一般的輪郭を付ける。

【使用目的又は効果】

形成・修復時に隣接する歯を保護し、修復する歯に充填する修復材が適切な形になるように一般的輪郭を付けるために用いる。

【使用方法等】

<装着する時>

- ①本品[コンタクトマトリックス]の種類及びサイズを選びます。
- ②歯科用マトリックスリテイナ（販売名：コンタクトリングまたはメガリング）を選びます。又修復する歯牙の隣接面の湾曲部を回復できるように本品[コンタクトマトリックス]を装着します。
- ③修復する歯牙に合わせ、歯科用マトリックスリテイナ（販売名：コンタクトリングまたはメガリング）を選定します。（内向き又は外向き）
- ④歯科用マトリックスリテイナ（販売名：コンタクトリングまたはメガリング）を歯科用充填・修復材補助器具（販売名：コンタクトプライヤー）や汎用歯科用ラバーダムクランプ鉗子などで広げ装着します。
※一般的なウェッジングは必要ありません。
※別売品を併用する場合は、其々の添付文書をあわせてご参照ください。

<取り外す時>

- ①歯科用充填・修復材補助器具（販売名：コンタクトプライヤー）や汎用歯科用ラバーダムクランプ鉗子を用いて歯科用マトリックスリテイナ（販売名：コンタクトリングまたはメガリング）を外します。
- ②歯科用充填・修復材補助器具（販売名：メガグリップフォーセップス）を用いて、本品[コンタクトマトリックス]を外します。
※別売品を併用する場合は、其々の添付文書もあわせてご参照ください。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ①使用の際は、必ずラバーダムを装着してください。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ①無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①誤飲には十分注意すること。
 - ②本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
 - ③本品の使用により、発疹などの過敏症状があらわれた場合には、ただちに使用を中止すること。
 - ④歯肉および口腔内に痛みや傷又は腫れがある場合には、使用をしないこと。
 - ⑤長時間における使用は、歯肉や噛み合わせなどに影響を及ぼすことがあります。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 1) 直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造業者	ZEST ANCHORS LLC (ゼスト アンカーズ エルエルシー)
製造国	アメリカ合衆国