

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 (70908000)
ラミアチップ

【警告】

1. 切削中に破折し、人体を傷つける恐れがあるので、使用上の注意を厳守すること。
2. 過度の加圧で使用した場合には、発熱の原因にもつながり、人体を傷つける恐れがあるので、ソフトタッチ(適正作業加圧)を厳守すること。

【禁忌・禁止】

1. 許容回転数を超えて使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

名称	形状	軸色	ダイヤモンド粗さ(μ)
LTA-150		赤	150
LTA-100		緑	100
LTA-75		金	75
LTA-50		黄	50
LTA-30		白	30
LTA-15		紫	15
LTA-S150		赤	150
LTA-S100		緑	100
LTA-S75		金	75
LTA-S50		黄	50
LTA-S30		白	30
LTA-S15		紫	15
LTA-E50		黄	50
LTA-C50		黄	50
LTA-D150		赤	150
LTA-D100		緑	100
LTA-D50		黄	50
LTA-D30		白	30
LTA-T50		黄	50
LTA-T30	白	30	

材質:ステンレス鋼、ダイヤモンド、ポリアミド

【使用目的又は効果】

本品は、専用の上下運動ストレート・ギアードアングルハンドピースまたは専用の歯科研削器材(プロフィンハンド)等に装着し、上下させることにより、補綴物等の研削に用いる。

【使用方法等】

- 1) 脱着方法
 - ※専用の上下運動ストレート・ギアードアングルハンドピースに装着する場合は、完全に停止している状態で行うこと。

<装着方法>

用途に合わせて選択した本品を専用の上下運動ストレート・ギアードアングルハンドピースまたは専用の歯科研削器材(プロフィンハンド)等のヘッド部にまっすぐ差し込みます。

<取り外し方法>

本品を専用の上下運動ストレート・ギアードアングルハンドピースまたは専用の歯科研削器材(プロフィンハンド)等からまっすぐに引き抜きます。

※本品軸部がヘッド部背面から出ている場合は、軸部をバー抜き(プッシャー)で押してから引き抜きます。

2) 操作方法

- 必要に応じて注水してください。
- ※別売品を併用する場合は、其々の添付文書をあわせてご参照ください。

《専用の上下運動ストレート・ギアードアングルハンドピース許容回転数》

チップ部：5,000～10,000rpm

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ①専用の上下運動ストレート・ギアードアングルハンドピースまたは専用の歯科研削器材(プロフィンハンド)等の脱着については、メーカーの使用法に従い、軸部が完全に装着されていることを確認すること。
- ②患者に使用する前に、予め口腔外で作動させ軸ブレのないことを確認すること。
- ③対象物に強く押し付けず、軽く押し当てて使用すること。
- ④専用の上下運動ストレート・ギアードアングルハンドピースに装着する場合は、モーターの回転が完全に停止したことを確認した後、本品の脱着を行うこと。
- ⑤本品の許容回転数を超えないこと。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ①本品は、専用の上下運動ストレート・ギアードアングルハンドピースまたは専用の歯科研削器材(プロフィンハンド)に装着すること。
 - ②許容回転数を超えて使用しないこと。
 - ③無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。変形する可能性がございます。
 - ④初めて使用する前に滅菌を行うこと。
 - ⑤ケミクレープ滅菌やEOGによる滅菌もしくは薬剤による消毒は行わないこと。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①本品の使用にあたっては、外観上の損傷各部位の緩み等がないか確認を行うこと。
 - ②感染を予防するために必ず保護グローブや保護メガネ、保護マスクを使用し、飛散したペーストなどから眼・口・鼻等を保護すること。
 - ③正常かつ安全に作動することなどを確認するため、後述の方法に従って保守点検を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 1) 直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
- 2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

[清掃・滅菌条件等]

- ①目詰まりがある場合は、本品を専用の上下運動ストレート・ギアードアングルハンドピースまたは専用の歯科研削器材(プロフィンハンド)等に装着し、研磨面を専用クリーニングストーンに沿わせ、2、3秒間動かします。
- ②超音波洗浄した後、十分乾燥させてから滅菌パック等に入れ、オートクレープ滅菌(134℃、3分以上)を行ってください。滅菌のためのパック包装は、確実に滅菌できるように設定すること。乾燥工程は行わないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造業者	Dentatus AB (デンタタス エイビー社)
製造国	スウェーデン