

接着に重要な乾燥に！

ボンドエアーズ

ポストホールや
小さい窩洞にも
到達する細いノズル



歯科医院様参考価格
¥28,000

歯科治療のあらゆる乾燥行程に！

持ち運びできるので便利！




ご使用例

訪問診療時の乾燥行程に

ポストホールに


ポストホール底部からのブローができます。

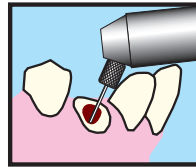

※根管治療時に、根管内根尖部に吹きつけることは避けてください。


小さい窩洞に

MIコンセプトに即した小さい窩洞にも到達します

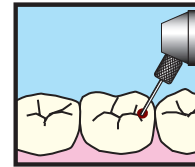

印象採取時に

シリコン印象材注入後のブローで印象をより精密に

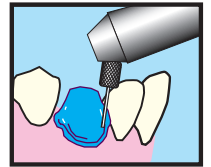

※寒天印象材には使用しないでください。

ボンドエアーズ キット内容

- ・ボンドエアーズ本体 1台
- ・マイクロエッチブロー缶 1本
- ・接続金具 1個
- ・ホース 2m 1本
- ・スเปアースズル (口径外径1mm、長さ11mm) 2個

一般医療機器
医療機器届出番号 13B3X00243000001

- ※スぺアヘッドおよびスぺアースズルは、オートクレーブ滅菌可。
- ※本体はアルコール消毒のみ。
- ※マイクロエッチブローは液化ガスです。
成分：HFC 134a
内容量：250g
噴射前圧力 (20℃)：約3.85気圧 (55psi)
使用回数目安：約2000回 (2～3秒噴射)
- ※ご使用前に製品付属の取扱説明書を読み、正しくご使用ください。

本紙に掲載されている価格は2015年1月21日のもの (税抜) です。製品の的外観および仕様は予告なく変更することがあります。

製造販売業者 (有) 秋山歯科器具製作所

販売業者



本社：〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL.03-3836-1871 FAX.03-3832-3810
大阪営業所：〒564-0053 大阪府吹田市江の木町5-3
レーベンハウス江坂405号
TEL.06-6170-8239 FAX.06-6170-8249
<http://www.morimura-jpn.co.jp>

2015.01.21

●製品に関するご用命は