


II級窩洞修復用 マトリックスシステム オールインワンパッケージ

各種少量の
キット組

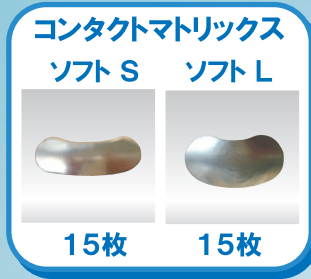

使いやすい
仕切ケース入



コンタクトマトリックス システム・ スターターキット

歯科医院様参考価格

¥23,500


コンタクトリング
コンタクトマトリックス
コンタクトウェッジ
コンタクトプライヤーの
キット

- 内容：
- ・コンタクトリング（内向き 1個、外向き 1個）
 - ・コンタクトマトリックス（ソフト S 15枚、ソフト L 15枚）
 - ・コンタクトウェッジ（S グリーン 15個、M イエロー 15個、L ブルー 15個）
 - ・コンタクトプライヤー 1本


コンタクトマトリックスシステム 使用方法




コンタクトマトリックスの種類を選び、プレイスメントツィザー等を用いて保持します。

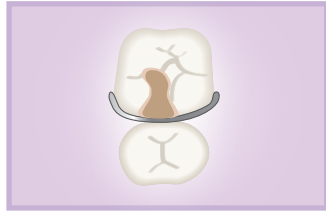


コンタクトマトリックスを修復する歯牙の隣接面の湾曲部を回復できるように装着します。

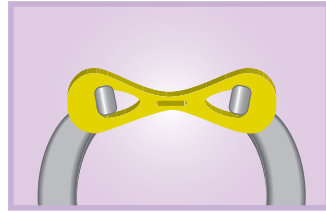


コンタクトウェッジの種類を選び、左右の穴にコンタクトプライヤー等の先端部を差し込みます。

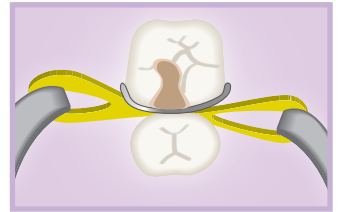


コンタクトウェッジを広げて伸ばします。

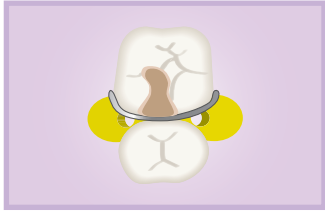


コンタクトウェッジを歯間部に装着して、コンタクトマトリックスを固定します。

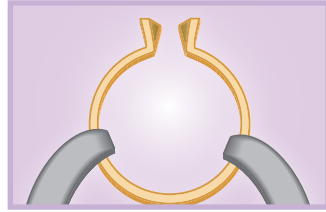

必要に応じ、コンタクトリングの種類を選び、コンタクトプライヤー等を用いて保持します。

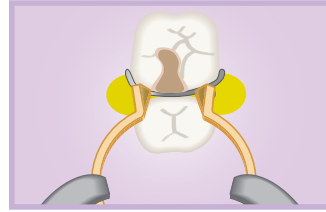

コンタクトリングを広げ、コンタクトウェッジの上部や背部に装着します。

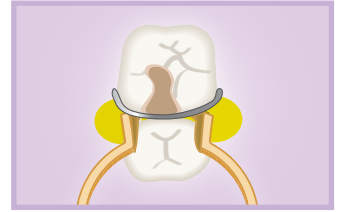

固定後。

コンタクトマトリックス関連製品

DANVILLE MATERIALS

コンタクトマトリックス

半ドーム状の豊隆が付与されたステンレス鋼製の薄型マトリックスです。隣接面形態に適合しやすく充填時の圧力にも付与した形状を維持します。

<p>ソフト L</p> <p>幅:約14mm×高さ:約7mm 厚さ:約0.038mm ステンレス鋼製 ■100枚入</p>	<p>ソフト S</p> <p>幅:約14mm×高さ:約5mm 厚さ:約0.038mm ステンレス鋼製 ■100枚入</p>	<p>ハード L</p> <p>幅:約14mm×高さ:約7mm 厚さ:約0.058mm ステンレス鋼製 ■100枚入</p>	<p>ハード S</p> <p>幅:約14mm×高さ:約5mm 厚さ:約0.058mm ステンレス鋼製 ■100枚入</p>	<p>ウルトラソフト L</p> <p>幅:約14mm×高さ:約7mm 厚さ:約0.038mm ソフトステンレス鋼製 ■100枚入</p>	<p>ウルトラソフト S</p> <p>幅:約14mm×高さ:約5mm 厚さ:約0.038mm ソフトステンレス鋼製 ■100枚入</p>	<p>サブジンジバル</p> <p>幅:約14mm×高さ:約9.5mm 厚さ:約0.038mm ステンレス鋼製 ■50枚入</p>
---	---	---	---	--	--	--

■ソフト L、ソフト S、ハード L、ハード S 歯科医院様参考価格 各 ¥8,900 ■ウルトラソフト L、ウルトラソフト S 歯科医院様参考価格 各 ¥10,800 ■サブジンジバル 歯科医院様参考価格 ¥7,700
■一般医療機器 医療機器届出番号13B1X10098010004

コンタクトリング

歯科用マトリックスリテイナです。把持脚が内向きと外向きの2種類があります。

<p>内向き</p>	<p>外向き</p>
-------------------	-------------------

幅:約19mm
全体の高さ:約10mm
把持脚の高さ:約5mm
■内向き・外向き 各1個入
■内向き 2個入
■外向き 2個入
歯科医院様参考価格 各 ¥5,000
■一般医療機器 医療機器届出番号13B1X10098010003

メガリング

コンタクトリングより幅広い歯科用マトリックスリテイナです。把持脚が内向きと外向きの2種類があります。

<p>内向き</p>	<p>外向き</p>
-------------------	-------------------

幅:約22mm
全体の高さ:約13mm
把持脚の高さ:約7mm
■内向き・外向き 各1個入
■内向き 2個入
■外向き 2個入
歯科医院様参考価格 各 ¥9,400
■一般医療機器 医療機器届出番号13B1X10098010006

コンタクトウェッジ

マトリックスに穏やかな圧力を加えて固定する弾性ポリウレタン製ウェッジです。マトリックスと隣接面との間にスペースを生じませんので、マトリックスと歯質の間からフロアブルレジン等が流れ出す心配がありません。

<p>S グリーン</p> <p>高さ:2.0mm</p>	<p>M イエロー</p> <p>高さ:2.6mm</p>	<p>L ブルー</p> <p>高さ:3.2mm</p>
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

■コンタクトウェッジ(L ブルー) 85個入
■コンタクトウェッジ(M イエロー) 85個入
■コンタクトウェッジ(S グリーン) 85個入
歯科医院様参考価格 各 ¥8,900
■コンタクトウェッジ(キット)
内容:コンタクトウェッジ(S グリーン 85個、M イエロー 85個、L ブルー 85個)
歯科医院様参考価格 ¥22,600
■コンタクトウェッジ(イントロキット)
内容:コンタクトウェッジ(S グリーン 30個、M イエロー 30個、L ブルー 30個)
歯科医院様参考価格 ¥7,700
■一般医療機器 医療機器届出番号13B1X10098010001

コンタクトマトリックス (キット)

コンタクトマトリックスとコンタクトリングのキットです。
内容:
・コンタクトリング (外向き・内向き)各1個
・コンタクトマトリックス (ソフトL・ソフトS)各50枚
歯科医院様参考価格 ¥12,000
■一般医療機器 医療機器届出番号13B1X10098010004

メガグリップフォーセップス

コンタクトマトリックス等を取り外す際に使用するフォーセップスです。マトリックスをしっかりと保持します。
■1本入
歯科医院様参考価格 ¥13,000
■一般医療機器 医療機器届出番号13B1X10098010005

コンタクトプライヤー

開口度が広く、コンタクトウェッジ等の脱着に適しているプライヤーです。
■1本入
歯科医院様参考価格 ¥13,000
■一般医療機器 医療機器届出番号13B1X10098010002

コンタクトプライヤープラス

開口度が狭く、コンタクトリング、メガリング等の脱着に適しているプライヤーです。
■1本入
歯科医院様参考価格 ¥13,000
■一般医療機器 医療機器届出番号13B1X10098010022

※本紙に掲載されている価格は2015年1月21日のもの(税抜)です。製品の仕様および仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徵、ご使用方法などに関するお問い合わせは
お客様窓口フリーダイヤル

TEL.0120-33-8020 FAX.0120-66-8020

製造販売業者 EIKO CORPORATION

販売業者 株式会社モリムラ

2015.01.21

株式会社エイコー
〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL.03-3834-5777 FAX.03-3837-2655

株式会社モリムラ
〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL.03-3836-1871 FAX.03-3832-3810
http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は