

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 (38782000)
コンタクトプライヤー

【禁忌・禁止】

1. 目的以外の使用禁止：歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
2. 注意事項の厳守：器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
3. 異常時の使用禁止：劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4. 改造の禁止：器具の形態変更や改造等はないこと。

【形状・構造及び原理等】

材質：ステンレススチール
 <原理>この原理により、力点（グリップ部）に力を加え作用点（先端部）で作業を行う。

【使用目的、効能又は効果】

<使用目的>
 本品は口腔内で修復材又は成形器具を取り付けるために用いる歯科器具である。

【操作方法又は使用方法等】

- <装着する時>
1. 本品[コンタクトプライヤー]の先端部を歯科用マトリックスリテイナ（販売名：コンタクトリングまたはメガリング）又は歯科用マトリックスウェッジ（販売名：コンタクトウェッジ）のフープ部に合わせます。
 2. 本品のグリップを持ち、（販売名：コンタクトリングまたはメガリング）又は（販売名：コンタクトウェッジ）把持部を広げます。
- ※広げ過ぎにご注意下さい。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ①使用の際は、必ずラバーダムを装着してください。
- ②歯科用マトリックスリテイナ（販売名：コンタクトリングまたはメガリング）は、広げ過ぎにより元の状態に戻らなかったり、十分に機能しなくなる場合があります。リングが元の状態に戻らない場合は、三嘴鉗子等を用い締め戻してご使用ください。使用回数、時間と共に劣化しますので、その際には交換してください。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ①本品の使用にあたっては、滅菌された状態で使用すること。
 - ②損傷、変形等のあるものは使用しないこと。
 - ③無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
 - ④本品は、本書に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ⑤本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2) 重要な基本的注意

- ①本品の使用にあたっては、外観上の損害、各部位の緩み等がないか、確認を行うこと。
- ②正常かつ安全に作動すること等を確認するため、後述の方法に従って保守点検を行うこと。
- ③使用にあたっては、保護グローブ、保護メガネ、保護マスク等を使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

[貯蔵・保管方法]

- 1) 本品は、40℃未満（但し結露しない）にて保管すること。
- 2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

しばらく使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に必ず本品が正常かつ安全に作動することを確認すること。

[滅菌条件等]

- ・使用後は速やかに器具に付着した唾液等を除去すること。
 - ・本品は、外層を拭き、十分乾燥させてから滅菌パック等に入れ、オートクレーブ滅菌（121℃、20分以上）すること。
 - ・薬液洗浄を行うときは、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。
- 薬剤の種類によっては、金属又は樹脂素材に影響を及ぼすことがある。

【包装】

コンタクトプライヤー 1本入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社エイコー
 住所 東京都台東区上野 3-17-10
 電話番号 03-3834-5777
 FAX 番号 03-3837-2655
 製造国 アメリカ合衆国
 製造業者 DANVILLE MATERIALS (ダンビル マテリアルズ社)