

歯面を
コンディショニングする
新しいタイプの
歯面研磨材



10 mL

歯科医院様参考価格
¥ 3,900

クエン酸配合 歯面研磨材


PerioREFRESH

ペリオリフレッシュ



ペリオリフレッシュ

歯面を コンディショニングする 新しいタイプの 歯面研磨材

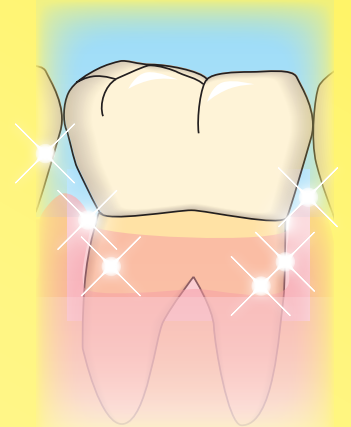


特徴

ペリオリフレッシュは、生体親和性の良い主成分『クエン酸』を独自の製法にて配合。
歯周ポケット内にも使用でき、バイオフィーム、歯石等の汚染物質を浮き上げらせ、
ダメージの少ない歯面清掃・研磨を容易にし、滑沢な表面にコンディショニングすることができます。


歯石除去後の抜去歯牙の象牙質SEM像 (×5,000)

歯石除去後

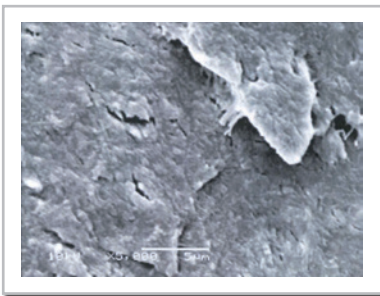

歯根面の表面は粗造で、
機械的除去にて生じるス
メア・デブリ（汚染削片）
が観察できます。
歯周ポケット内の歯根面
に付着したバイオフィーム、
歯石等の汚染物質を
完全に清掃することは、
容易ではないと認識され
ています。

ペリオリフレッシュ使用後

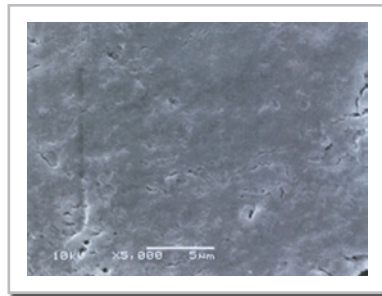


歯根面の表面はスメア・
デブリ（汚染削片）が除
去され、滑沢になってい
ることがわかります。
ペリオリフレッシュは、
歯面とバイオフィーム、
歯石等の汚染物質の間や
歯石の小さい空隙に浸透
し、汚染物質の除去を容
易にします。

自社データ


基本ステップ

① ペリオリフレッシュ塗布 15秒間以上放置

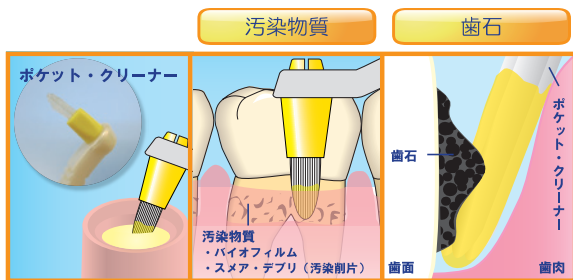


ペリオリフレッシュをポケットクリーナー等にて
塗布し、15秒間以上放置します。

② 歯面清掃・研磨

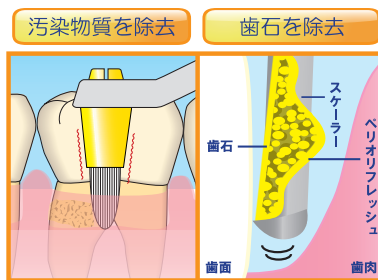

インスツルメンテーションまたは
ポケットクリーナー等にて、歯面
清掃・研磨します。

③ 洗浄

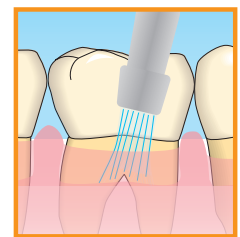

洗浄します。

本紙に掲載されている価格は2021年8月のもの（税抜）です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL.0120-33-8020 FAX.0120-66-8020

MORIMURA

株式会社 モリムラ

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は