


清掃方法

マクロキャブプラスは定期的に清掃してください。
粉塵が極度に溜まると、フィルターがつまり効果的に集塵できなくなります。

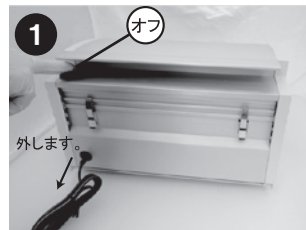


オン・オフスイッチをオフにして、電源プラグを抜き、電源コードを本体背面の電源コード差込部から外します。



本体背面の2つのラッチを開放します。



シールドを外します。

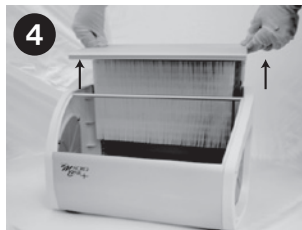

ハンドルをしっかりと持ちし、キャビネットからフィルター枠と本体トップを引き出します。
※内部のコード類が引っ張られないように注意しながら、慎重に引き出してください。



キャビネット内の清掃をします。
フィルターは、フィルター枠をゴミ箱の縁に軽く打ち充て、粉塵を振り落とし、清掃します。
※フィルターをフィルター枠より取り外して清掃する場合は、粉塵を落とした後、フィルター枠にフィルターを元のとおりに確実にセットしてください。



フィルター枠と本体トップをキャビネットに元のとおりに戻します。
※フィルタースライド（オレンジ色のゴム）を丁寧に扱い、内部のコード類が引っ張られないように注意しながら、慎重に元のとおりに戻してください。
※キャビネットの天蓋の前方部下側にある溝にフィルターをセットします。



キャビネット本体を横断しているロッドに合わせます。確実に組み上がったことを確認してください。



本体背面の2つのラッチを施錠します。シールドを取り付けます。電源コードを接続します。
※動作を確認してください。

※フィルターを水洗いすることはできません。
※フィルターが破れた場合、穴が空いた場合、または清掃した後でもエアの流れるが著しく悪い場合は新しいフィルターと交換してください。

フィルターの交換方法



フィルタースライド（オレンジ色のゴム）を丁寧に扱い、少し曲げ、フィルター枠より取り外します。



新しいフィルターのフィルタースライドを元の位置に戻し、下部に差し込み、少し曲げ、上部のフィルター枠にフィルタースライドを装着します。

交換用部品（別売）

マクロキャブプラスは、交換用に下記の商品を取り揃えています。

- マクロキャブプラス用 シールド(#93960) 10枚入
- マクロキャブプラス用 フィルター(#91557) 1個

MACRO CAB⁺

大型集塵システム 取扱説明書



このたびはマクロキャブプラスをお買い上げくださいます。
誠にありがとうございます。
本品のご使用に先立ちましては、本取扱説明書を必ずお読みください。

マクロキャププラスは、吸引とフィルター、明るいライトを備えており、持ち運びできることから、技工室はもとより、チェアサイドでのサンドブラストやハンドピースによる技工時の集塵に最適です。

注意事項

- ① 水のかからない場所に設置すること。
- ② 気圧、温度、湿度、風通し、日光、埃、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に設置すること。
- ③ 傾斜、振動、衝撃など安定状態に注意すること。
- ④ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。
- ⑤ 電源は必ず十分な容量のある単独回路をとり、タコ足回線や細い延長コードの使用は絶対にしないこと。
- ⑥ 電源プラグのコンセント金属部分にほこりが付着している場合はよく拭き取ること。
- ⑦ 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず把持部を持って引き抜くこと。
- ⑧ 長時間ご使用にならない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。
- ⑨ 故障した時は、訓練を受けた有資格者以外は修理をしないこと。修理は専門家に依頼すること。
- ⑩ 本器は歯科用のみに使用して、説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑪ 電源プラグの接続時には、アース線を必ず接続すること。

仕様

寸法：幅：32.0 cm 奥行き：26.7 cm 高さ：20.0 cm
重量：4.2kg
使用電圧：100V 50/60Hz
外国製造業者：ZEST ANCHORS LLC（アメリカ合衆国）

用途

- サンドブラストの粉塵飛散防止
- 義歯調整の粉塵飛散防止
- 歯科技工物調整の粉塵飛散防止
- その他歯科医療、歯科技工時の粉塵飛散防止

同梱品の確認

同梱品がすべてそろっているかを確認してください。

マクロキャププラス 1台

ACアダプター 1個


シールド 4枚




電源コード 1本


(1枚は本体に取付済・交換用3枚)

各部名称

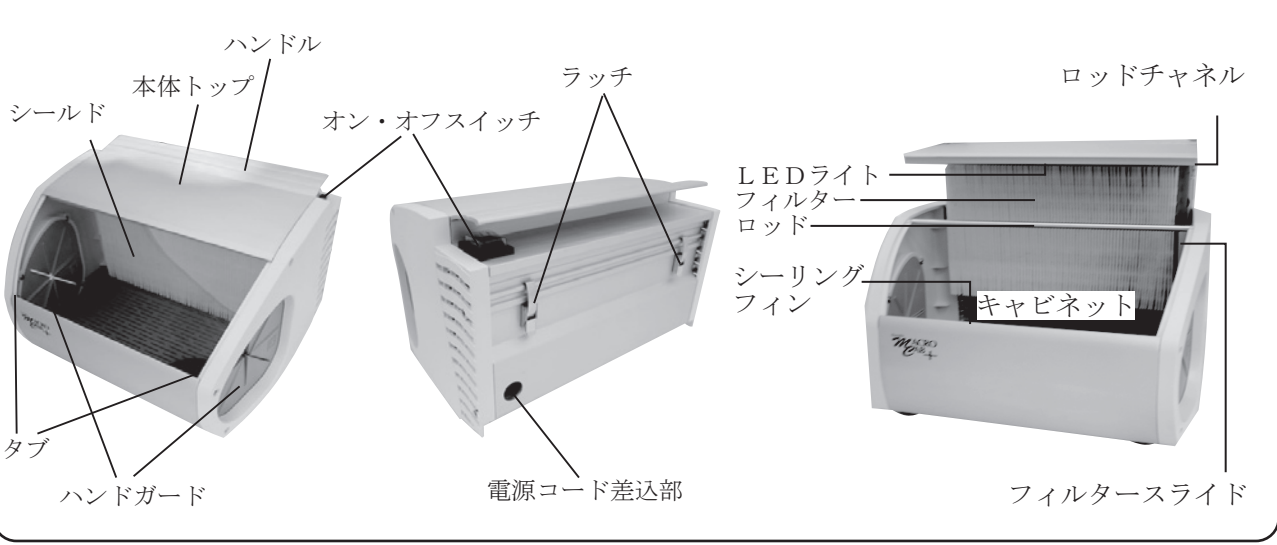

組み立て方

シールドの取付方法

- 1


表面および裏面の青色の表面保護膜を除去します。


- 2

シールド上部（幅広側）の両縁を、本体のメタルフレームの下にスライドさせて差し込みます。


- 3

シールドを少し曲げ、シールド下部両縁を本体のタブの下に入れます。

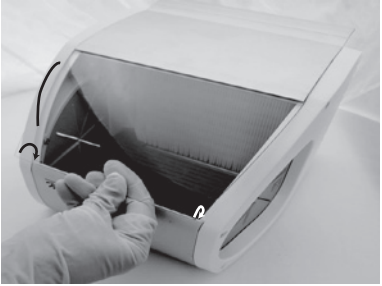
- 

※シールドを外した場合には、必ずシールドを戻してください。
※シールドは時間がたちますと曇ります。シールドの清掃の際には、布を湿らせて拭きます。ただし、必ずシールドに接触する部分の布が何も付着していないことを確認してください。何かが付着していると、拭くことによってシールドを傷つけてしまいますのでご注意ください。シールドが曇った場合、変形した場合は新しいシールドと交換してください。

電源コードの取付方法

- 1

電源コードをACアダプターに接続します。


- 2

ACアダプターを本体後部の電源コード差込部に接続します。



ご使用の前に、電源プラグを100V用コンセントに差し込みます。

使用方法

- 1

オン・オフスイッチで、照明と吸引をコントロールします。


- 2

指先をキャビネット内に挿入して使用します。



※技工作業部位とマイクロエッチャーⅡあるいはマイクロエッチャーⅡA（あるいはハンドピース）とそのコントロールのため、指先のみをキャビネット内に挿入してください。噴射先をキャビネットの後方フィルター側に向けて操作することで、効率よく粉塵をろ過できます。ハンドガード方向に向けた操作は、粉塵をキャビネット外に飛散させることがあります。