



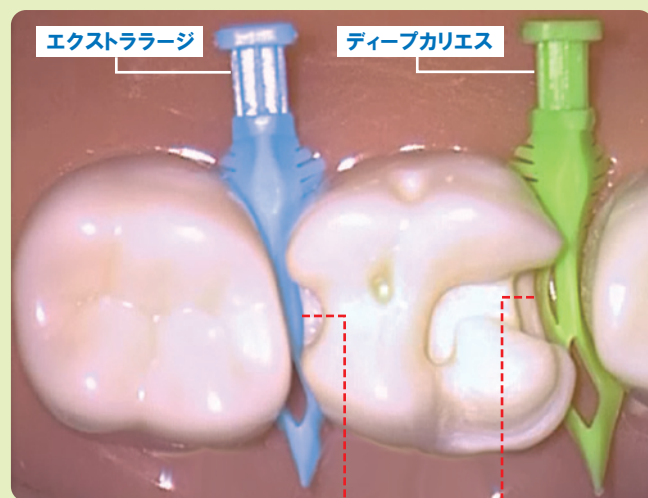

BIOCLEAR DIAMOND WEDGE

歯間部に容易に挿入でき、隣接面の解剖学的形態に適合する
精巧な歯科用ウェッジ

バイオクリアー ダイヤモンドウェッジ

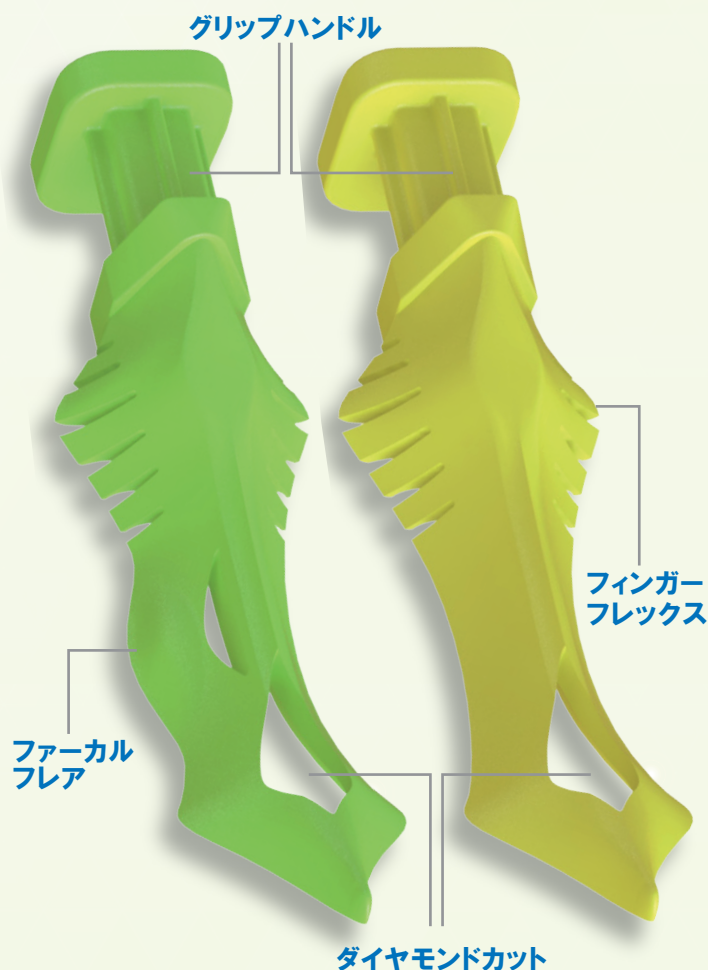

隣接面に密着 隣接面最深部に適合

- ◆ 先端部の**ダイヤモンドカット**により、歯間部への挿入時に効果的に閉じ、挿入後はウェッジが開放して、歯間乳頭を傷つけることなく、隣接面に密着して、抜けを防止します。
- ◆ **フィンガーフレックス**により、セクショナルリングの把持脚を容易に装着することができます。
- ◆ **グリップハンドル**は、ウェッジ装着および除去の際に、把持しやすい設計です。
- ◆ **ファーカルフレア**（フレア状の分岐部）は、深部カリエスの隣接面最深部に適合する設計です（ディープカリエスのみ）。



バイオクリアー ダイヤモンドウェッジ イントロキット

- | | |
|----|--------------------|
| 内容 | ◆ スモール ピンク 8個 |
| | ◆ ミディアム オレンジ 8個 |
| | ◆ ラージ イエロー 8個 |
| | ◆ エクストララージ ブルー 8個 |
| | ◆ ディープカリエス グリーン 8個 |

各種
少量の
キット

歯科医院様参考価格 **¥4,800**

バイオクリアー ダイヤモンドウェッジ



種類	全長	最大幅	高さ
スモール ピンク	16.7 mm	1.6 mm	1.3 mm
ミディアム オレンジ	17.0 mm	2.2 mm	1.5 mm
ラージ イエロー	17.3 mm	3.4 mm	2.0 mm
エクストララージ ブルー	17.5 mm	4.2 mm	2.1 mm
ディープクリアエス グリーン	17.7 mm	3.2 mm	1.9 mm

隣接面の複雑な形態に適合

ウェッジが隣接面に密着するため、余剰コンポジットレジンの流れを抑制し、コンポジットレジン修復後の形態修正等を短縮することができます。

簡単装着

先端部のダイヤモンドカットにより、ラバーダム装着時においても、ウェッジを歯間部に容易に挿入することができます。


抜けを防止

歯間部への挿入後は、ウェッジの弾性により開放して、ウェッジの抜け（ズレ／後退）を防止します。

強い歯間分離力

弾性があり、強い歯間分離力を維持します。

バイオクリアー ダイヤモンドウェッジは、歯間部への挿入時に効果的に閉じ、挿入後はウェッジが開放して、隣接面に密着します。

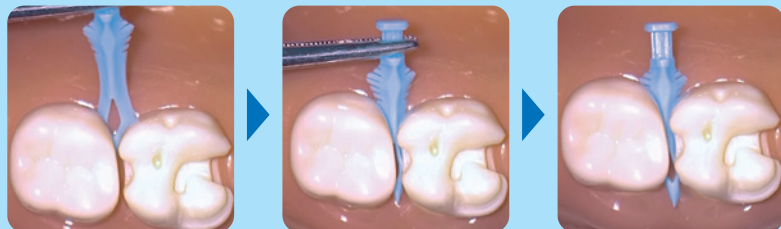

ディープクリアエスは、ファークルフレアを隣接面最深部側に向けて挿入します。



バイオクリアー ダイヤモンドウェッジ 臨床例



術前
下顎左側第二小臼歯MODインレーの再修復。



ラバーダム
メタルインレーおよび虫蝕象牙質の除去。



マトリックスとダイヤモンドウェッジの装着
ダイヤモンドウェッジによりマトリックスが歯肉側マージンに密着している。



術後
コンポジットレジン修復後。

※臨床写真ご提供：秋本歯科診療所（神奈川県横浜市ご開業） 秋本 尚武 先生

包装

- ◆ バイオクリアー ダイヤモンドウェッジ イントロキット 40個入 歯科医院様参考価格 ￥4,800
スモール ピンク、ミディアム オレンジ、ラージ イエロー、エクストララージ ブルー、ディープクリアエス グリーン 各8個入
- ◆ バイオクリアー ダイヤモンドウェッジ アソートキット 80個入 歯科医院様参考価格 ￥9,500
スモール ピンク、ミディアム オレンジ、ラージ イエロー、エクストララージ ブルー、ディープクリアエス グリーン 各16個入
- ◆ バイオクリアー ダイヤモンドウェッジ スモール ピンク 50個入 歯科医院様参考価格 ￥6,500
- ◆ バイオクリアー ダイヤモンドウェッジ ミディアム オレンジ 50個入 歯科医院様参考価格 ￥6,500
- ◆ バイオクリアー ダイヤモンドウェッジ ラージ イエロー 50個入 歯科医院様参考価格 ￥6,500
- ◆ バイオクリアー ダイヤモンドウェッジ エクストララージ ブルー 50個入 歯科医院様参考価格 ￥6,500
- ◆ バイオクリアー ダイヤモンドウェッジ ディープクリアエス グリーン 50個入 歯科医院様参考価格 ￥6,500

本紙に掲載されている価格は2016年1月のもの（税抜）です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL. 0120-33-8020 FAX. 0120-66-8020

製造販売業者



株式会社エイコー

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL.03-3834-5777 FAX.03-3837-2655

販売業者



株式会社モリムラ

本社：〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL.03-3836-1871 FAX.03-3832-3810
大阪営業所：〒564-0051 大阪府吹田市豊津町13-15
TEL.06-6170-8239 FAX.06-6170-8249
<http://www.morimura-jpn.co.jp>

●製品に関するご用命は

バイオクリアー
ダイヤモンドウェッジについての
動画はコチラから

