

シリコーン精密印象採得に さらば気泡

ディスペンサーガンから **ECOシリンジ2**へ



繊細な操作が可能な手のひらサイズ



負担を感じず震えることなく、スムーズな印象採得が可能です。



ご使用のカートリッジ型
シリコーン印象材用
ディスペンサーガンから
ECOシリンジ2に印象材の
必要量をラクラク
装填できます。

ECOシリンジ 2

ECOシリンジ2は、小型のミキシングシリンジのため、手に負担がかかりません。先端チップの角度が適切で細く、360°回転するため、狭くてアクセスしにくい部位にも容易にアクセスできます。

特徴

- 予め印象材の必要量を装填できるため、印象材のムダを省きます。
- 印象材を装填したシリンジは保管でき、練和時間や操作時間を短縮します。

18Gレギュラーチップ



先端チップ 口径18G 長さ11.2mm

20本入 歯科医院様参考価格 ¥3,000
100本入 歯科医院様参考価格 ¥14,000

使用方法

1 使用準備

ミキシングシリンジのタブの位置が、ダブルシリンジのLOADポジションの位置にあることを確認します。

※印象材を装填するまで、ミキシングシリンジを取り外したり、回さないでください。

2 印象材の装填

ダブルシリンジにカートリッジタイプの印象材の先端部を差し込み、密接に適合させ、気泡が混入しないように、印象材を装填します。

印象材の使用量の目安

半分(約20mm)	クラウン1個分
最大(約45mm)	クラウン3個分

※印象材を最大装填する場合は、上部より約5mmスペースを残してください。それ以上装填しますと、プランジャーを差し込んだ際に印象材が溢出する可能性があります。

3 プランジャーの装着

ダブルシリンジにプランジャーをまっすぐに差し込み、印象材が上部に位置するまで、ゆっくりと押しします。

※プランジャーを不注意に押して、印象材が押されないように注意してください。

印象材を装填したシリンジを保管する場合

ミキシングシリンジを時計方向に90°回し、タブの位置を逆V字型ポジションに位置させて、印象材を保管することができます。

4 印象採得

使用直前に、ミキシングシリンジを時計方向に、タブの位置が三角型ポジションを超え、“カチッ”と音がする最後まで回します。

先端チップを適用部位に合わせて、プランジャーを押し、練和された印象材を適用します。

※印象採得の前に試し出しを行って練和状態をご確認後、印象採得を行ってください。

※本品は、カートリッジタイプの歯科用ゴム質弾性印象材（混和比1:1）粘度の区分 タイプ3：低粘度（主としてシリンジ 一般医療機器 歯科用練成器具 医療機器届出番号13B2X10359010039 注入にて使用するもの）、歯科用樹脂系模型材等に使用する歯科用ミキシングシリンジです。 製造業者：ZEST ANCHORS LLC（ゼスト アンカーズ エルエルシー） 製造国：アメリカ合衆国

本紙に掲載されている価格は2022年9月21日のもの（税抜）です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL. 0120-33-8020 FAX. 0120-66-8020

MORIMURA

株式会社モリムラ

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

● 製品に関するご用命は