

モックアップでも



魅せる



REVEAL

リビール

接着性ベニアプロビジョナルレストレーションシステム



本システムは、リベールコンポジットレジンならびにクリアマトリックスからなり、
 Dr.Edward A.McLaren(UCLA審美歯科卒後研修センター長)がビスコ社と共同開発した審美修復時に用いるモックアップ材料です。
 最終補綴物を装着するまでの中・長期の暫間修復期間でも維持できる耐久性を有しています。
 暫間修復期間中において患者が満足できる審美性を追求した材料で、最適な口腔機能性を精密に把握することができ、高精度な最終補綴物の装着に寄与します。

複模型用親水性ビニルシリコン印象材 EZ-COPY クリアマトリックス



EZ-COPY クリアマトリックスは、VPS（ビニルポリシロキサン）を主成分とした暫間修復物作成に用いる親水性ビニルシリコン印象材です。細部を明瞭に印象採得できます。透明の印象材のため、注入したフロアブルコンポジットレジン『リベール』を口腔内外にて光重合することができます。

物理的特性 ※石膏模型上
 操作時間 2分 硬化時間 4分



※本品は、2020年3月より、印象材の透明度を、よりクリアに変更させていただきましたが、本パンフレットの臨床写真は旧製品を使用しています。

口腔外準備



術前。



診断用ワックスアップ模型を作成します。



既製透明トレーもしくは個人トレーにクリアマトリックスを注入します。



クリアマトリックスを注入した既製透明トレーに診断用模型を正確に適合させます。



硬化するまで保持します。



クリアマトリックスによる印象面。余剰クリアマトリックスをトリムし除去します。

審美・暫間修復用光重合型フロアブルコンポジットレジン リベール



高強度
耐久性
操作性



リベールは、光重合型審美・暫間修復用フロアブルコンポジットレジンです。クリアマトリックスに注入しやすいフロアブル特性を有しながら、ナノフィラーが配合されており、マイクロハイブリッドコンポジットレジンと同等の物理的特性、研磨性を有しています。光重合型のため、化学重合型と比較して重合時間を短縮できます。シリンジタイプのため、操作性に優れています。追加築盛およびリペアが可能です。

物理的特性
 引張強さ 49MPa
 圧縮強さ 333MPa
 曲げ強さ 111MPa
 曲げ弾性率 6.1Gpa
 バーコル硬さ 94/93 (TOP/BOTTOM)
シェード A1、ブリーチ
光照射時間 20秒間 (500mW/cm²)


口腔内作業



暫間期間に応じて、スポットエッチングします。



接着部位以外および歯肉縁等に分離材を適用します。接着部位に接着材の製造業者の指示に従って、接着処理を行います。

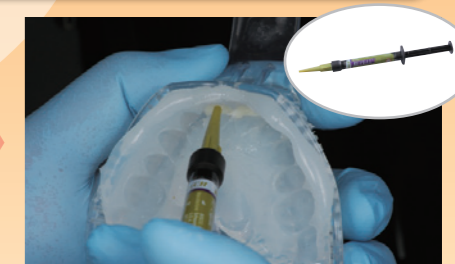

リベールをクリアマトリックスに注入します。



リベールを注入した既製トレーを口腔内の正確な位置に適用し、リベールを各歯面あたり各20秒間光照射します。



既製トレー撤去後。形態修正および研磨します。



術後。

臨床写真ご提供: 代官山アドレス歯科クリニック 大河 雅之 先生

【マクラレン先生はBonded Functional Esthetic Prototype (BFEP) (接着機能審美性プロトタイプ) をモックアップ、テンポラリー、プロビジョナルなど異なる新しい歯科用語として提唱しています。】

リビールスターターキット（ミニ）



●リビールスターターキット(ミニ A1)

内容:リビール(シリンジ A1)1本、リビールチップ 3本、EZ-COPY クリアマトリックス(カートリッジ 48mL) 1本
EZ-COPY クリアマトリックス(ミキシングチップ) 3本、セレクトHVEッチ(シリンジ 5g) 1本
シリンジチップ(ダークブルー 22G)15本、オールボンドユニバーサル(0.5mL) 1本
アプリケーター(オレンジ レギュラー) 5本、ミキシングウェル(ディスプレイザブル 2穴) 3個

●リビールスターターキット(ミニ プリーチ)

内容:リビール(シリンジ プリーチ)1本、リビールチップ 3本、EZ-COPY クリアマトリックス(カートリッジ 48mL) 1本
EZ-COPY クリアマトリックス(ミキシングチップ) 3本、セレクトHVEッチ(シリンジ 5g) 1本
シリンジチップ(ダークブルー 22G)15本、オールボンドユニバーサル(0.5mL) 1本
アプリケーター(オレンジ レギュラー) 5本、ミキシングウェル(ディスプレイザブル 2穴) 3個

歯科医院様参考価格:各 ¥5,900

リビール



●リビール(シリンジ A1 2本入)

内容:リビール A1 1.5g×2本
リビールチップ 2本

●リビール(シリンジ プリーチ 2本入)

内容:リビール プリーチ 1.5g×2本
リビールチップ 2本

歯科医院様参考価格:各 ¥9,000

EZ-COPY クリアマトリックス



内容:EZ-COPY クリアマトリックス
カートリッジ 48mL×2本
ミキシングチップ×6本

歯科医院様参考価格: ¥5,500

関連製品

オールボンドユニバーサル



内容

・オールボンドユニバーサル(6mL) 1本

歯科医院様参考価格: ¥12,500

セレクトHVEッチ



内容

・セレクトHVEッチ(シリンジ 5g) 1本
・シリンジチップ(ダークブルー 22G) 15本

歯科医院様参考価格: ¥2,500

リビールスターターキット:医療機器認証番号:228AGBZX00050000 管理医療機器 歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ
リビール:医療機器認証番号:227AGBZX00103000 管理医療機器 歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ
EZ-COPY クリアマトリックス:医療機器届出番号:13B2X10359120002 一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料、歯科咬合採得用材料
オールボンドユニバーサル:医療機器認証番号:225AGBZX00057000 管理医療機器 歯科用象牙質接着材、歯科セラミックス用接着材料、歯科金属用接着材料、
歯科レジン用接着材料、歯科接着・充填材料用表面硬化保護材、歯科用知覚過敏抑制材料
セレクトHVEッチ:医療機器認証番号:225AGBZX00067000 管理医療機器 歯科用エッチング材

本紙に掲載されている価格は2020年3月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル



TEL.0120-33-8020 FAX.0120-66-8020



〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-28-10-3F
TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351
<http://www.morimura-jpn.co.jp>

●製品に関するご用命は