

インダイレクトボンディング用親水性ビニルシリコン印象材

EZ-COPY オーソクリア

インダイレクトボンディング (間接ブラケット接着) 例



特徴

- インダイレクトボンディングシステム (間接ブラケット接着) に使用することができる親水性ビニルシリコン精密印象材です。
- 透明な印象材のため、光重合型矯正用ボンディング材を用いたブラケット接着時に、トレー上から光照射を行うことができます。

物理的特性

※作業時間、硬化時間は石膏模型上

作業時間	2分	硬化時間	4分
シヨアA硬さ	52 ± 2°	寸法変化	< 0.2%

EZ-COPY オーソクリアのみを使用する場合



1. 石膏模型を作成します。



2. 石膏模型上にブラケット配置用の基準線(長軸)を記入します。




3. 石膏模型上の垂直高さを測定し、基準線を記入します。



4. ブラケットを正確な位置に仮着します。



5. 石膏模型上にEZ-COPY オーソクリアを注入し、トランスファートレーを作製します。

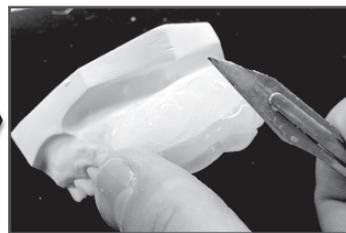


6. EZ-COPY オーソクリアの硬化後、余剰部分をトリミングし、石膏模型からEZ-COPY オーソクリアを外します。



7. EZ-COPY オーソクリア内にブラケットが収まっていることを確認し、余剰部分をトリミングします。



8. ブラケットの接着面を清掃します。

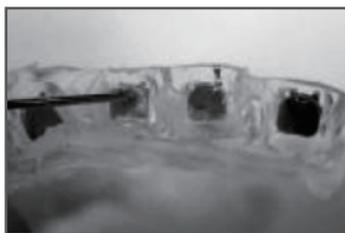

9. ブラケットの接着面に光重合型矯正用ボンディング材を塗布します。



10. 歯面清掃後、光重合型矯正用ボンディング材の製造者の指示に従って接着面を接着処理します。



11. トランスファートレーを歯牙にセットします。




12. 光重合型矯正用ボンディング材を光重合します。トランスファートレーを外し、余剰の光重合型矯正用ボンディング材を除去します。

吸引加圧成型用シートを併用する場合


吸引加圧成型用シートを用いて間接ブラケット接着用トランスファートレーを作製する前に、石膏模型上に仮着したブラケット周辺をEZ-COPY オーソクリアでブロックアウトすることにより、トランスファートレーの作製後、石膏模型からトランスファートレー取り外す際に、EZ-COPY オーソクリア内にブラケットが収まり、容易に取り外すことができます。トランスファートレーを歯牙にセット後、トランスファートレー上から光照射を行うこともできます。ブラケット接着後、EZ-COPY オーソクリアを容易に取り外すこともできます。




1. 石膏模型を作製します。

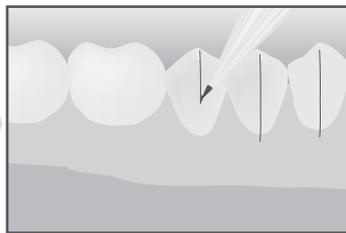


2. 石膏模型上にブラケット配置用の基準線(長軸)を記入します。

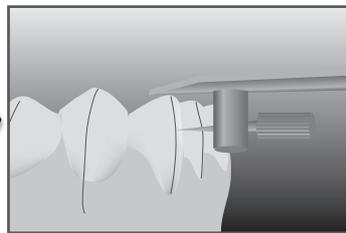


3. 石膏模型上の垂直高さを測定し、基準線を記入します。

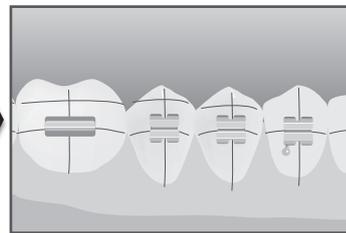


4. ブラケットを正確な位置に仮着します。

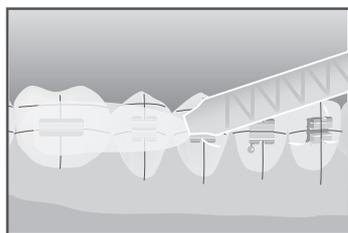


5. EZ-COPY オーソクリアでブラケットと歯面を覆い、ブロックアウトします。

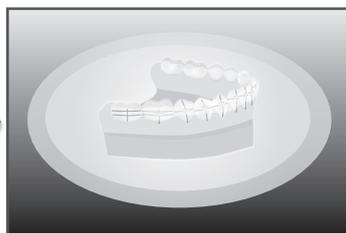


6. 通法に従って、吸引加圧成型用シートを用いて、バキュームアダプタ等でトランスファートレーを作製します。

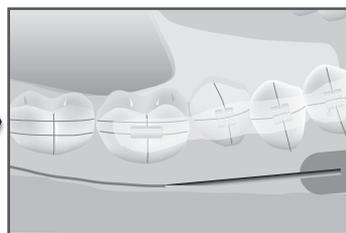


7. トランスファートレーをトリミングし、トレーを模型から外します。

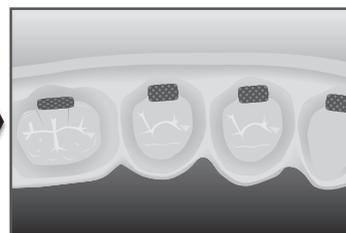


8. トレー内にEZ-COPY オーソクリアとブラケットとが収まっていることを確認します。

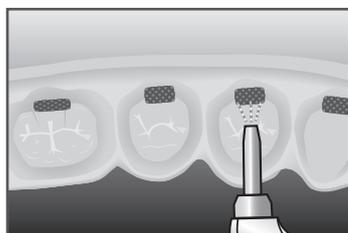


9. 必要に応じて、ブラケットの接着面をサンドブラスト処理します。

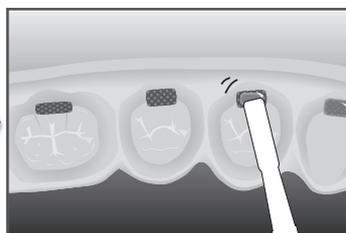

10. ブラケットの接着面に光重合型矯正用ボンディング材を塗布します。

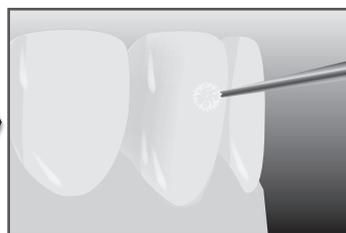


11. 歯面清掃後、光重合型矯正用ボンディング材の製造者の指示に従って接着面を接着処理します。

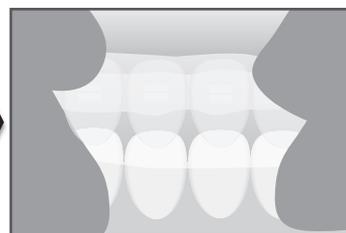


12. トランスファートレーを歯牙にセットします。




13. 光重合型矯正用ボンディング材を光重合します。

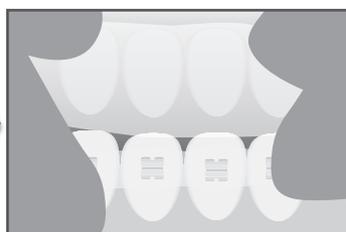

14. トランスファートレーを外します。

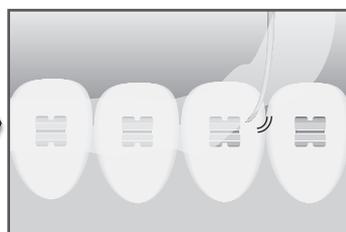

15. EZ-COPY オーソクリアを外し、余剰の光重合型矯正用ボンディング材を除去します。

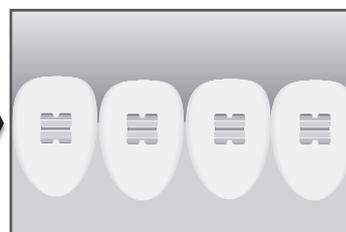

16. ブラケット接着後。

併用する医療機器の使用方法につきましては、各製品の医療機器添付文書に従ってください。

一般医療機器 一般名称: 歯科複模用ゴム質弾性印象材料 医療機器届出番号: 13B1X10098120001
製造業者: BISCO DENTAL PRODUCT ASIA LTD. (ビスコ デンタル プロダクト エイジア エルティエーディー) 製造国: 大韓民国

製造販売業者



株式会社エイコー

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL.03-3834-5777 FAX.03-3837-2655