

械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 双眼ルーペ (32692000)
SUKIサージカルルーペ

【禁忌・禁止】

レンズを通して太陽、光照射器、レーザー又はそれに準ずる光及び点灯させたLEDライトを直視しないこと [使用者の眼に有害な影響を与える可能性があるため]。

【形状・構造及び原理等】

外観



仕様

	W420	W370
作業距離	420~430mm	370~390mm
拡大視野径	110mm	90mm
フレーム色	ブラック	ダークトータス
倍率	3.0×	
重量	44g	
ルーペアングル	29度	
レンズ等級	Aランク (aspheric レンズ)	
焦点深度	60mm	

【使用目的又は効果】

歯科治療時に作業野の拡大像を得るために用いる。

【使用方法等】

- 1) 必要に応じて、選択した矯正レンズに交換する。
- 2) 本品を装着し、瞳孔間距離調節ネジを回転させ、瞳孔間距離に合わせてレンズを調節する。
- 3) 鏡を使って、瞳とフレームの間隔が両眼とも同じであることを確認する。
- 4) 選択した作業距離にて、焦点を合わせ、視野の円がひとつになっていることを確認し、瞳孔間距離調節ネジを固定する。
- 5) 左右のプロテクトレンズをフレームに装着する。
- 6) 必要に応じて、ルーペライトを使用するときは、推奨のものを装着し、ルーペライトの製造販売業者の指示に従って使用する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 使用前に必ずレンズが清浄であることを確認すること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) レンズを通して太陽、光照射器、レーザー又はそれに準ずる光及び点灯させたLEDライト等を直視しないこと。
- 2) ルーペの感覚に慣れない場合は、使用時間を徐々に延ばすこと。
- 3) 調整や矯正レンズが適切でない場合は、頭痛や頸部痛を発症することがあるので、注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・拭掃および消毒後は、水分を除去し、十分に乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆、変色等の原因となることもある。
- ・損傷を防ぐために、レンズを保護し、専用のケースで保管すること。
- ・高温多湿、直射日光を避けた室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前後は必ずレンズの汚れを確認し、清浄な細目の繊維の乾いた布又は湿った布等で拭掃すること。
- 2) 消毒が必要な場合は、逆性石鹼、フェノール系、アルコール系の消毒剤を使用すること。グルタルアルデヒド、ヨード剤あるいは他の消毒剤は損傷を与えることがあるので使用しないこと。

[保守・点検に関する注意事項]

- 1) 拭掃に使用する布は粗目のものを使用しないこと。
- 2) 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、プラスチック部分が変質する場合があるので、目立たない部分で試してから使用すること。
- 3) 超音波洗浄器は使用しないこと。
- 4) 高圧蒸気滅菌器、ケミクレープは使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンタルフォーラム 田代 明彦
住所 東京都千代田区外神田 5丁目1番3号
電話番号 03-5688-8875
製造業者 SUKI DENTAL, INC
製造国 大韓民国