

Veneer Cementation Begins With CHOICE™ 2



チョイス2 ベニアセメント



8色のセメントシェードをラインアップ ベニアセメンテーション用 光重合型レジンセメントシステム

チョイス2ベニアセメント

- ベニアセメンテーション用の光重合型レジンセメントです。
- 長期色調安定性および審美性に優れています。
- 高い耐圧強度を有し、修復物を長期的に維持します。
- 光重合型レジンセメントのため、作業時間をコントロールすることができます。
- VITAシェードを含めて、自然歯と近似した8色のセメントシェードがあります。

シェード：A1, A2, A3, B1, トランスルーセント, ユニバーサルオパーク, ミルキーオパーク, ミルキーブライト



A1



A2



A3



B1



トランス
ルーセント



ユニバーサル
オパーク



ミルキー
オパーク



ミルキー
ブライト



チョイス2ベニアセメントは、
ベニアセメンテーションを
確実にするための構成品を
ご用意しています。



セレクトHVエッチ



- 35%リン酸エッチング材です。
- たれ流れずに水洗が容易な高粘度ジェル。

オールボンドユニバーサル



- エッチング、プライミング、ボンディングを1液で対応する歯質および多種類の歯科材料接着用1ボトル・1ステップシステムの接着材です。
- 2層塗布するだけで、均一で理想的な被膜厚さを形成します。
- 光重合後、疎水性となり、安定した接着層を形成し、長期接着耐久性を実現します。

チョイス2トライインペースト



- 最も適切なシェードを決定するために、セメンテーション前に色調の試適ができるトライインペーストです。
- ベニア接着前にトライインペーストを塗布し、シェード確認後、水洗が容易です。

ビスコポーセレンエッチャント

(9.5%フッ化水素酸) 医薬用外毒物



- ポーセレン、ニケイ酸リチウム用の、技工専用フッ化水素酸エッチング材です。
- ジェルタイプのため、たれ流れずに、ベニア全体に正確な塗布ができ、水洗が容易で、被着面を効果的に粗面化することができます。

※口腔内では使用しないでください。

ビスシラン



- 使用直前に混和する2液性のシランカップリング材です。
- 歯質とベニアとの接着を強化します。
- 2液性のため、常に新鮮な状態で長期保管ができます。

ポーセレンボンディングレジン



- ベニア用接着材です。
- HEMA無配合、疎水性成分配合のため、加水分解を防止し、色調変化を防止します。
- 濡れ性レジンのため、ベニア被着面に塗布後、チョイス2ベニアセメントを非常に薄く広げることができ、接着力を向上させます。

ご使用例

試適



トライインペーストをベニアの被着面に塗布します。




トライインペーストを塗布したベニアを口腔内に試適し、チョイス2の色調を確認し、決定します。



ベニアを外し、歯質およびベニアのトライインペーストを水洗します。ベニアの洗浄には、蒸留水やエタノール液中にて2～3分間の超音波洗浄を推奨します。乾燥させます。

修復物の前処理

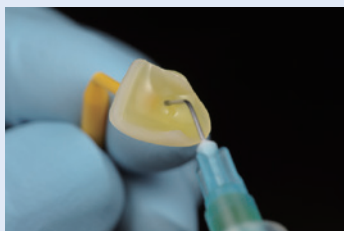

ビスコポーセレンエッチャント（9.5%フッ化水素酸）をベニアの被着面に塗布し、ポーセレン修復物は90秒間、ニケイ酸リチウム修復物は20秒間放置します。
※口腔内では使用しないでください。



大量の水で水洗後、乾燥させます。

※廃液等は、ポリエチレン容器に貯蔵し、関連法令に基づき処理してください。



ビスシラン A液とB液を同量混和し、アプリーケーターにてベニアの被着面に1～2層塗布し、30秒間放置し、エアー乾燥させます。

歯質の処理



歯面清掃、水洗、乾燥します。セレクトHVエッチを歯質に塗布し、15秒後に水洗し、穏やかにエアー乾燥させ、歯質を湿った状態にします。



オールボンドユニバーサルを10～15秒間、塗布を2回行います。
1回目の塗布後、光照射しないでください。




10秒間エアー乾燥させ、5秒間、光照射（1000mW/cm²）します。

装着



ベニアの被着面に、ポーセレンボンディングレジン、アプリーケーターにて薄く塗布します。
※光照射しないでください。

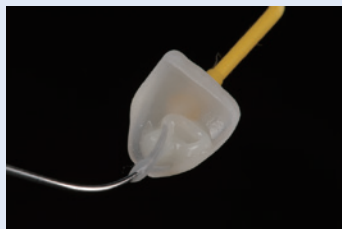

ベニアの被着面に、選択したシェードのチョイス2ベニアセメントを塗布します。

余剰セメントの除去最終重合



慎重に、ベニアを所定位置に合わせて圧接し、ベニア処置歯毎に2～3秒間、光照射（1000mW/cm²）し、仮着します。余剰セメントを除去します。



舌側と唇側からそれぞれ20秒間、光照射（1000mW/cm²）します。



術後。



キットには、ビスコポーセレンエッチャント(9.5%フッ化水素酸)が含まれております。
 ビスコポーセレンエッチャント(9.5%フッ化水素酸)は、
医薬用外毒物 9.5%弗化水素酸です。
 技工専用 ※口腔内では使用不可です。

● CHOICE 2 ベニアセメント スターターキット 歯科医院様参考価格: ¥48,000

内容: CHOICE 2 ベニアセメント 4.5g 5本(トランスルーセント 2本、A1 1本、A2 1本、B1 1本)
 ビスコポーセレンエッチャント(9.5%フッ化水素酸) シリンジ 5g 1本、シリンジチップ(ブラック プラスチック) 25本
 ビスシラン A液 6mL 1本、ビスシラン B液 6mL 1本、
 ポーセレンボンディングレジジン 6mL 1本、ミキシングウェル(ディスポーザブル 2穴) 15個、
 セレクトHVエッチ シリンジ 5g 1本、シリンジチップ(ダークブルー 22G) 15本、
 オールボンドユニバーサル 6mL 1本、アプリケーター(ダークブルー プリストルブラシ) 25本

● CHOICE 2 ベニアセメント フルキット 歯科医院様参考価格: ¥60,000

内容: CHOICE 2 ベニアセメント 4.5g 5本(トランスルーセント 2本、A1 1本、A2 1本、B1 1本)
 CHOICE 2 トライインペースト 2g 5本(トランスルーセント 2本、A1 1本、A2 1本、B1 1本)
 ビスコポーセレンエッチャント(9.5%フッ化水素酸) シリンジ 5g 1本、シリンジチップ(ブラック プラスチック) 25本
 ビスシラン A液 6mL 1本、ビスシラン B液 6mL 1本、
 ポーセレンボンディングレジジン 6mL 1本、ミキシングウェル(ディスポーザブル 2穴) 15個、
 セレクトHVエッチ シリンジ 5g 1本、シリンジチップ(ダークブルー 22G) 15本、
 オールボンドユニバーサル 6mL 1本、アプリケーター(ダークブルー プリストルブラシ) 25本

● CHOICE 2 ベニアセメント (CHOICE 2 ベニアセメント リフィル 各4.5g) 歯科医院様参考価格: 各 ¥4,800

シェード: A1, A2, A3, B1, トランスルーセント, ユニバーサルオパール, ミルキーオパール, ミルキーブライト

● CHOICE 2 ベニアセメント (CHOICE 2 トライインペースト リフィル 各2g) 歯科医院様参考価格: 各 ¥2,800

シェード: A1, A2, A3, B1, トランスルーセント, ユニバーサルオパール, ミルキーオパール, ミルキーブライト

● CHOICE 2 ベニアセメント (ビスシラン A液&B液 セット) 歯科医院様参考価格: ¥7,500

内容: ビスシラン A液 6mL 1本、ビスシラン B液 6mL 1本

● CHOICE 2 ベニアセメント (ポーセレンボンディングレジジン 6mL) 歯科医院様参考価格: ¥4,900

歯科接着用レジジンセメント 管理医療機器 医療機器認証番号 228AGBZX00072000 製造業者: BISCO, Inc. (ビスコ インク社) 製造国: アメリカ合衆国 (USA)

● セレクトHVエッチ (シリンジ 5g) 歯科医院様参考価格: ¥2,700

● ビスコポーセレンエッチャント (9.5%フッ化水素酸) シリンジ 5g **医薬用外毒物** 歯科医院様参考価格: ¥5,000

関連製品

リピールスターターキット (ミニ)



- リピールスターターキット(ミニ A1)
- リピールスターターキット(ミニ プリーチ)

歯科医院様参考価格: 各 ¥5,900

リピール



- リピール(シリンジ A1 2本入)
- リピール(シリンジ プリーチ 2本入)

歯科医院様参考価格: 各 ¥9,000

EZ-COPY クリアマトリックス



内容: EZ-COPY クリアマトリックス
 カートリッジ 48mL × 2本
 ミキシングチップ × 6本

歯科医院様参考価格: ¥5,500

オールボンドユニバーサル



内容
 ・オールボンドユニバーサル(6mL) 1本

歯科医院様参考価格: ¥13,000

マイクロエッチャーII A



- マイクロエッチャー II A
 歯科医院様参考価格: ¥69,000
- マイクロエッチャー II A プロキット
 歯科医院様参考価格: ¥76,000

コンタックEZ 修復用ストリップ



アソート5個入(5種類 × 1個入)
 内容: ブラック、オレンジ、ホワイト、ブルー、グレー 各1個入

歯科医院様参考価格: ¥4,500

セレクトHVエッチ: 医療機器認証番号: 225AGBZX00067000 管理医療機器	ビスコポーセレンエッチャント(9.5%フッ化水素酸): 医療機器届出番号: 13B2X10359040020 一般医療機器
リピールスターターキット(ミニ): 医療機器認証番号: 228AGBZX00050000 管理医療機器	リピール: 医療機器認証番号: 227AGBZX00103000 管理医療機器
EZ-COPY クリアマトリックス: 医療機器届出番号: 13B2X10359120002 一般医療機器	オールボンドユニバーサル: 医療機器認証番号: 225AGBZX00057000 管理医療機器
マイクロエッチャーII A: 医療機器届出番号: 13B2X10359010025 一般医療機器	コンタックEZ(修復用ストリップ): 医療機器届出番号: 13B2X10359130001 一般医療機器

本紙に掲載されている価格は2022年1月21日現在のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL. 0120-33-8020 FAX. 0120-66-8020



MORIMURA

株式会社 モリムラ

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は