

Veneer Cementation Begins With CHOICE™ 2



チョイス2 ベニアセメント



5色のセメントシェードをラインアップ ベニアセメンテーション用 光重合型レジンセメントシステム

チョイス2ベニアセメント

- ベニアセメンテーション用の光重合型レジンセメントです。
- 長期色調安定性および審美性に優れています。
- 高い耐圧強度を有し、修復物を長期的に維持します。
- 光重合型レジンセメントのため、作業時間をコントロールすることができます。
- VITAシェードを含めて、自然歯と近似した5色のセメントシェードがあります。

シェード：A1, A2, トランスルーセント, ユニバーサルオパール, ミルキーブライト



チョイス2ベニアセメントは、
ベニアセメンテーションを
確実にするための構成品を
ご用意しています。



セレクトHVエッチ



- 35%リン酸エッチング材です。
- たれ流れずに水洗が容易な高粘度ジェル。

オールボンドユニバーサル



- エッチング、プライミング、ボンディングを1液で対応する歯質および多種類の歯科材料接着用1ボトル・1ステップシステムの接着材です。
- 2層塗布するだけで、均一で理想的な被膜厚さを形成します。
- 光重合後、疎水性となり、安定した接着層を形成し、長期接着耐久性を実現します。

チョイス2トライインペースト



- 最も適切なシェードを決定するために、セメンテーション前に色調の試適ができるトライインペーストです。
- ベニア接着前にトライインペーストを塗布し、シェード確認後、水洗が容易です。

ビスコポーセレンエッチャント

(9.5%フッ化水素酸) 医薬外用毒物



- ポーセレン、ニケイ酸リチウム用の、技工専用フッ化水素酸エッチング材です。
 - ジェルタイプのため、たれ流れずに、ベニア全体に正確な塗布ができ、水洗が容易で、被着面を効果的に粗面化することができます。
- ※口腔内では使用しないでください。

ビスシラン



- 使用直前に混和する2液性のシランカップリング材です。
- 歯質とベニアとの接着を強化します。
- 2液性のため、常に新鮮な状態で長期保管ができます。

ポーセレンボンディングレジン




- ベニア用接着材です。
- HEMA無配合、疎水性成分配合のため、加水分解を防止し、色調変化を防止します。
- 濡れ性レジンのため、ベニア被着面に塗布後、チョイス2ベニアセメントを非常に薄く広げることができ、接着力を向上させます。



チョイス2ベニアセメント

ご使用方法


試適 TRY-IN

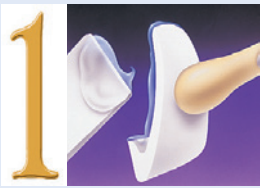

チョイス2トライインペーストをベニアの被着面に塗布します。




トライインペーストを塗布したベニアを口腔内に試適し、色調を確認し、決定します。

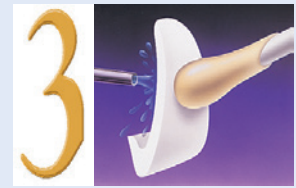


ベニアを外し、歯質およびベニアのトライインペーストを水洗します。
ベニアの洗浄には、蒸留水やエタノール液中にて2～3分間の超音波洗浄を推奨します。
乾燥させます。

ベニア修復物の処理 VENEER RESTORATION PREPARATION

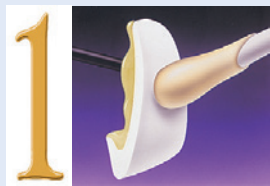


ビスコポーセレンエッチャント（9.5%フッ化水素酸）をベニアの被着面に塗布し、ポーセレン修復物は90秒間、ニケイ酸リチウム修復物は20秒間放置します。
※口腔内では使用しないでください。

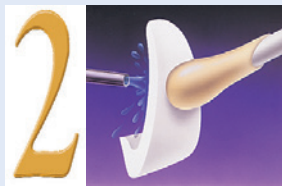

大量の水で水洗します。

※廃液等は、ポリエチレン容器に貯蔵し、関係法令に基づき処理してください。

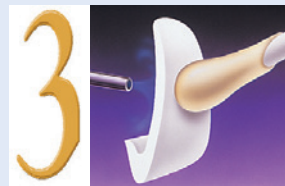

十分にエアードライさせます。




ビスシランA液とB液を同量混和し、アプリケーションにてベニアの被着面に1～2層に塗布し、30秒間放置し、エアードライさせます。


被着歯面の処理 TOOTH PREPARATION FOR VENEER




歯面清掃、水洗、乾燥します。セレクトHVエッチを歯面に塗布します。

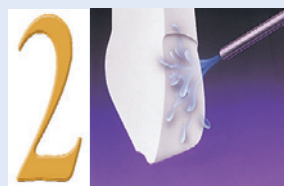

15秒後に水洗し、余剰水分を除去します。

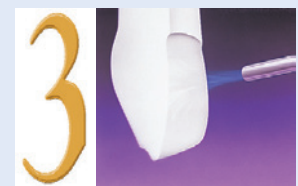


穏やかにエアードライさせ、歯面を湿った状態にします。

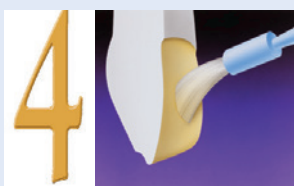

オールボンドユニバーサルを10～15秒間、塗布を2回行います。
※1回目の塗布後、光照射しないでください。




10秒間以上エアードライさせ、余剰の溶媒を揮散させます。

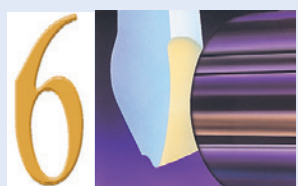


5秒間、光照射（1000mW/cm²）します。


ベニア修復物のセメント合着 VENEER CEMENTATION

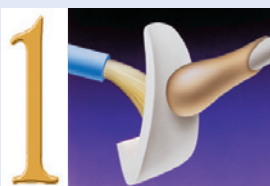

ベニアの被着面にポーセレンボンディングレジンを実用アプリケーションにて薄く塗布します。
※光照射しないでください。

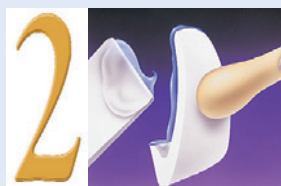

ベニアの被着面に、選択したシェードのチョイス2ベニアセメントを塗布します。

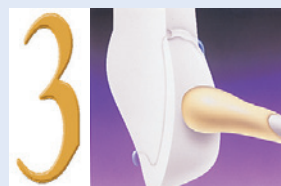

ベニアを慎重に所定位置に合わせて圧接します。



ベニア処置歯毎に2～3秒間、光照射（1000mW/cm²）し、仮着します。余剰セメントを除去します。舌側と唇側から各20秒間、光照射（1000mW/cm²）します。

**チョイス2ベニアセメント
チョイス2ベニアセメント リフィル 4.5g**

シェード:A1, A2, トランスルーセント, ユニバーサルオパーク, ミルキーブライト



内容:チョイス2ベニアセメント リフィル 4.5g シリンジ 1本
歯科医院様参考価格:各 ¥6,900

**チョイス2ベニアセメント
チョイス2トライインペスト リフィル 2g**

シェード:A1, A2, トランスルーセント, ユニバーサルオパーク, ミルキーブライト



内容:チョイス2トライインペスト リフィル 2g シリンジ 1本
シリンジチップ(ダークブルー 22G) 15本
歯科医院様参考価格:各 ¥4,000

セレクトHVエッチ (シリンジ 5g)



内容:セレクトHVエッチ シリンジ 5g 1本
シリンジチップ(ダークブルー 22G) 15本
歯科医院様参考価格: ¥3,800

**ビスコポーセレンエッチャント
(9.5%フッ化水素酸) シリンジ 5g**

医薬用外毒物



内容:ビスコポーセレンエッチャント(9.5%フッ化水素酸) 5g シリンジ 1本
シリンジチップ(ブラック プラスチック) 25本
歯科医院様参考価格: ¥5,500

オールボンドユニバーサル 6mL



内容:・オールボンドユニバーサル(6mL) 1本
歯科医院様参考価格: ¥19,800

**チョイス2ベニアセメント
ビスシラン A液&B液 セット**



内容:ビスシラン A液 (6mL) 1本
ビスシラン B液 (6mL) 1本
歯科医院様参考価格: ¥10,700

**チョイス2ベニアセメント
ポーセレンボンディングレジン 6mL**



内容:・ポーセレンボンディングレジン(6mL) 1本
歯科医院様参考価格: ¥6,400

関連製品

EZ-COPY クリアマトリックス



内容:EZ-COPY クリアマトリックス
カートリッジ 48mL 2本
ミキシングチップ 6本
歯科医院様参考価格: ¥6,000

マイクロエッチャーII A



●マイクロエッチャー II A
歯科医院様参考価格: ¥73,000
●マイクロエッチャー II Aブローキット
歯科医院様参考価格: ¥80,000

**コンタックEZ 修復用ストリップ
アソート5個入**



内容:ブラック、オレンジ、ホワイト、ブルー、グレー 各1個入
歯科医院様参考価格: ¥6,000

セレクトHVエッチ:医療機器認証番号:225AGBZX00067000 管理医療機器
EZ-COPY クリアマトリックス:医療機器届出番号:13B1X10394120002 一般医療機器
マイクロエッチャー II A:医療機器届出番号:13B1X10394010025 一般医療機器

ビスコポーセレンエッチャント(9.5%フッ化水素酸):医療機器届出番号:13B1X10394040020 一般医療機器
オールボンドユニバーサル:医療機器認証番号:225AGBZX00057000 管理医療機器
コンタックEZ(修復用ストリップ):医療機器届出番号:13B1X10394130001 一般医療機器

本紙に掲載されている価格は2024年1月22日のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。