

WHAT IS IT ?




**PAC-DAMテンプレート  
プラスチック**

色調: イエロー・ピンク・マットブラック ※厚さ: 3mm  
重さ: 22g

歯科医院様参考価格 **¥4,800**

歯科用ラバーダムテンプレート

**PAC-DAM テンプレート**

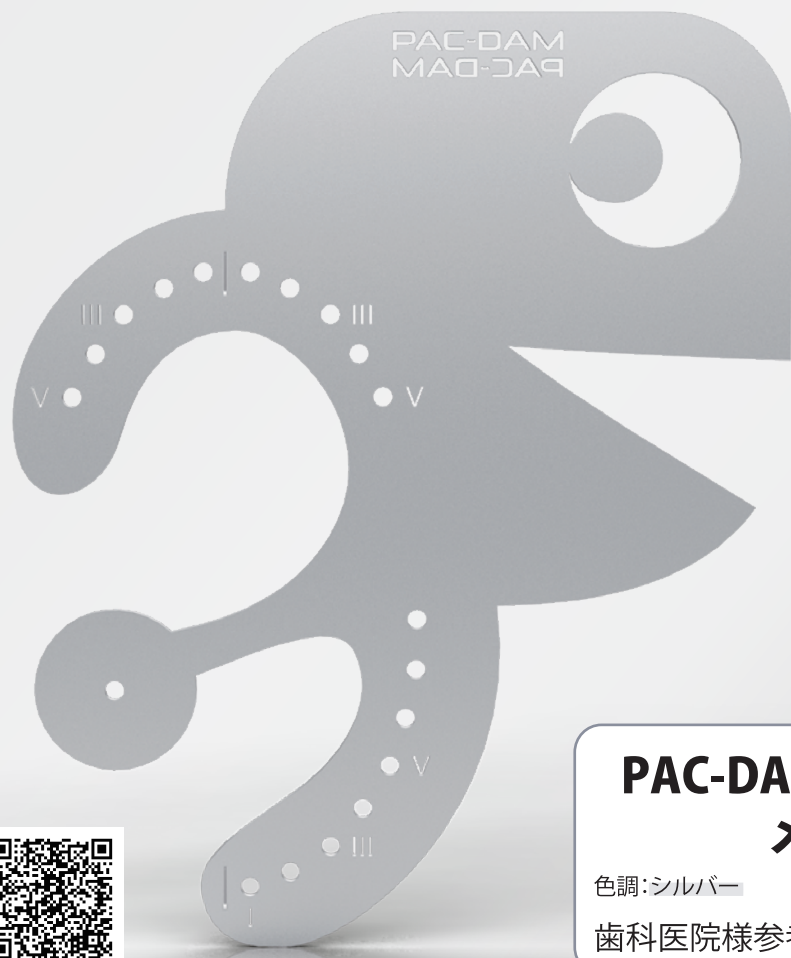

**PAC-DAMテンプレート  
メタル**

色調: シルバー

※厚さ: 1mm  
重さ: 48g

歯科医院様参考価格 **¥7,000**





#PacDam

Made in Italy


MORIMURA DENTAL COMPANY

# PAC-DAMテンプレート

ラバーダム法は、歯内療法や接着では必須といわれています。  
 PAC-DAMテンプレートは、ラバーダムシートに適切な穿孔位置を印記することができるPOPでキュートなラバーダムテンプレートです。  
 メタル製(約1mm厚)とプラスチック製(約3mm厚)があり、プラスチック製のカラーは、イエロー・ピンク・マットブラックがあります。

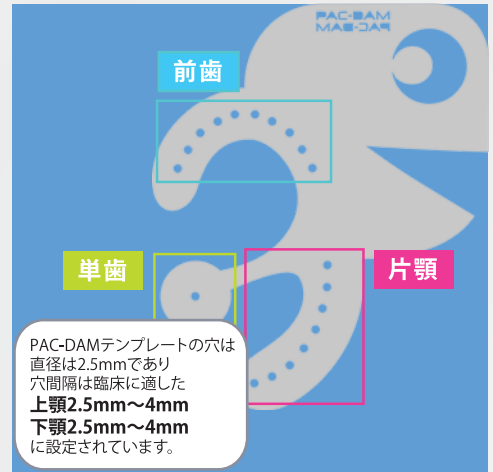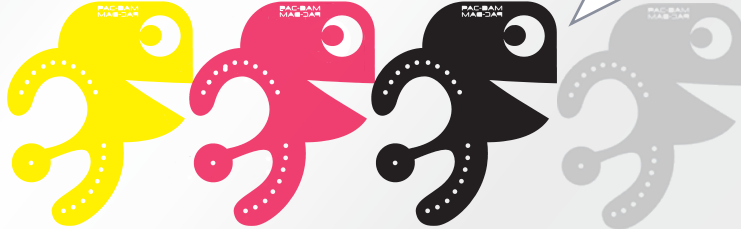


目視による穿孔

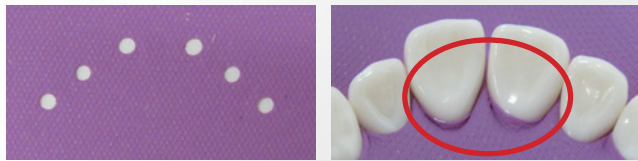

穿孔が不適切の場合、ラバーダムシートが引っ張られて切れたり、たるんだりしてしまふことがあり、確実な防湿ができず、患者の負担が増えたりすることがあります。

PAC-DAMテンプレート使用後の穿孔

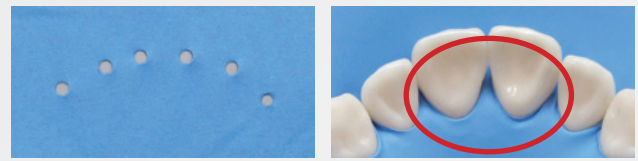

PAC-DAMテンプレートを使用することで、ラバーダムシートの適切な位置を穿孔することができ、唾液による汚染を防止することができます。

## 消毒・滅菌

本品は、使用前に必ず洗浄と消毒を行ってください。

・ PAC-DAM テンプレート プラスチックは、薬液消毒が可能です。  
 ・ PAC-DAM テンプレート メタルは、薬液消毒およびオートクレーブ滅菌(134℃、4分間)が可能です。  
 ※ 薬液消毒を行う場合は、薬液の製造業者の指示に従って消毒を行ってください。

## 使用方法

- (1) 下図を参考に、PAC-DAMテンプレートを適切な向きにします。
- (2) ラバーダムシートのコーナーに、適切な向きで合わせたPAC-DAMテンプレートのコーナーを合わせ、先端の尖った鉛筆やペンで隔離する歯牙の部位を印記します。
- (3) 印記した部位をラバーダムパンチで穿孔します。

**1** 5 | 5 6 | 1 ~ 8

ラバーダムシートの右上にPAC-DAMテンプレートのコーナーを合わせます。

**2** 5 | 5 8 ~ | 1 6

ラバーダムシートの左上にPAC-DAMテンプレートのコーナーを合わせます。

**3** 6 | 1 ~ 8 5 | 5

ラバーダムシートの右下にPAC-DAMテンプレートのコーナーを合わせます。

**4** 8 ~ | 1 6 5 | 5

ラバーダムシートの左下にPAC-DAMテンプレートのコーナーを合わせます。

※ 叢生のようなPAC-DAMテンプレートと一致しない歯牙に対しては、適応箇所印をつけ足してください。  
 ※ ラバーダムシートに誤って付けた印は、アルコールで除去することができます。

本紙に掲載されている価格は2024年1月22日現在のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。



株式会社 **モリムラ**

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

● 製品に関するご用命は