

ベニア／インレー スティックス



セメンテーション中の位置ズレを防止


異なる角度から修復物にアプローチが可能

間接修復物の形態に合わせた2種類のチップ



ベニアスティックス

4つの突起がある保持面で、ベニアを均一に圧接させることができます。

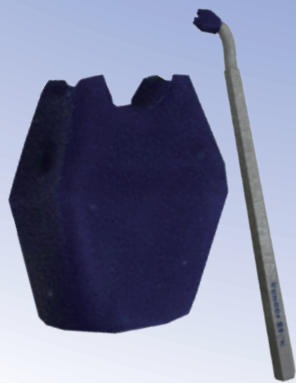

臨床写真で提供: マイスター春日歯科クリニック 遠山敏成先生

インレー／アンレーススティックス

ポイント型の保持面は、インレー／アンレーの裂溝に適合し、均一に圧接させることができます。



臨床写真で提供: 代官山アドレス歯科クリニック 院長 大河雅之先生



ベニア／インレースティックス



ベニアスティックス



図1 中切歯のベニア修復のセット

ベニアチップの
短辺を歯頸部側、
長辺を切縁側に回転
させることができます。
4つの突起がベニアを
均一に圧接します。

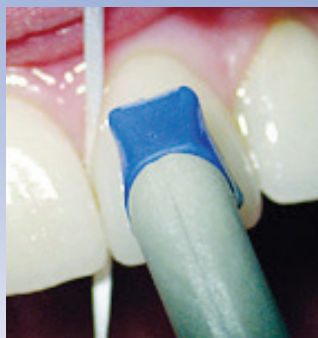


図2 合着

ベニアを圧接しながら、
デンタルフロス等を用いて
余剰セメントの除去を
行うことができますので、
ベニアの位置ズレや脱離等の
アクシデントを防ぎます。

図1 臨床写真で提供：マイスター春日歯科クリニック 遠山 敏成先生

インレー／アンレースティックス



図1 第一大臼歯のインレーのセット



図2 合着



図3 光照射



図4 最終研磨

セラミックインレーなどは、セット時に圧力をかけ過ぎ
ますと、破折してしまう可能性があります。
ソフトなインレー／アンレーチップのクッション性で
適切な圧力でセットすることができます。

臨床写真で提供：マイスター春日歯科クリニック 遠山 敏成先生

- ▶ ベニア／インレースティックスはオートクレーブ滅菌(120℃以下、20分未満)が可能です。
- ▶ チップの材質は合成ゴムです。また、チップは単回使用です。
- ▶ ベニアスティックスにインレー／アンレーチップを装着することができ、その反対も可能です。

包装

ベニア／インレースティックス イントロキット



- ・ベニアスティックス(ライトグレー) 2本
- ・ベニアチップ(ブルー) 6個
- ・インレー／アンレーチップ(ホワイト) 6個

歯科医院様参考価格 **¥9,800**

ベニアスティックス キット



- ・ベニアスティックス(ライトグレー) 1本
- ・ベニアチップ(ブルー) 6個

歯科医院様参考価格 **¥5,400**

インレー／アンレースティックス キット



- ・ベニアスティックス(ライトグレー) 1本
- ・インレー／アンレーチップ(ホワイト) 6個

歯科医院様参考価格 **¥5,400**

ベニアチップ



ベニアチップ(ブルー) 12個

歯科医院様参考価格 **¥3,100**

インレー／アンレーチップ



インレー／アンレーチップ(ホワイト) 12個

歯科医院様参考価格 **¥3,100**

一般医療機器 医療機器届出番号:1382X10359000008 製造業者George Taub Products & Fusion Co.,Inc.社(アメリカ合衆国)

本紙に掲載されている価格は2021年4月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

➡ TEL. **0120-33-8020** FAX. **0120-66-8020**



株式会社 **モリムラ**

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は