

機械器具 67 歯科用防湿器  
一般医療機器 歯科用ラバーダム (11155010)

## Nic Tone ラバーダム

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 天然ゴムを使用しています。天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある歯科医療従事者の使用及び患者への使用は禁止すること。
- 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- 再使用禁止。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1.形状

種類	寸法	厚さ	色調	原材料			
ラテックスシート	6×6 インチ	シン (0.15-0.21mm)	ブルー グリーン	天然ゴム			
		ミディアム (0.22-0.33mm)	ブルー グリーン ブラック				
		シック (0.34-0.40mm)	ブルー グリーン ブラック				
		*ノンラテックスシート	ミディアム (0.22-0.33mm)		ブルー	合成ゴム、*香料	
		ラテックスシート	5×5 インチ		シン (0.15-0.21mm)	ブルー グリーン	天然ゴム
					ミディアム (0.22-0.33mm)	ブルー グリーン	
シック (0.34-0.40mm)	ブルー グリーン						

#### 2.原理

ラバーダムパンチで穴をあけ、治療歯に被せて歯を孤立させることで手術野を鮮明にする。唾液や細菌による汚染を防ぎ、薬剤や器材等の誤飲を防ぐことができる。

### 【使用目的又は効果】

歯科治療中に口腔内で手術野を隔離するために用いる。

### 【使用方法等】

- ラバーダムパンチで本品に穴をあけ、歯牙に被せる。
- 露出させた歯の歯頸部にラバーダムクランプ等を装着することで本品を固定し、手術野を隔離する。

#### 【使用方法等に関連する使用上の注意】

薬品や溶剤等によっては、本品に付着すると膨潤したり浸透したりする場合がありますため、注意して使用すること。

### 【使用上の注意】

[使用注意]  
再使用しないこと。

#### [重要な基本的注意]

- 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が表れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が表れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
- 本品の接触による過敏症を防ぐため、保護グローブ、保護メガネ、保護マスク等を使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### [保管方法]

##### \*1)ラテックスシート

直射日光、高温多湿を避けた、20～25℃の暗所に保管すること。

##### \*2)ノンラテックスシート

直射日光、高温多湿を避けた、10～35℃の換気の良い暗所に保管すること。

#### [有効期間]

包装に記載の使用期限までに使用すること。  
記載の使用期限は、自己認証(当社データ)による。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者  
電話番号

株式会社モリムラ  
03-5808-9350

製造業者

Manufacturer Dental Continental,S.A.de  
C.V.(マニファクチャラー デンタル コンチネンタル エスエーデー シーブイ社)

製造国

メキシコ合衆国