

スマイルデント リニューアル！

スマイルデントプラス 新発売キャンペーン デンチャーブラシ プレゼント！

限定 15,000 本 2021 年 2 月 22 日（月）～ 4 月 20 日（火）

スマイルデントプラス
120錠 4個 お買い上げで



デンチャーブラシ
4本 プレゼント！

患者様向け



スマイルデントプラス
48錠 6個 お買い上げで



デンチャーブラシ
6本 プレゼント！

患者様向け



※キャンペーンは数量限定販売につき、期間中でも限定数量（景品：15,000 本）に達し次第、終了とさせていただきます。

（歯科医院専用） 入れ歯洗浄剤

Smile Dent
スマイルデント⁺

部分入れ歯 兼用 総入れ歯

ノンクラスプ入れ歯

強力除菌
ニオイ除去

酵素配合
発泡洗浄

防サビ剤入
ミントの香り



48錠



120錠

※デザインはイメージです。



歯科医院専用 入れ歯洗浄剤

スマイルデントプラス

カンジダ菌
除菌率※
99.99%

※40℃・5分で99.99%除菌します。
※全ての菌に効果があるわけではありません。

スマイルデント

リニューアル

スマイルデントプラス

リニューアル

1 トリプル除菌剤配合

Ag⁺

アルミノケイ酸塩(銀イオン含有)から銀イオンが放出されます。

CPC

塩化セチルピリジニウム(CPC)は、歯磨剤、のど飴などにも使用されています。

IPMP

イソプロピルメチルフェノール(IPMP)は、環境にやさしい成分で歯磨剤などにも使用されています。

リニューアル

2 さらに金属の変色を防ぐ処方へ

防サビ剤(金属の変色を防ぐ成分)を新配合

- 部分入れ歯の割合も増えており、金属床入れ歯は保険適用となっています。
- 金属への影響(変色等)を防ぐために、配合成分を調整し、洗浄力を維持しました。

※ごく一部の金属でまれに変色することがあります。

リニューアル

3 約150~200mLに対し錠剤 1 錠へ

- 部分入れ歯の割合も増え、300mL も必要としない状況があります。
- 市販の入れ歯洗浄ケースの容量も、200mLのものが多くあります。

特 長

- 強力除菌※** 入れ歯に付着している菌をしっかり除菌します。
- ニオイ除去** 漂白洗浄成分が入れ歯のニオイを消します。
- 酵素配合** 酵素がしつこい汚れも取り除きます。
- 発泡洗浄** 発泡洗浄し、漂白できます。
- 防サビ剤入** 入れ歯の金属部分の変色・変質を防ぎます。
- ミントの香り** さわやかなミントの香りでスッキリ爽快。

※全ての菌に効果があるわけではありません。

部分入れ歯 兼用 総入れ歯
ノンクラスプ入れ歯

部分入れ歯



総入れ歯



ノンクラスプ入れ歯



成分 発泡剤(炭酸塩、クエン酸)、漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、アニオン系界面活性剤、アルミノケイ酸塩(銀イオン含有)、塩化セチルピリジニウム(CPC)、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、漂白活性化剤(TAED)、ポリリン酸塩、酵素、防錆剤、結合剤、流動改善剤、色素、香料

液 性 中性

形態・仕様は予告なく変更することがあります。

使用方法

① 約150~200mLの水またはお湯(40~50℃)に錠剤を1錠入れます。

※60℃以上のお湯で使用しないでください。
入れ歯が変色、変形することがあります。
※水温が低いと発泡力が弱くなりますので、40~50℃のお湯を使うことをおすすめします。



② すぐに入れ歯を浸してください。

※通常の汚れの洗浄は、5分程度で終了します。
※特に汚れがひどい場合は一晩浸しておく効果的です。



③ 洗浄後は水でよくすすいでください。

※ごくまれに汚れが落ちない場合がありますが、無理な洗浄やブラッシングはせずに、歯科医にご相談されることをおすすめします。



48錠



120錠

※デザインはイメージです。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL. 0120-33-8020 FAX. 0120-66-8020

MORIMURA

株式会社 モリムラ

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は